

Scholl Elektrische Voetvijn voor moeiteloos zachte, mooie en gladde voeten.

- Voor gladde voeten in een handomdraai gebruik je deze Scholl Velvet Smooth Elektrische eelt verwijderaar voor de Harde Huid met verwisselbare roller.
- Zelfs de meest harde huid wordt weer glad en zacht.
- Op de houder van de Scholl Velvet Smooth Elektrische Voetvijn voor de Harde Huid zit een verwisselbare roller.
- De roller scrubt je huid op natuurlijke wijze.
- Vervang de roller tijdig voor een continu en optimaal resultaat.

Pakket bevat: 1 x Elektrische voetvijn / 1 x Exfoliatie roller / 1 x Roller voor hiel contour / 4 x AA batterijen.

Gebruiksaanwijzing:

Eerste gebruik: Verwijder de onderkant van het apparaat door het eraf te trekken. Druk op de vergrendeling om de binnenklep van de batterijen te openen. Plaats 4 nieuwe AA-batterijen in de richting die op het apparaat is aangegeven. Sluit de binnenklep van de batterijen door erop te drukken totdat je een klik hoort. Plaats het uiteinde weer op het handvat.

Zorg ervoor dat de roller goed op het apparaat is geplaatst is. Gebruik de vijn niet als de roiller niet is geïnstalleerd. Om in- of uitschakelen druk op AAN/UIT. Gebruik het knopje snelheid om over te schakelen naar de snelheid naar keuze. Ga met de roller over het eelt totdat je de gewenste zachtheid krijgt. Druk niet te hard, anders stopt het apparaat. Schakel het apparaat uit en controleer of je het gewenste resultaat hebt bereikt. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat weer in en ga verder. Waarschuwing: gebruik niet langer dan 3 tot 4 seconden op hetzelfde plekje. Stop als huidirritatie of ontsteking optreedt. Veeg of spoel je voeten af om dode huid volledig te verwijderen. Je kunt deze roller gebruiken op natte of droge voeten. Dompel het apparaat niet onder in water. Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik. Wij raden je aan om de Scholl-rollers alleen te gebruiken in combinatie met Scholl Velvet Smooth elektrische voetvijlen en om de 3 maanden te vervangen om de werkzaamheid optimaal te houden. Alle Scholl-navulling/rollers passen op de elektrische voetvijn Velvet Smooth. Je kunt deze rolkop op zowel droge als natte voeten gebruiken. Dompel het apparaat zelf nooit onder in water.

Reiniging na gebruik: dit apparaat is niet waterdicht. Zet het apparaat uit voordat je het schoonmaakt. Maak de roller los en was hem om het oppervlak schoon te maken. Om de roller te verwijderen, druk op de knop aan de zijkant van het apparaat en trek dan voorzichtig aan de roller. Spoel de roller onder de kraan om het oppervlak schoon te maken. Reinig de behuizing van het apparaat met een schone, vochtige doek. Droog de roller en het apparaat af met een schone, droge doek. Plaats de roller terug. Vervang de roller zodra deze minder effectief lijkt of om de 3 maanden. Zorg ervoor dat de elektrisch voetvijn uit staat en volg de stappen op de verpakking. Alle Scholl navulling/rollers passen op de Velvet Smooth Elektrische Voetvijn.

Advies: Niet gebruiken op beschadigde of geïrriteerde huid. Stop met het gebruik als irritatie optreedt. Als de irritatie aanhoudt, raadpleeg dan bovendien een arts. Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. Bewaar op een koele, droge plaats. Elke roller is alleen voor individueel gebruik en mag niet worden gedeeld.

Voorzorgsmaatregelen:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Alleen voor uitwendig gebruik en alleen gebruiken op harde huid op de voeten. Alleen gebruiken op droge huid (niet vochtig). Niet op andere lichaamsdelen gebruiken. Apparaat alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet langer dan 3-4 seconden op dezelfde plek gebruiken. Bij pijn of irritatie direct stoppen. Niet gebruiken op beschadigde, pijnlijke of geïrriteerde huid. Apparaat niet onderdompelen in water. Apparaat is niet geschikt voor mensen met diabetes of problemen met de bloedsomloop. Houd lang haar en kleding uit de buurt van het apparaat wanneer het in gebruik is.