



GSK Consumer Healthcare  
S.A.

Route de l'Etraz, 1260  
Nyon, Zwitserland

**Verdeler:**

GlaxoSmithKline  
Consumer Healthcare B.V.  
Huis ter Heideweg 62,  
3705 LZ ZEIST, Nederland



0800 4090005

nl.consumer-relations  
@gsk.com

www.otrivin.nl

Handelsmerken in eigendom  
van of in licentie van GSK.

©2017 GSK-bedrijfsgroep of  
licentiegever.



CE  
Medisch  
hulpmiddel

Neusaspiratie wordt aanbevolen bij elke verstopte neus van de baby, zo vaak als nodig en vooral vóór de maaltijd van de baby. Otrivin Baby Aspirator en Wegwerpdopjes helpen het neusje van de baby te reinigen door storend neusslijm op een zachte manier te verwijderen. De zachte neusdopjes zijn ontwikkeld voor handig gebruik in het neusje van de baby.

Elk wegwerpdopje, individueel verpakt, bevat een absorberende filter om slijm te verzamelen, waardoor het proces volledig hygiënisch is.

Otrivin Baby Wegwerpdopjes in combinatie met Otrivin Baby Aspirator helpen uw baby normaal te ademen, slapen, eten en zich weer beter te voelen.

Geschikt voor baby's, peuters en kinderen. Voor gebruik bij een pasgeboren baby dient u eerst medisch advies in te winnen.

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de materialen.

Gebruik geen neusdopjes waarvan het filter ontbreekt of beschadigd is.

Voor hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen, zijn de neusdopjes voor éénmalig gebruik.

Na gebruik dienen de dopjes te worden weggegooid en het mondstuk van de baby aspirator en uw handen te worden gewassen.

Vraag uw arts, apotheker of drogist indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product.

Bevat 8 zachte wegwerpdopjes met absorberend filter om te gebruiken met de Otrivin Baby Aspirator - Neusjesreiniger voor baby's.  
Neusjesreiniger apart verkrijgbaar.

Lees aandachtig de instructies op de verpakking van Otrivin Baby Wegwerpdopjes en Aspirator alvorens dit product te gebruiken.

Eenvoudig en hygiënisch in gebruik.

**Bevat:**  
PVC en melamine schuim.

**Bewaring:**  
**Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.**

Niet bewaren onder 0 °C of boven 30 °C.

Niet gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.