

Hoe gebruikt u teeth whitening strips?

Handleiding witte tanden strips:

Stap 1.

Poets voor gebruik de tanden. Neem een zakje witte tanden strips voor wittere tanden uit het doosje en scheur deze open. Zoals eerder al vermeld, ieder zakje bevat 2 witte tanden strips voor wittere tanden, 1 voor de boventanden en 1 voor de ondertanden

Stap 2.

Verwijder de Whitestrip voor de ondertanden van het plastic velletje en houdt deze Whitestrip met beide handen recht.

Stap 3.

Ga voor een spiegel staan en breng de Whitestrip voor wittere tanden met de gelzijde tegen de tanden aan. Als de Whitestrip goed zit druk je deze zachtjes aan. Voor de boventanden volgt u dezelfde procedure.

LET OP! Zorg ervoor dat de Whitestrip niet in contact komt met het tandvlees.

Stap 4.

Laat de Whitestrips 30 minuten zitten en verwijder deze na 30 minuten. Eventueel daarna u mond spoelen met water.

Stap 5.

Voor het beste resultaat herhaalt u de bovenstaande stappen gedurende 14 dagen of totdat het gewenste resultaat bereikt is.