

Soulagement temporaire des douleurs mineures et des douleurs des entorses et arthrose.
Mode d'emploi : ouvrir le sachet juste avant l'utilisation. Placez le côté sombre des alvéoles vers la peau. Si vous avez 55 ans ou plus, portez le patch par-dessus un vêtement.
Ne pas utiliser en cas de fuite au niveau des alvéoles et/ou de détérioration ou déchirure du patch.

Vérifiez votre peau fréquemment pendant l'utilisation. Si vous ressentez une irritation ou une brûlure, retirez immédiatement le produit.

- Si le produit semble trop chaud, arrêtez l'utilisation ou portez le patch par-dessus un vêtement plutôt que directement sur votre peau. Ne pas exercer de pression supplémentaire sur le produit, par exemple en vous appuyant contre des surfaces dures ou en le portant sous des vêtements serrés. Ne pas porter plus de 8 heures par période de 24 heures.

- Chaque alvéole contient du fer (environ 2 g) : en cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez avec de l'eau et contactez immédiatement un médecin.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Ne chauffez jamais le patch dans un four à micro-ondes et ne tentez jamais de le réchauffer car il pourrait s'enflammer.
- Pour des informations produit complètes voir l'emballage extérieur.

Verwendung : bietet Wärmetherapie zur vorübergehenden Linderung von leichten Muskel- und Gelenkschmerzen und Schmerzen, die mit Überanstrengung, Zerrungen, Verstauchungen und Arthritis verbunden sind.
Gebrauchsanweisung : Beutel kurz vor Gebrauch Öffnen. Legen Sie die dunklere Seite der ThermaCare auf der Haut. Ab einem Alter von 55 Jahren ThermaCare über dünner Kleidung tragen und nicht anwenden, wenn Sie schlafen.
Nicht verwenden wenn der Inhalt der Zelle ausläuft und / oder die Umhüllung beschädigt oder zerrissen ist.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen :

- Hitzeprodukte können Verbrennungen / Blasen verursachen. Überprüfen Sie die Haut während des Gebrauchs häufig. Bei Reizung oder Verbrennungen das Produkt sofort entfernen.
- Wenn das Produkt zu heiß ist, verwenden Sie es nicht mehr direkt auf Ihrer Haut, sondern tragen Sie keine Kleidung darüber. Üben Sie keinen Druck auf die Umhüllung aus, z. B. wenn Sie sich gegen harte Oberflächen lehnen oder enge Kleidung tragen. Wenden Sie ThermaCare innerhalb von 24 Stunden nicht länger als 8 Stunden an.

- Entfernen Sie das Produkt, bevor Sie einem MRI-Verfahren (Magnetresonanztomographie) untergehen, um ein erhöhtes Verbrennungsrisiko zu vermeiden.
- Jede Wärmезelle enthält Eisen (ca. 2 g). Bei Verschlucken, Haut- oder Augenkontakt den Umschlag entfernen, den betroffenen Bereich mit Wasser spülen und umgehend einen Arzt konsultieren.
- Darf nicht in die Hände von Kindern und Haustieren gelangen. Erwärmen Sie ThermaCare® niemals in der Mikrowelle und versuchen Sie nicht, ThermaCare erneut aufzuwärmen, da die Umhüllung Feuer fangen kann.
- Vollständige Produktinformationen finden Sie im Umkarton.

1023/1009-08

Made in USA



PAA143541

LOT



GA0184 10/22
 2024-09 21:24



 ANGELINI  Angelini Pharma Inc.,
 1231 Wyandotte Dr., Albany, Georgia 31705, USA

