


# Roege International

## Gebruikershandleiding

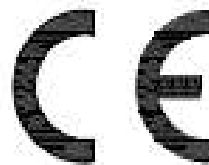

### Toiletstoel

#### Belangrijk!

Lees voordat u de toiletstoel gebruikt aandachtig de gebruikershandleiding. Let goed op alle instructies, vooral op deze betreffende de veiligheid, en volg ze altijd op.

#### Juist gebruik

De toiletstoel is alleen bedoeld als zitting bij het toiletteren. Gebruik of bewaar de toiletstoel niet buitenshuis.



#### In hoogte verstellen.

U kunt de zithoogte verstellen door de klemmen onderaan de poten te verwijderen en de gewenste hoogte te kiezen. Daarna zet u deze hoogte vast door de klemmen weer in de stoelpoten te drukken. Controleer, nadat u de juiste hoogte heeft gekozen, of de klemmen weer vastgeklikt zijn en alle 4 de stoelpoten op dezelfde hoogte zijn afgesteld.

#### Reinigen

Het schoonmaken van de toiletstoel moet regelmatig gebeuren. Het toiletstoel kan afgenomen worden met een natte doek. Bij sterke verontreiniging kan er een mild schoonmaakmiddel worden gebruikt.

#### Garantie

De fabrikant geeft u een garantie van 1 jaar. Deze garantie vervalt bij schade door onjuist gebruik van het product. Als u schade constateert neemt u dan meteen contact op met Roege International. De garantie dekt geen ongelukken of andere schade eventueel gerelateerd aan het niet functioneren van het product

#### Toiletstoel

Zitbreedte	44cm
Zitdiepte	40cm
Zithoogte	46- 60cm
Totale breedte	61cm
Totale hoogte	85- 99cm
Hoogte armleuningen	70cm
Maximale belasting	130kg
Totaal gewicht	7,5kg

#### Roege International

Postadres:

Postbus 581

9400 AN Assen

Telefoon: 0592-344716/ 0031592-344716

Fax 0592-344106/ 0031592-344106

Mail: [info@roegeint.com](mailto:info@roegeint.com)

Website [www.roegeint.com](http://www.roegeint.com)

Bank ING bank 67.21.74.383

Btw nummer NL 8173.42.138B01

KvK nummer 04084054

UNGM registratie 140407