

Tips voor gebruik

01

Was je handen voor en na gebruik. Zorg ervoor dat je huid schoon en droog is.

02

Houd de applicators vast in de buurt van het transparante gedeelte ervan en scheur 1 applicator met patch af langs de geperforeerde scheurlijn.

03

Houd applicator vast aan de transparante zijde.

04

Haal de transparante applicator van het gekleurde beschermkapje.

05

Je ziet de ronde patch aan de bovenkant van de applicator. Breng het aan op de lipblaasje en druk het zachtjes aan om de patch stevig op de lipblaasje te plaatsen.

06

Trek de applicator voorzichtig terug en laat de patch op zijn plaats zitten. Eventueel kan nu make-up en lippenstift over het patch worden aangebracht.

Hoe werkt de hydrocolloïde technologie?

COMPEED® Invisible Patch tegen Lipblaasjes met Applicator met zijn hydrocolloïde technologie werkt van binnenuit om het natuurlijke genezingsproces van het lichaam te helpen versnellen.

De "Hydrocolloid-075" actieve geltechnologie creëert een optimaal kiemvrij genezingsklimaat om de vorming van korstjes en de verspreiding van de lipblaasje te helpen voorkomen.

De patch is discreet en werkt ook als een virusschild om het risico op besmetting te verminderen en te voorkomen dat de lipblaasje erger wordt.

Het blijft tot 12 uur zitten*

Voor het beste resultaat gebruik je de patch van zodra zodra je een tintelend gevoel krijgt en blijf je die dag en nacht gedurende de hele uitbraak gebruiken totdat de lipblaasje volledig is genezen.