

Reinigingsinstructies

Reinig de Spacer (inhalatiekamer) minstens één keer per week en wel als volgt (niet reinigen met kokend of heet water daar dit de Spacer kan beschadigen):

Instructions de nettoyage

Nettoyez le Spacer (chambre d'inhalation) au moins une fois par semaine de la manière expliquée ci-après (n'utilisez pas d'eau chaude ni d'eau bouillante parce que cela pourrait endommager le Spacer):



Verwijder het achterstuk en demonteer de andere onderdelen van de Spacer.

Retirez la pièce arrière et démontez les autres pièces du Spacer.



Week al de onderdelen gedurende 15 minuten in lauw water met vloeibare reinigingsmiddel. Schud zachtjes.

Mettez toutes les pièces à tremper pendant 15 minutes dans de l'eau tiède contenant un nettoyant liquide. Agitez doucement.



Spoel met zuiver water.

Rincez dans de l'eau propre.



Schud om het overtollige water te verwijderen. Niet droog wrijven.

Agitez pour enlever l'eau excédentaire. Ne pas la sécher avec une serviette.



Laat drogen in een verticale positie.

Laissez sécher verticalement.



Plaats het achterstuk wanneer de Spacer volledig droog en klaar voor gebruik is.

Remplacez la pièce arrière lorsque le Spacer est complètement sec et prêt à l'emploi.

Batch no.: 220826

Mfg. date: 08/10/2022

Een product van / Un produit de



Management System
EN ISO
13485:2016

www.tuv.com
ID: 900017179



Eureka Pharma

Harelbeeksestraat 81 - B-8520 Kuurne
België/Belgique - www.eurekapharma.be