

5°C -30°C



50027160

Rev 01 (04/2022)



PLUS D'EXPLORATION ET DE PLAISIR UN LUBRIFIANT AU PHADAD
RAPPORTS SEXUELS DOUX ET AGRÉABLES / MEER SEXPERIMENTE
WRIJINGSLÖZE SEKS EN MEER PLEZIER DAT DE IN TIEME BALANS NIET
VERGNÜGEN EIN PH-FREUNDLICHES GLEITMITTEL. DAS DAS IN TIME
„REIBUNGSLÖSER“ UND LUSTVOLLER MACHT.

Avant de commencer : Convient à un usage vaginal, anal et oral. De
Compatible avec les préservatifs en latex naturel et polyisoprène sculés
Utilisation : Ouvrez le bouchon et appuyez légèrement sur le flacon. S
sur le préservatif déjà mis en place.
pas un contraceptif. Ne contient pas
le contact avec
d'irritation. AM
ressentiez syst
enceinte ou q
de la portée d
polyuréthane.



3 059948 002536 >

Voor je aan
seks. Verlicht vagin
van natuurruiter en
Gebruik: Open het c
met een condoom ge
Waarschuwing: Ge
voorbereidingsmiddel
vertragen. Vermijd co
gebruik van dit glijmi
of vaginale droogte a
Buiten het bereik van
polyurethaan.

Bevor sie loslegen
vagineller Trockenhei
natürlicher Trockenhei
mit dem Öffnen aufbrau
auf die Tube. Wenn Ihr dieses Gel mit einem Kondom verwendet, dann trägt es einfach auf
Kondom auf. Achtung: Folgen Sie den Anwendungshinweisen. Dies ist kein Verhütung
kein Spermizid. Kann Spermien verlangsamen. Berührung mit den Augen, gereizter Haut o
vermeiden. Falls Reizungen auftreten, den Gebrauch des Gletgels **BEENDELEN**. Konsultieren
wenn die Reizung oder die vaginale Trockenheit länger anhält. Sie schwanger sind oder st
die Hände von Kindern gelangen. Nicht mit Kondomen aus Polyurethan verwenden.

Naturkautschukdixel und Polyisopren. Innerhalb von 6 Monaten nach dem Öffnen aufbrau
auf die Tube. Wenn Ihr dieses Gel mit einem Kondom verwendet, dann trägt es einfach auf
Kondom auf. Achtung: Folgen Sie den Anwendungshinweisen. Dies ist kein Verhütung
kein Spermizid. Kann Spermien verlangsamen. Berührung mit den Augen, gereizter Haut o
vermeiden. Falls Reizungen auftreten, den Gebrauch des Gletgels **BEENDELEN**. Konsultieren
wenn die Reizung oder die vaginale Trockenheit länger anhält. Sie schwanger sind oder st
die Hände von Kindern gelangen. Nicht mit Kondomen aus Polyurethan verwenden.

GEL
LUBRIFIANT
GLIJMIDDEL
GLEITGEL

PLAISIR ET
DOUCEUR
PLEZIER EN
EENVOUD
VERGNÜGEN UND
EINFACHHEIT

250ml e