


Gebruiksaanwijzing

Douchestoel

Relax

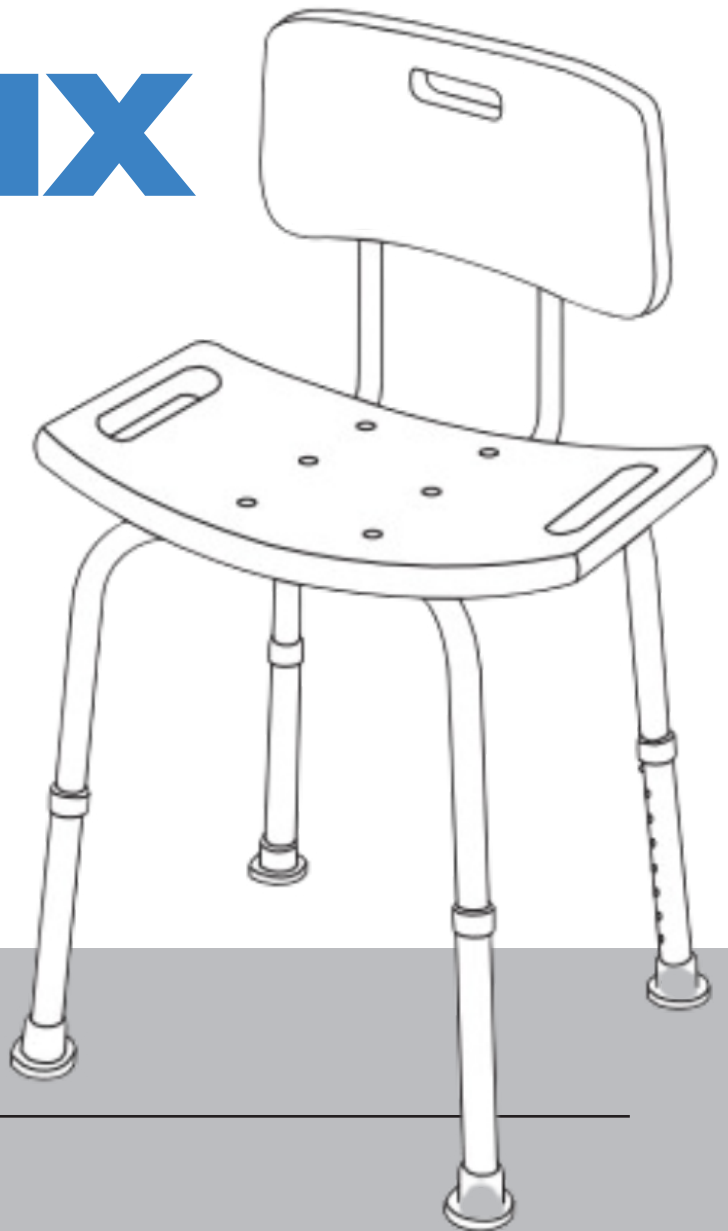

Gebruiksaanwijzing

Douchestoel Relax


Nederlands

Inhoudsopgave

2	Inhoudsopgave
3	Leveringsomvang
4	Algemene informatie
4	- Lees en bewaar
4	- Verklaring van symbolen
5	Veiligheid
5	- Beoogd gebruik
5	- Veiligheidsinstructies
7	De douchekruk monteren
8	Reiniging en onderhoud
9	Technische gegevens
9	Garantie
10	Verwijdering

Douch

Leveringsomvang

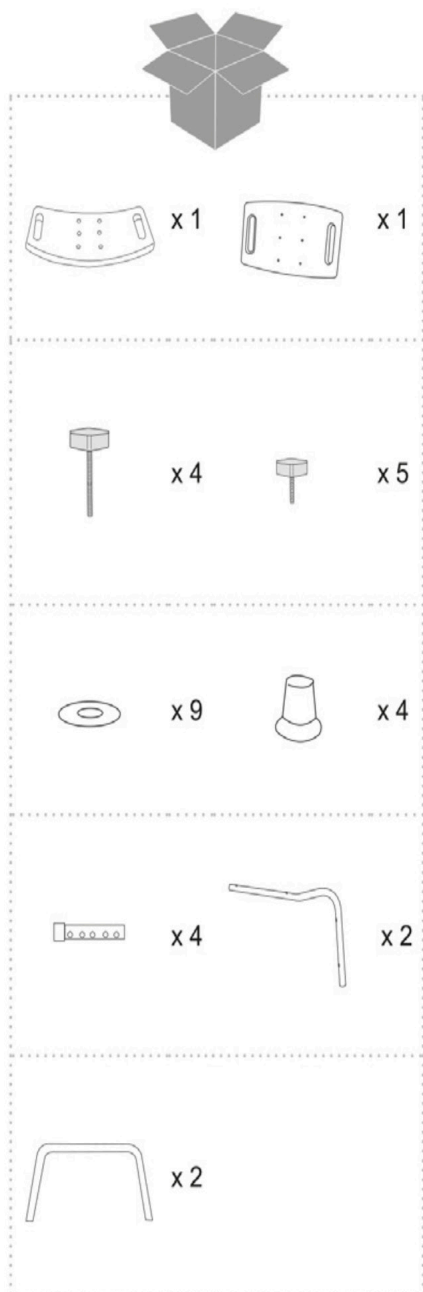

1 x Zitvlak

1 x Rugleuning

4 x Vleugelschroef lang

5 x Vleugelschroef kort

9 x Slutringen

4 x Rubberen voetjes

4x Voetstangen

2 x Rugleuning stangen

2 x Zitstangen

De douchestoel wordt geleverd in een kartonnen doos. Bewaar de kartonnen doos indien mogelijk, omdat deze later kan worden gebruikt voor opslag. Controleer na ontvangst direct of het product compleet en intact is.

estoeel

Algemene informatie

- Lees en bewaar



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de douchestoel Relax. Hij bevat belangrijke informatie over montage en gebruik. Lees de instructies zorgvuldig door, vooral de veiligheidsinstructies, voordat u de douchestoel gebruikt. Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel of schade aan de douchestoel tot gevolg hebben. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en voorschriften die gelden in de Europese Unie. Neem in het buitenland ook de landspecifieke richtlijnen en wetten in acht. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Geef je de douchestoel door aan derden, vergeet dan niet deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

- Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op de douchekruk of op de verpakking.



Waarschuwing!

Dit signaalsymbool/woord duidt op een gevaar met een middelhoog risico dat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als het gevaar niet wordt vermeden.



Voorzichtig!

Dit signaalsymbool/woord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau dat, als het niet vermeden wordt, kan leiden tot een lichte of matige verwonding.

Opmerking!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke schade aan eigendommen.

Relax

Beveiliging

- Beoogd gebruik

De douchestoel Relax is uitsluitend ontworpen als zitmogelijkheid tijdens het douchen. Hij is alleen bedoeld voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare douchebakken en mag alleen worden gebruikt voor douchebakken waarbij een veilige sta houding is gegarandeerd. De douchestoel is uitsluitend ontworpen voor een maximale belasting van 120 kg. Hij is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet geschikt voor commercieel gebruik. De douchestoel is geen kinderspeelgoed, geen medisch product en niet geschikt voor therapeutische doeleinden. Gebruik de douchestoel alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

- Veiligheidsinstructies



Verstikkingsgevaar!

Als kinderen met de verpakkingsfolie of kleine onderdelen spelen, kunnen ze erin verstrikt raken, de folie over hun hoofd doen of de kleine onderdelen inslikken en erin stikken. - Houd de verpakkingsfolie en kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.



Risico op letsel!

Verkeerd gebruik van de douchestoel kan leiden tot letsel.

- Ga nooit op de douchestoel staan.
- Gebruik de douchestoel alleen onder de douche en niet in bad of bij de wastafel.
- Zorg ervoor dat de douchestoel altijd op alle vier de poten staat.
- Houd er rekening mee dat er een risico op uitglijden bestaat bij het gaan zitten en opstaan in natte douchebakken, vooral als er bad additieven of wasmiddelen zijn gebruikt.

Opmerking!

Risico op beschadiging!

Verkeerd gebruik van de douchestoel kan schade aan de douchekruk veroorzaken.

- Gebruik de douchestoel niet als schroefverbindingen zijn losgekomen of als de metalen of kunststof onderdelen vervormingen, scheuren of andere beschadigingen vertonen.
- Verander niets aan de constructie van de douchekruk.
- Bevestig geen extra elementen aan de douchekruk.

Opmerking!

Risico op beschadiging!

Als je de verpakking opent met een scherp mes of andere puntige voorwerpen, kun je de douchestoel beschadigen.


- Wees voorzichtig bij het openen van de verpakking.
1. Haal de douchestoel uit de verpakking en verwijder het verpakkingsmateriaal.
 2. Controleer of de levering compleet is (zie leveringsomvang).
 3. Controleer of er schade is aan de douchestoel. Controleer of er schade is aan de douchekruk. Als dit het geval is, gebruik de douchestoel dan niet. Neem contact op met de fabrikant.

Douch


De douchestoel Relax monteren

1. Steek de rubberen voetjes in de voetstangen (Afb. 1)
2. Steek de voetstangen in de zitstang
3. Houd de drukknop ingedrukt en trek de voetstang uit tot de gewenste lengte.
4. Zorg ervoor dat de drukknop op de voetstangen in een van de gaten grijpt en dat alle stangen dezelfde hoogte hebben.
5. Schroef de voetstangen en de zitting aan elkaar met de vleugelschroeven en sluitringen (afb. 2).
6. Plaats de rugleuning stangen op de stangen van de zitting zodat de gaten over elkaar liggen.
7. Schroef de stangen van de rugleuning vast met de vleugelschroeven en sluitringen.
8. Plaats de rugleuning op de rugleuningstangen zodat de gaten op elkaar liggen.
9. Schroef de rugleuning aan de rugleuningstangen met de vleugelschroeven en sluitringen (afb. 3).
10. Lijn de rubberen voetjes uit zodat de douchestoel Relax stevig staat.
11. De douchestoel is klaar voor gebruik.


01

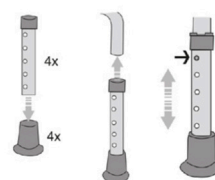

02

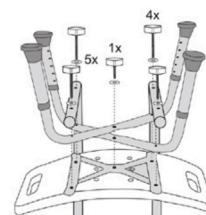

03

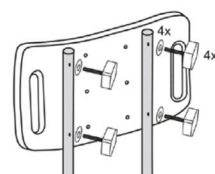

estoele

Reiniging en onderhoud

Opmerking!

Risico op beschadiging!

Onjuiste reiniging van de douchestoel kan schade aan het oppervlak veroorzaken.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Droog de douchekruk na gebruik en reiniging met een zachte droge doek.

1. Droog de douchestoel na gebruik en reiniging af met een zachte droge doek.
2. Controleer regelmatig of alle schroeven en verbindingen goed vastzitten en draai ze indien nodig vaster aan.



Relax

Technische gegevens

Model	Relax
Artikelnummer	RL-A62016E
Gewicht	Circa 2,7 kg
Gebruikersgewicht	Tot 120 kg
Hoogteverstelling	38 tot 56 cm
Afmeting zitten (B x D)	50 x 30 cm
Materialen	Kunststof (HDPE), Aluminium
Afmetingen (L x B x H)	47 x 50 x 56 cm

Garantie

Op de douchestoel Relax wordt 24 maanden garantie verleend vanaf de aankoopdatum.

Slijtageonderdelen worden tijdens de garantietermijn niet gedekt, tenzij aangetoond kan worden dat de schade op de slijtageonderdelen een gevolg is van fabricage- of materiaalfout.

Uitsluiting van garantie

- Rubberen voetjes
- Drukknop voor de hoogte verstelling

Verwijdering



Gooi de verpakking weg volgens het type. Doe karton en karton bij het oud papier en karton bij het recyclebare afval.

De douchekruk weggooien

Gooi de douchestoel weg volgens de voorschriften en wetten die in uw land van kracht zijn.

Gebruiksaanwijzing

Douchestoel Relax

Nederlands