

dimeXX Leg Protector

Shower with confidence
Sicherer Schutz beim Duschen
Prévoyez votre douche sans craintes
Dúchese sin temor
Sikker brusebad
Douchen met vertrouwen

GB Non sterile One size Shower/bath protection. Single use.
D Nicht steril Eine Universalgröße Durch-/Badeschutz. Einmalbenutzung
F Non stérile Une taille Protection pour la douche/bain. Utilisation unique
E Não esteril Uma talla Protecção para duche/banho. De um só uso
DK Ikke steril En størrelse Beskyndelse til brusebad/bad. En gang brug
FI Ei steril Yksi koko Suojakalvo kylpyhuoneeseen. Käyttökäyttö

Content 25 leg protectors
Inhalt 25 Beinabdeckungen
Contenu 25 protections pour la jambe (unilatéral)
Contenido 25 protectores (unilaterales)
Inhoud 25 beenoverdekking
Inhoud 25 voetkalfjes



Apply Leg Protector
Leggen toe aan Leg Protector
Placer le Leg Protector autour bassin
Colocar el Leg Protector sobre cadera
Leg Leg Protector på
Leg Protector aansluiten



Position feet strap
Positionner les deux autres bandes
Placer la protection simple
Colocar la protección sencilla
Set foot strap on
Een voetkalfje plaatsen



Fold back leg protector over strap
Replier le Leg Protector sur bande
Placer le Leg Protector sur
bande et maintenir de la Leg Protector sur
la simple
Dobroć odložit del Leg Protectora preko pojasa
du na kalfje
Fold Leg Protector tilbage over strap
De Rand van de Leg Protector over de kalfje
strip plaatsen



Position second strap
Positionner les deux autres bandes
Placer la protection simple
Colocar la protección sencilla
Set second strap on
Tweede strap plaatsen



Caution: polyethylene can cause suffocation.
Keep out of reach of children. Store safely, use as
instructed and dispose after use.

Achtung: Polyethylen kann zu Ersticken führen.
Vor Kindern fern halten. Sicher aufbewahren, laut
Anweisung benutzen und nach dem Gebrauch
entsorgen.

Attention: Le polyéthylène peut provoquer une
asphyxie. Éloigner des enfants. Stocker en toute
sécurité, utiliser selon les instructions
et jeter après utilisation.

Advertencia de asfixia: El polietileno puede causar
ahogamiento. Manténgalo fuera del alcance de los niños
Guárdelo en lugar seguro, utilice conforme a las
instrucciones y deséchelo del ambiente tras su uso.

CE: Free for kneeling! (Oplossing uitgangspunt
for knee. (Oplossing at knæ).) (vermeld) (bevat) (af
vrijstelling bij knielen) (Oplossing uitgangspunt
for knee. (Oplossing at knæ).) (vermeld) (bevat) (af
vrijstelling bij knielen)

Let eye polyethylene can smothering suffocation.
Buiten bereik van kinderen bewaren. Veilig gebruiken
en in overeenstemming met de instructies gebruiken,
na gebruik wegwerpen.

Made in EU, by
DimeXX Limited
Sandringham Road
30700 Gloucestershire
UK. +44 (0)1453 44 24 04
info@dimexx.com

CE

Col. No 260846

