

Nederlands

Hartelijk dank dat u voor TORBOT Skin Tac™ zelfklevende doekjes hebt gekozen!

De Skin Tac™ zelfklevende doekjes versterken en hernieuwen de kleefkracht van alle pleisters en barrières. Deze unieke formule is anti-allergisch en bevat geen latex! De handige, gemakkelijk te gebruiken doekjes zijn ideaal voor op reis en vormen een uitstekende barrière tussen uw huid en de pleister.

Gedetailleerde lijst met mogelijke toepassingen:

Infuussets voor insulinepompjes

Tracheotomiehulpmiddelen

Stomahulpmiddelen

Prothesen

Steunkousen

Alle pleisters en verbanden

Elektroden

Geneeskundige pleisters

Gebruiksaanwijzing: Breng Skin Tac™ zelfklevende doekjes aan op een schone, droge huid. Aan de lucht laten drogen. De huid wordt kleverig. Hulpmiddel en/of pleister aanbrengen. Verwijderen met TacAway™ hechtmiddelremoverdoekjes of ontsmettingsalcohol. Bij irritatie gebruik onmiddellijk stopzetten.

UITSLUITEND VOOR UITWENDIG GEBRUIK

Fabrikant: Torbot Group, Inc., 1367 Elmwood Ave.,

Cranston, RI 02910, USA

EU: MG Healthcare, Unit 24, Grimsby Business Centre,

King Edward St., Grimsby, DN313 JH United Kingdom