

# Roege International

## Gebruikershandleiding

### Rubber drempelhulpen zwart met schuine zijvlakken

#### Belangrijk!

Lees voordat u de drempelhulp gebruikt aandachtig de gebruikershandleiding. Let goed op alle instructies, vooral op deze betreffende de veiligheid, en volg ze altijd op.

De rubber drempelhulp wordt geleverd met of zonder lijmlaag. De lijlaag is geschikt voor een oppervlakte van tegels, houten vloeren, linoleum. Zorg voor het gebruik van de lijmlaag dat de drempelhulp en de vloer goed wordt ontvet.

Andere vloeren moeten op een andere manier worden gemonteerd. In natte ruimtes kan siliconenkit worden gebruikt. De drempelhulp kan in de breedte worden aangepast door deze in te snijden met een stanleymes of een zaag. Op deze manier kunnen er ook hoekjes uitgezaagd worden zodat de drempelhulp perfect aansluit.



#### Veiligheidsinstructies

- Controleer regelmatig of de drempelhulp nog goed vastzit.

Maximale belasting: 1500kg

#### Reinigen

De drempelhulp gereinigd worden met standaard schoonmaakmiddelen.

#### Garantie

De fabrikant geeft u een garantie van 1 jaar. Deze garantie vervalt bij schade door onjuist gebruik van het product. Als u schade constateert neemt u dan meteen contact op met Roege International. De garantie dekt geen ongelukken of andere schade eventueel gerelateerd aan het niet functioneren van het product

#### Roege International

Postadres:

Postbus 581

9400 AN Assen

#### Bezoekadres:

Weverstraat 12, 9403VJ Assen

Telefoon: 0592-344716/ 0031592-344716

Fax 0592-344106/ 0031592-344106

Mail: [info@roegeint.com](mailto:info@roegeint.com)

Website [www.roegeint.com](http://www.roegeint.com)