

AUDIDROPS OORDRUPPELS - Bijsluiter

Lees de gehele bijsluiter zorgvuldig door voordat u Audidrops oordruppels gaat gebruiken, en behoud de bijsluiter als referentie.

Audidrops Oordruppels – Behandelt en voorkomt oorbellen

- Behandelt en voorkomt infecties aan de gehoorgang (otitis externa). O.a. veroorzaakt door: zwemmen/wattenstaafjes/mechanische irritatie/gehoorapparaat/oordopjes
- Vermindert gevoeligheid, verzacht jeuk
- Gaat overtollig oorsmeer tegen

Hoe werkt Audidrops

Audidrops Oordruppels vormt een bio-actieve laag over de gevoelige huid in de gehoorgang. Audidrops is gebaseerd op het gepatenteerde 2QR-complex. Dit bio-actieve ingrediënt wordt gewonnen uit planten. Het 2QR-complex blokkeert de hechting van schadelijk bacteriën aan de huid en neutraliseert op deze wijze de schadelijke bacteriën.

Dit unieke effect is volledig veilig en onschadelijk omdat het niet gebaseerd is op giftige of chemische stoffen. Hierdoor heeft het geen negatieve bijeffecten.

Indicaties

1. Otitis externa, ook wel zwemmersoor of externe gehoorganginfectie genoemd. (Na zwemmen/na gebruik oordopjes/gehoorapparaat)
2. Overtollig oorsmeer

Audidrops Oordruppels is geregistreerd als een Medisch Hulpmiddel Klasse I.

Gebruiksaanwijzing

Audidrops Oordruppels wordt lokaal in de externe gehoorgang aangebracht.

Voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder:
Brenge 2-3 maal daags 2-5 druppels in het oor, gedurende 5 achtereenvolgende dagen.

Voor kinderen van 3 tot 12 jaar:
Brenge 2-3 maal daags 1-3 druppels in het oor, gedurende 5 achtereenvolgende dagen.

Bij kinderen van 0 tot 3 jaar:
Alleen gebruiken na overleg met uw huisarts.



Aanwijzingen voor het toedienen:

Houd het flesje enkele minuten in de hand zodat de druppels de lichaamstemperatuur benaderen.

Houd uw hoofd naar één kant. Brenge de druppels in het oor. Het kan helpen om aan de oorlel te trekken om zo het oorkanaal maximaal te openen. Houd uw hoofd enkele minuten op deze kant zodat de oplossing door het gehele oorkanaal kan lopen. Herhaal, indien noodzakelijk, bij het andere oor. U dient uw huisarts te raadplegen als de klachten verergeren of niet verbeteren na 5 dagen gebruik.

Bij blijvende of terugkerende klachten dient u altijd uw huisarts te raadplegen.

De oordruppels moeten niet langer dan 30 opeenvolgende dagen gebruikt worden.

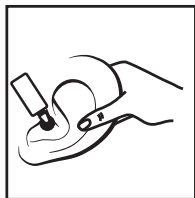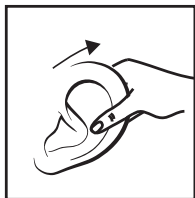

Ingrediënten

2QR-complex*, laagjes vormend middel, Osmo-regulator, verzachtend middel.

* 2QR-complex. Gepatenteerd bio-actieve polysaccharides, www.2QR.com



Een allergie voor de ingrediënten van Audidrops Oordruppels zijn zeer zeldzaam. Bij twijfel kunt u een paar druppels op uw onderarm aanbrengen. Bij het verschijnen van een jeukende rode plek adviseren wij u Audidrops Oordruppels niet te gebruiken.

Waarschuwingen

- Om besmetting te voorkomen, mag een flesje Audidrops slechts door 1 persoon gebruikt worden.
- Vermijd contact tussen het oor en de applicator om herbesmetting te voorkomen.

Contra-indicaties

Gebruik Audidrops Oordruppels niet in geval van:

- Een geperforeerd trommelvlies
- Middenoorontsteking

Voor het gebruik van de Audidrops oordruppels is het noodzakelijk te controleren of het trommelvlies intact is. Als het trommelvlies geperforeerd is, is er kans dat de druppels in contact komen met het middenoor. Dit product is niet getest in het middenoor.

Medicatiegebruik

Er zijn geen reacties bekend met andere medicatie. Maar het gebruik van andere oordruppels tegelijkertijd wordt afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor gebruik gedurende de zwangerschap en of bij borstvoeding.

Opslag & verpakking

Bewaar Audidrops Oordruppels in de originele verpakking bij een temperatuur van 10°C-25°C. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op het label op het flesje en op de onderkant van het doosje.

Achtergrond informatie infectie aan de gehoorgang (Otitis Externa)

De gehoorgang

Het oor bestaat uit drie delen:

1. het externe oor
2. het middenoor
3. binnenoor

De gehoorgang is onderdeel van het externe oor welke toegang geeft tot het trommelvlies.

Otitis externa is een infectie van de huid van de gehoorgang en komt zeer veel voor. Over het algemeen wordt het veroorzaakt door een bacteriële infectie. Soms kan het veroorzaakt worden door een schimmel-, gist- of virale infectie. Deze krijgen de kans als de beschermende laag oorsmeer aangetast is.

Sommige mensen zijn meer vatbaar voor Otitis externa.

Water, shampoo, zeep, haarspray etc. in het oor kunnen jeuk veroorzaken, doordat deze stoffen de laag oorsmeer kunnen aantasten.

Krabben of voelen kan de huid in de gehoorgang beschadigen en een ontsteking veroorzaken. De ontstokene huid kan dan snel geïnfecteerd raken. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel. De ontsteking en infectie zorgen voor meer jeuk, dit leidt tot meer krabben, hetgeen de klachten verergerd.

Andere mogelijke oorzaken van Otitis Externa kunnen zijn:

Zwemmen: het zwemwater kan de beschermende laag oorsmeer aantasten waardoor infecties makkelijk ontstaan. Omdat dit relatief veel voorkomt bij zwemmers wordt Otitis externa ook wel "Zwemmersoor" genoemd.

Weer: otitis externa ontwikkelt zich sneller bij warme, vochtigheid, en "zweeterig" weer. Het komt meer voor in warme landen.

Huid problemen: eczeem of psoriasis kan de gehoorgang aantasten en Otitis externa veroorzaken.

Middenoorontstekingen: soms kunnen middenoorontstekingen (Otitis media) afscheiding produceren; dit kan Otitis externa veroorzaken.

Symptomen van Otitis externa:

De symptomen van Otitis Externa kunnen variëren. Veel voorkomende symptomen zijn onder meer jeuk, afscheiding, tijdelijk verminderd gehoor en pijn. Het oor kan verstoppt of vol aanvoelen. Een of beide oren kunnen aangetast zijn.

Distributeur Audidrops
OTC Medical
www.otc-medical.nl

 BioClin BV
Delftechpark 55
2628 XJ, Delft, The Netherlands