

PHYSIOMER[®]

Eucalyptus

WANNEER PHYSIOMER[®] Eucalyptus GEBRUIKEN?

Bij een verstopte neus door verkoudheid of neusbijholteontsteking (rhinosinusitis).

Spray 1 seconde per neusholte, 2 tot 3 keer per dag.

GEBRUIKSWIJZE

Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen voor gebruik bij kinderen. Voor gebruik: controleer of de verstuiver goed werkt.

1. Draai het hoofd opzij, breng de verstuiver in het bovenste neusgat en druk de verstuiver eenmaal stevig in gedurende 1 seconde.
2. Laat enkele seconden inwerken.
3. Draai het hoofd naar de andere kant en herhaal in het andere neusgat.
4. Snuit de neus.
5. Was de verstuiver na elk gebruik met warm water en droog het daarna goed af.



Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

Bewaar in de originele verpakking.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking vermeld staat. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap, borstvoeding, in geval van astma of in geval van allergie voor één van de ingrediënten. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.



CE 0459
Medisch hulpmiddel