

Gebruiksaanwijzing Solid homecare zitring

Controleer uw product op zichtbare schade voordat u het gebruikt/ installeert. Als u schade ziet of een defect vermoedt, gebruik het dan niet maar neem contact op met uw leverancier.

BEOOGD GEBRUIK

Het opblaasbare drukontlastende ringkussen van solid homecare vermindert de druk tijdens het zitten. Het helpt het gewicht gelijkmatig te verdelen en maakt het makkelijker voor de gebruiker om de juiste zitpositie te behouden.

houding te behouden.

Blaas het kussen op met de mond of met een pomp (zoals een handpomp voor luchtbedden of iets dergelijks).

NB. Voorkom dat scherpe voorwerpen zoals ritssluitingen en sleutels in contact komen met het kussen.

Dit kan de hoes of het opblaasbare binnenwerk beschadigen.

NB. Gebruik nooit een compressor om het kussen op te blazen.

NB. Als u dit artikel met de mond opblaast, moet u mogelijk op de basis van het ventiel bijten terwijl u blaast om het ventiel te openen.

terwijl u blaast om de luchtweg te openen.

SCHOONMAKEN

Reinig uw opblaasbare kussen met een mild schoonmaakmiddel en een licht vochtige, zachte doek. Gebruik alleen

een mild reinigingsmiddel of ontsmettingsmiddel; gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel. Veeg het opblaasbare kussen na het reinigen

Opblaasbaar Kussen na het reinigen af met een droge doek en laat het op een warme, droge plaats liggen, maar niet in direct contact met een warmtebron.