

Gedistribueerd door:



Geproduceerd door:



**TensCare Ltd**

9 Blenheim Road,  
Epsom,  
Surrey, KT19 9BE,  
UK  
Tel: +44(0) 1372  
723434



**Advena Ltd**

Tower Business  
Centre,  
2nd Flr, Tower  
Street,  
Swatar, BKR 4013,  
Malta



**TensCare Europe BV**

Juliana van  
Stolbergstraat 52,  
1723LD  
Noord-Scharwoude,  
Netherlands




I-CM50100-NL Rev 1.0 05/23



 **Electrodes**  
50x100 mm

4 Herbruikbare elektrodenpads

**REF** E-CM50100

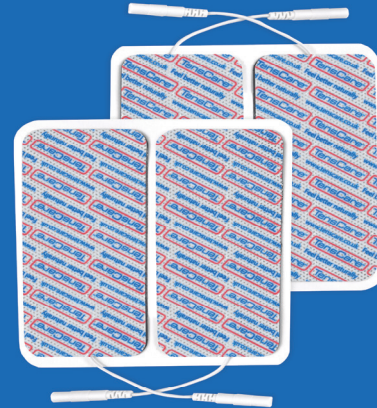

Instructies voor gebruik  
Aandachtig lezen voor gebruik



## Gebruiksaanwijzing

Voor het gewenste succes van elke stimulatie (TENS/EMS) is het belangrijk dat de elektrodenpads verstandig worden geplaatst. Laat 5-15 cm ruimte tussen de 2 elektrodenpads op een kanaal.



**Opmerking:** De elektrodenpads moeten altijd in paren worden gebruikt (twee elektroden op elk kanaal), zodat het signaal in een circuit kan stromen.

1. Zorg ervoor dat uw huid voor gebruik schoon en droog is.



**Plaats geen elektrodenpads** op huid die niet volledig gevoel heeft of op een beschadigde huid.

2. Duw de pinuiteinden van de geleidingsdraden stevig in de pigtailuiteinden van de elektrodenpads.
3. Trek de elektrodenpads van hun beschermende voering door aan een hoek van de pad te trekken.



**Trek niet** niet aan de pigtail van de draad.

**Controleer altijd** of de unit uitstaat voordat u de elektrodenpads plaatst of verwijderd.

4. Breng de kleefzijde van de elektrodenpad aan rond het pijngebied\* en druk stevig aan op de huid. Zie de plaatsingsgids.
5. Verwijder de elektrodenpad van uw huid door de aan de pad zelf te trekken.
6. Plaats na gebruik de elektrodenpads altijd terug op de plastic voering en in de hersluitbare zak.

## Advies

- De elektrodenpads zijn herbruikbaar, maar voor gebruik bij één persoon.
- De elektrodenpads zijn latexvrij.
- Om de beste geleiding door de elektrodenpads te verkrijgen, moet u ervoor zorgen dat ze goed zijn aangebracht.
- Vervang de elektrodenpads als ze uitdrogen en hun kleverigheid verliezen.
- In warm weer kan de gel van elektrodenpads zacht worden.

## Houdbaarheid

- Elektrodenpads moeten 12 tot 20 keer meegaan, afhankelijk van de huidconditie en vochtigheid.
- Houdbaarheid van een ongeopende verpakking elektrodenpads is 2 jaar. Dit kan worden beïnvloed door zeer hoge temperaturen of zeer lage luchtvochtigheid.

## Waarschuwingen

- Negeer geen allergische reactie op de elektrodenpads: als er huidirritatie optreedt, stop dan met het gebruik van het apparaat, aangezien een klein aantal gebruikers een negatieve reactie op de gel kunnen hebben.
- Alleen voor gebruik met zenuwstimulatoren die zijn goedgekeurd volgens EN 60601-1 en EN60601-2-10.
- De elektrodenpads zijn herbruikbaar, maar voor gebruik bij één patiënt. De lijm is een afpelbare hydrogel op waterbasis.

**Belangrijk:** Neem alle contra-indicaties, waarschuwingen en waarschuwingen in acht die zijn meegeleverd met het apparaat dat u met deze elektrodenpads gebruikt.