



30 MINUTEN voorafgaande aan de afname niet eten, drinken, roken of kauwgom kauwen.

stap 1

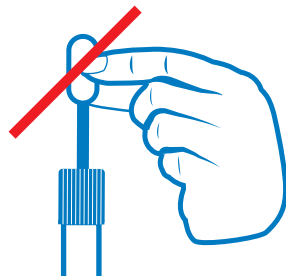


Open de verpakking. Neem de gehele swab uit de verpakking, zonder het uiteinde met de watten aan te raken.

stap 2

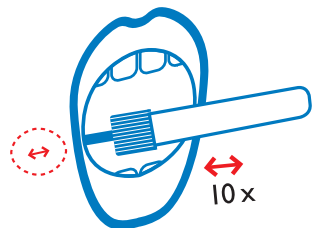


Wrijf achterin de mond 10 maal met het wattenstaafje over het onderste tandvlees. Laat de swab hierbij de tanden zo min mogelijk aanraken.

stap 3

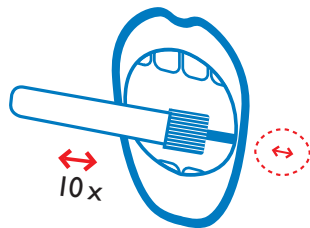


Herhaal de handeling nogmaals 10 maal aan de andere kant van de mond langs het onderste tandvlees.

stap 4

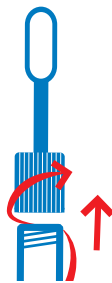


Houd het buisje rechtop zodat u de vloeistof niet morst. Schroef de dop van het testbuisje zonder het wattenstaafje aan te raken.

stap 5

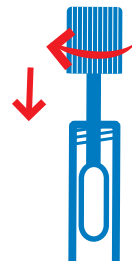

Draai de dop om en steek het wattenstaafje in het buisje. Sluit de dop goed!


stap 6

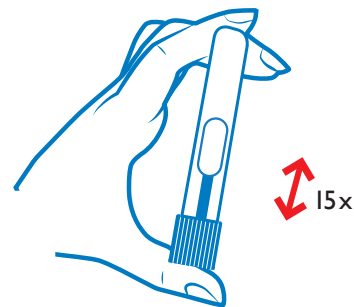

Draai het afgesloten buisje om en schud het 15 maal stevig.


stap 7

VERZENDING:

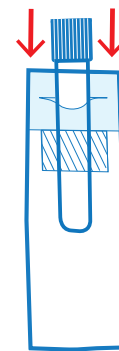

Doe het buisje in het kleine zakje.


stap 8

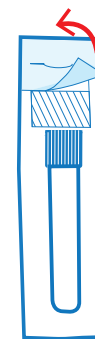

Sluit het zakje goed af zodat bij eventuele beschadiging van het buisje er geen vloeistof kan ontsnappen.

stap 9

stap 10

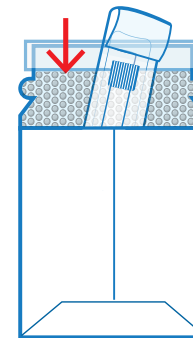

Op zonnige dagen met hoge temperaturen de envelop liever afgeven bij een postkantoor òf net voor de postbode in een brievenbus doen.

Stop het geheel in de verzendenvolp en sluit deze goed af. Controleer of er een retouradres op de envelop staat en stuur de envelop terug naar ons.

HANDLEIDING DNA AFNAME

DNA TESTKIT