

Monteren toiletstoel



1. Indien de toiletzitting aan koude omstandigheden is blootgesteld, dient u deze eerst op kamertemperatuur te laten komen alvorens met de montage te beginnen. Dit voorkomt dat de zittingklemmen barsten tijdens de assemblage op de kruissteun van de toiletstoel.
2. Plaats de rugsteun in het frame.
3. Om de arMLEuning te laten zakken, dient u de ontgrendelingsknop op de arMLEuning in te drukken en deze voorzichtig te laten zakken tot de armstop is bereikt.
4. Positioneer de klemmen van de toiletzitting op de achterste frameregel (beide klemmen dienen zich buiten de emmerbeugels te bevinden). Druk vervolgens naar beneden op de zitting totdat de klemmen stevig op hun plaats klikken.
5. Om de zitting te verwijderen, dient u de achterkant van de zitting vast te pakken en deze op te tillen.
6. Installeer de emmer van de toiletstoel door deze in het emmerframe te plaatsen. Volg de omgekeerde stappen om de emmer te verwijderen.

Aanvullende voorzorgsmaatregel

1. De toiletzitting dient te allen tijde in neergeklapte toestand te zijn vóór gebruik. Indien dit niet gebeurt, kan dit leiden tot beschadiging van de toiletstoel en mogelijk letsel.
2. Gelieve de toiletstoel niet te installeren zonder eerst de montage- en instructiehandleiding grondig door te nemen en te begrijpen. Indien u deze instructies niet kunt begrijpen, dient u contact op te nemen met een zorgprofessional, dealer of technisch expert alvorens te trachten de installatie uit te voeren. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of schade.
3. Controleer alle onderdelen op eventuele transportschade alvorens met de montage te beginnen. Indien er sprake is van schade tijdens het transport, mag u het product niet gebruiken. Neem in dat geval contact op met de dealer of vervoerder voor verdere instructies.
4. Zorg ervoor dat alle schroeven, moeren en/of bouten stevig zijn aangedraaid.
5. Gebruikers met beperkte fysieke kracht