



Gebruiksaanwijzing

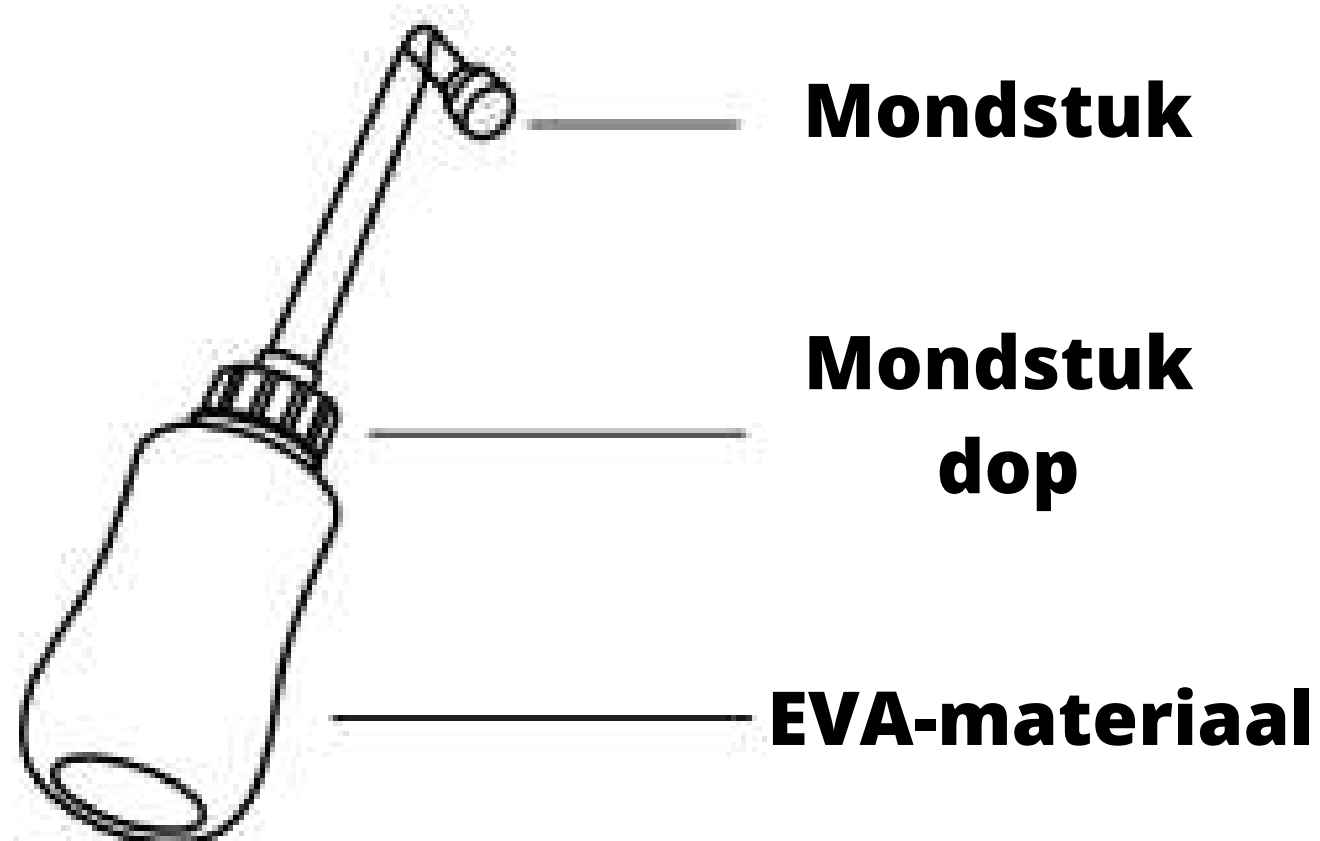

- Vul de draagbare bidet met koud of warm water en schroef de dop stevig vast. Wees voorzichtig bij het gebruik van heet water.



- Draai de dop op de fles en houdt de fles ondersteboven. Knijp ontspannen in de fles en de waterspray zal zijn werk doen.

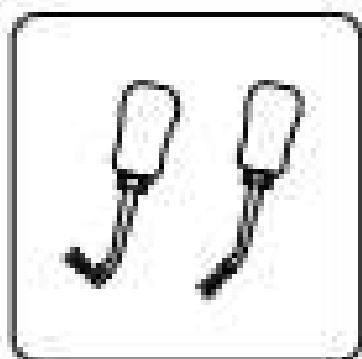


- Wanneer u de fles op de juiste plaats heeft gebracht, laat u uw hand los en laat u de bidet het beoogde gebied schoonmaken.



- Water zal rustig naar buiten spuiten. Pas de greep aan voor meer druk in de waterstroom.



- Oefen met het plaatsen van de fles onder verschillende hoeken, zowel voor als achter, om de beste hoek voor het gewenste gebruik te vinden.

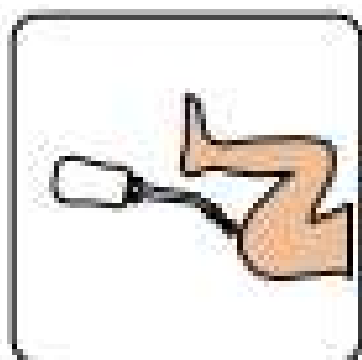

Made in China

Geschikt gebruik

Productfunctie:

Geschikt voor het reinigen van de anus, vrouwelijke vulva en menstratieverpleging na het dagelijkse toilet; Zwangere vrouwen om hun geslachtsdelen schoon te maken na gebruik van het toilet en om hun wonden te reinigen na bevalling en operatie; Het schoonmaken van aambeien na gebruik te maken van het toilet kan aambeien effectief bestrijden; Zorgt voor het effectief verminderen en de groei van anale bacteriën in de vulva en infectie; Bespaart papier.

Toepasselijke omgeving:

De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 70°C .

Let op:

De watertemperatuur wordt aanbevolen om te worden gespoeld op ongeveer 38°C. Een te hoge temperatuur kan u zelf verbranden of de fles vervormen.

Suggestie:

Desinfecteer één of twee keer per week; Vervang de spoeler elke 3 tot 6 maanden.

Attentie:

1. Dit product is alleen voor uitwendig gebruik en kan niet diep in de vagina en anus worden gereinigd.
2. Veeg niet af na gebruik en veeg niet af bij aambeien.
3. Dit product is alleen voor persoonlijk gebruik. Deel het niet met andere mensen om kruisbesmetting te voorkomen.
4. Kinderen onder de 12 jaar dienen het product te gebruiken onder begeleiding van volwassenen.