

Instellen van de GO COMFORT PRO

1



Houd de bovenste helft (UPPER) van de snurkbeugel in je handpalm, de onderkaak (LOWER) zit nu boven. Creëer een "P" vorm.

2



Druk nu met je duim en wijsvinger op de PUSH logo's aan weerszijden van de beugel (LOWER).

3



Beweeg de onderkaak nu met stapjes van 1 mm naar voren.

INSTRUCTIES

- 1 Vul een glas of kom met heet water (80 graden).
- 2 Stel de snurkbeugel af op de gewenste stand (Zie: GO COMFORT PRO instellen).
- 3 Leg de snurkbeugel 30 seconden in de kom.
- 4 Haal de snurkbeugel uit het water met een lepel. Raak de het zachte gedeelte niet aan met je vingers.
- 5 Plaats de beugel op de juiste manier in je mond.
- 6 Bijt nu je tanden in de snurkbeugel zodat er een afdruk wordt achtergelaten.
- 7 Verwijder de beugel na 20 seconden en koel het af in koud water.
- 8 De GO COMFORT PRO 2.0 snurkbeugel is nu klaar voor gebruik.
- 9 Indien de snurkbeugel nog niet de gewenste vorm heeft, herhaal dan de stappen 3 t/m 8.

Waarom de GO COMFORT PRO 2.0? _____

- 1 Zelfvormende flex-gel voor comfortabele pasvorm
- 2 Verbeterde ademhaling
- 3 Op maat instelbaar
- 4 Afleessysteem



GARANTIEVOORWAARDEN _____

- ◆ Spoel de snurkbeugel na ieder gebruik schoon met kamertemperatuurwater.
- ◆ Bewaar de gebruikte beugel in het witte GO Comfort bewaardoosje.
- ◆ Leg de beugel niet in de zon of op een stoge plek.
- ◆ Bewaar de beugel niet bij temperaturen boven de 38 graden
- ◆ Houd de beugel buiten het bereik van kinderen in verband met kleine onderdelen.
- ◆ Deel de snurkbeugel niet met anderen.
- ◆ Gebruik de snurkbeugel niet in combinatie met gebitsprothesen of epileptische symptomen.

Let erop dat u de eerste nachten last kan hebben van zere kaken en/of extra speekselproductie. Na verloop van tijd zullen deze bijwerkingen over het algemeen afnemen.

Indien u na aankoop toch besluit geen gebruik te maken van de GO COMFORT PRO 2.0, dan kunt u de snurkbeugel (mits nog in het plastic) met complete verpakking en inhoud terugsturen via bol.com.

