



testjezelf.nu®

# Zwangerschapstest

- ✦ SNEL EN BETROUWBAAR RESULTAAT
- ✦ ZEER NAUWKEURIG
- ✦ CASSETTE TEST

Eerder zekerheid!



## Cassette Zwangerschapstest voor het aantonen van het hCG hormoon in urine

### Inleiding

Deze Testjezelf.nu Cassette Zwangerschapstest is een immunologische sneltest voor het aantonen van hCG (human Chorion Gonadotrofine) in urine ten behoeve van een vroegtijdige herkenning van een zwangerschap. Door de hoge gevoeligheid van 20 mIU/ml is deze Testjezelf.nu Cassette Zwangerschapstest in staat om al in een vroeg stadium (4 dagen voor de volgende menstruatie) zwangerschap betrouwbaar vast te stellen.

### Inhoud van de verpakking:

De Testjezelf.nu Cassette Zwangerschapstest bevat een teststrook, een pipet voor eenmalig gebruik en deze bijsluiter. Het buidelkje met droogmiddel in de verpakking mag bij het huishoudelijk afval.


### Extra benodigd (niet meegeleverd):

Schoon potje om de urine op te vangen en een horloge of stopwatch.

## Uitvoeren van de test

Vang de urine op in een schoon potje. Het valt aan te bevelen om ochtendurine te gebruiken aangezien de concentratie van hCG dan het hoogst is. Indien gewenst kunt u echter ook op een ander tijdstip testen aangezien de test gevoelig is. Haal de Cassette pas uit de folie vlak voor het moment van testen om condensatie op de testopening te voorkomen.

1. Neem de test uit de verpakking en leg deze op een schone vlakke ondergrond.
2. Neem met de pipet urine op waarbij de pipet loodrecht wordt gehouden en voeg 120 µl (zie markering of 3 druppels) zonder luchtbellen in de ronde testopening (zie tekening hieronder).
3. Lees het resultaat na 2 minuten af. Wacht in ieder geval niet langer dan 5 minuten met het aflezen.

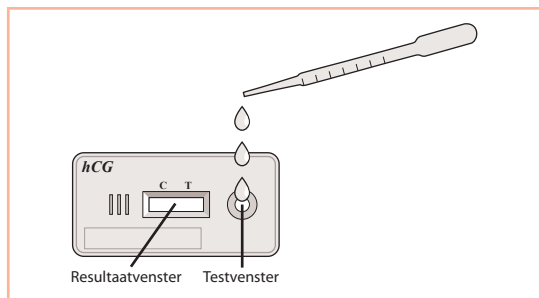

## Testresultaat


### Niet zwanger (negatief)

Alleen de roze controlelijn (C) is zichtbaar. Geen verkleuring in het testgebied (T).




### Zwanger (positief)

Naast de roze controlelijn (C) verschijnt een minder sterke of even sterke roze testlijn (T)

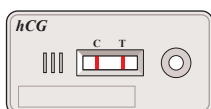

### Ongeldig

Is er geen roze controlelijn zichtbaar (C) dan een nieuwe Cassette nemen en de test herhalen.

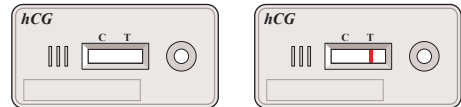

Ook als de testlijn minder sterk is dan de controlelijn is de test positief.

**Een positieve uitslag** duidt aan dat u mogelijk zwanger bent. Neem contact op met uw huisarts en bespreek deze uitslag.

**Bij een negatieve uitslag** dient u na een week en bij het uitblijven van uw menstruatie, opnieuw met een Testjezelf.nu Cassette zwangerschapstest te testen. Is deze uitslag ook negatief, neem dan contact op met uw huisarts.

## Vragen en antwoorden

### Wordt het resultaat beïnvloed door Alcohol, Koffie of bepaalde etenswaren?

Nee

### Waarom moet ik ochtendurine gebruiken als ik voor mijn volgende menstruatie wil testen?

Ochtendurine bevat door een langer verblijf in de blaas een hogere concentratie hCG. Dit is van belang om al op deze dag een betrouwbaar resultaat te verkrijgen.

### Betekend een lichte verkleuring bij de testlijn ook dat ik eventueel zwanger ben?

Ja, zelf een lichte verkleuring van de testlijn geeft een mogelijke zwangerschap aan.

### Wanneer weet ik of de test goed is uitgevoerd?

Als de roze controlelijn zichtbaar is, is de test goed uitgevoerd. LET OP: bij gebruik van medicijnen die hCG bevatten kan er een vals positieve uitslag worden waargenomen.

## Belangrijke aanwijzingen

- De test niet gebruiken na de aangegeven houdbaarheidsdatum (deze staat aangegeven op het doosje van de test).
- De test niet blootstellen aan temperatuurschommelingen en bewaren bij kamertemperatuur. De test zelf dient eveneens uitgevoerd te worden bij kamertemperatuur.
- Verpakking pas openen direct voor gebruik.
- Als de test eenmaal wordt uitgevoerd, geen extra urine toevoegen.
- De test is geschikt voor eenmalig gebruik.
- Deze bijsluiter voor het uitvoeren van de test zorgvuldig doornemen.
- Deze test is geen vervanging van een bezoek aan uw huisarts. Bij twijfel over de uitslag of uitvoering van de test, neem contact op met uw arts.
- Niets uit deze verpakking mag worden ingenomen.
- Bewaar de test buiten het bereik van kinderen.

## Fabrikant

Dutch Diagnostics B.V.  
Hekkehorst 3  
7207 BS Zutphen

Rev. 01-02-2010

www.dutch-diagnostics.nl

CE 0483