

Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA
Wolvega, Nederland
www.heltiq.nl

 Changzhou Hualian
Health Dressing Co., Ltd.
No. 55 Yuejin Road,
Zouqu Town 213144
Changzhou
PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

EC REP Shanghai
International Holding
Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537
Hamburg, Germany

REF 1200218 - 554017
V11.20220217



CE
0123

MD Medical
Device



STERILE **EO**

Dit product is een medisch hulpmiddel.

- Elastische kleefrand
- Hecht niet aan de wond
- Per stuk steriel verpakt

Hoe te gebruiken bij:

Snijwond

1 REINIGEN

Maak de wondranden rondom de snijwond schoon met een HeltiQ Reinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

2 AFDEKKEN

Dek de snijwond af met de eilandpleister.

Schaafwond

1 REINIGEN

Maak de huid rondom de schaafwond schoon met een HeltiQ Reinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

2 AFDEKKEN

Dek de schaafwond af met de eilandpleister.

Operatiewond

1 REINIGEN

Maak de huid rondom de operatiewond schoon met een HeltiQ Reinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

2 AFDEKKEN

Dek de operatiewond af met de eilandpleister.

Let op!

Vervang de eilandpleister regelmatig.

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder de papieren beschermlaag waardoor de kleeflaag vrijkomt.
2. Houd de eilandpleister boven de wond en breng het folie aan.
3. Druk de kleeflaag stevig aan om het goed aan de huid te laten hechten.

LOT HLA2300361



2028-02-15



2023-02-15