

SCOOTPLAZA

ROLLATOR

Duo Comfort

HANDLEIDING



CE

**Aluminium Duo Comfort rollator met gewichtslimiet van 120 kg
Overschrijd de aangegeven gewichtslimiet niet.**

VOOR GEBRUIK

- Verwijder voorzichtig alle verpakking. Gebruik geen messen of andere scherpe instrumenten, want hierdoor kan het oppervlak van het product beschadigd raken.
- Controleer het product op zichtbare schade. Als u schade ziet of een defect vermoedt, gebruik het product dan niet, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

BEOOGD GEBRUIK

Uw Duo Comfort rollator is ontworpen om u te helpen bij het lopen en het dragen van kleine boodschappen met behulp van de meegeleverde tas. De tas is speciaal ontworpen voor uw Duo Comfort rollator. Gebruik alleen de tas die bij uw Duo Comfort rollator geleverd wordt. Gebruik of combineer geen tassen en/of manden van andere fabrikanten.

Als u de Duo Comfort rollator niet gebruikt, kunt u deze eenvoudig inklappen en opbergen tot u hem weer nodig hebt. Het assortiment Duo Comfort rollators is ontworpen om zowel binnens- als buitenshuis gebruikt te worden.

KENMERKEN

- Gebruiksvriendelijke lusremmen met vergrendeling
- Eenvoudige afstelling van de remkabel
- Zachte kunststof wielen
- Zwenkbare voorwielen
- Inklapbaar vergrendelingsmechanisme
- In hoogte verstelbaar
- Ergonomische handgrepen om druk te verminderen
- Wandelstok houder

SPECIFICATIE

Totale diepte (mm)	750
Breedte ongevouwen (mm)	670
Breedte Gevouwen (mm)	980
Hoogte handvat (mm)	890-980
Zitting B x D (mm)	460x250
Voorwiel (mm)	200
Achterwiel (mm)	200
Nettogewicht (kg)	9.4
Brutogewicht (kg)	10.3

MONTAGEHANDLEIDING

Verwijder voorzichtig alle verpakking, inclusief de kartonnen kokers die het gekartelde buisgedeelte van de remassemblage bedekken. Controleer het product grondig op beschadigingen of duidelijke defecten.



Als u vermoedt dat het apparaat defect is, gebruik het dan niet, maar neem onmiddellijk contact op met uw leverancier voor service.

ONDERDELEN VAN DE DUO COMFORT ROLLATOR



MONTAGEPROCEDURE

Figuur 1



Stap 1:

Plaats het voorwiel in de houder aan de voorkant van het frame terwijl je indrukt op de borgpen. De borgpen springt omhoog wanneer het wiel goed op zijn plaats zit. Herhaal stap 1 om het tweede voorwiel te bevestigen (zie fig. 1).

Figuur 2



Stap 2:

Plaats het achterwiel in de houder aan de achterkant van het frame terwijl je op de borgpen drukt. De borgpen springt omhoog wanneer het wiel goed op zijn plaats zit. Herhaal stap 2 om het tweede achterwiel te bevestigen. (zie fig. 2)

Figuur 3



Zorg er bij het bevestigen van de achterwielen voor dat de wielen zich aan de buitenkant van het frame bevinden en dat de removerbrenging zich aan de onderkant bevindt.

Stap 3:

Bevestig de handgrepen door de borgpen op de basis van de handgreep in te drukken en in de houder op het hoofdframe te schuiven. Herhaal dit aan de andere kant (zie fig. 3).

Zorg er bij het bevestigen van de handgreep voor dat de handgreep naar de achterwielen is gericht. De ergonomische vin op de handgreep moet naar binnen gericht zijn.

Pas de hoogte van de handgrepen aan verschillende gebruikers aan. Druk op de borgpen op het hoofdframe en trek de handgreep omhoog of omlaag. Als de handgreep beweegt, laat je de knoppen los. Hierdoor wordt automatisch de volgende mogelijke hoogte vergrendeld. Herhaal dit proces tot de gewenste hoogte is bereikt. Zorg ervoor dat beide handgrepen op dezelfde hoogte vergrendeld zijn (zie fig. 3).

Figuur 4



Stap 4:

Schuif de canvas lipjes van de boodschappentas op de haken aan de zijkanten van de stoel. Gebruik de langere 'klittenband' canvas banden om de tas aan de staanders van het hoofdframe te bevestigen (zie fig. 4)

Figuur 5



Stap 5:

Bevestig de wandelstokhouder op de basis, de basis voor de wandelstokhouder bevindt zich linksonder op het frame. (zie fig.5)

Uitvouwen / Vouwen


Figuur 6



Stap 6:

Vouw de Duo Comfort rollator uit door beide zijden van het zitframe naar beneden te drukken. (zie fig. 6)

Figuur 7

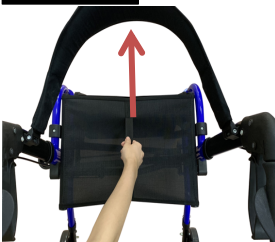

Stap 7:

Om op te klappen, trekt u de stoel omhoog via de zwarte hendel op de stoelplaat (zie afbeelding 6). De Duo Comfort rollator kan nu volledig opgevouwen worden.

Figuur 8



BELANGRIJK

Controleer voor gebruik of alle borgpennen volledig vastzitten (fig. 8).

montage-instructies (vervolg)

Stap 9:

Om de voetsteunen te monteren, lijnt u de gaten in de voetsteunbeugels uit met de nokken op de voorpoten en laat u ze op hun plaats zakken (zie fig. 9).

Draai de voetsteunen naar binnen om ze te vergrendelen (zie fig. 10)

Wanneer u de veerbelaste vergrendeling hoort klikken, zijn de voetsteunen vergrendeld (zie fig.11).



Figuur 9



Figuur 10



Figuur 11

BEDIENING VAN DE REMMEN

Figuur 9



1. Om te stoppen oefent u voorzichtig druk uit op beide remmen tegelijk (fig. 9), dit zal uw Duo Comfort rollator afremmen en stoppen.

Figuur 10



2. De remmen van uw Duo Comfort rollator hebben een parkeeroptie (fig. 10). Om de parkeeroptie te bedienen, duwt u beide remmen tegelijkertijd naar beneden. U voelt de rem een lichte klik maken. Uw remmen staan nu in de 'lock' positie.

3. Om te ontgrendelen trekt u gewoon de rem weer op, u hoort een lichte klik als de 'park'

REM BIJSTELLEN

Figuur 11



Het remsysteem van uw Duo Comfort rollator moet regelmatig worden afgesteld. Om de remmen af te stellen draait u moer B los en vervolgens draait u moer A los. Draai moer B weer vast wanneer de rem is afgesteld. Als verdere afstelling nodig is draait u de borgschroef los en trekt u met een tang de kabel ongeveer een millimeter naar beneden. Draai de borgschroef weer vast. De remmen kunnen dan verder worden afgesteld door moer B los te draaien en moer A vast/los te draaien (fig. 11).

HERZIEN

Als je dit product opnieuw uitgeeft of gaat uitgeven, controleer dan alle onderdelen grondig op hun veiligheid.

Dit omvat:

- Verbogen of beschadigde buizen of scheuren in de buisverbindingen.
- Loszittende of versleten hoefijzerklemmen
- Langwerpige afstelgaten.
- Losse handgrepen.
- Loszittende of versleten wielen en wielbevestigingen (indien gemonteerd)
- Gladde, versleten of gespleten adereindhulzen (rubberen uiteinden).

Vervang waar nodig alle versleten, ontbrekende of beschadigde onderdelen. Bij twijfel niet uitgeven of gebruiken, maar onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier voor serviceondersteuning.

VERZORGING EN ONDERHOUD & UW VERPLICHTING

1. Gebruik uw Duo Comfort rollator alleen waar deze voor bedoeld is, namelijk als hulpmiddel bij het lopen. Het is de bedoeling dat uw Duo Comfort rollator alleen gebruikt wordt op standaard trottoirs of thuis. Het dient niet gebruikt te worden op ruw terrein of ondergrond met kuilen. Het gebruik van uw Duo Comfort rollator op deze oppervlakken kan uw veiligheid ernstig in gevaar brengen en kan uw Duo Comfort rollator onherstelbaar beschadigen.

2. Houd uw Duo Comfort rollator schoon door deze af te nemen met een vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik in geen geval een schurend schoonmaakmiddel of schoonmaakmiddel op basis van oplosmiddelen, dit zal de Duo Comfort rollator ernstig beschadigen en uw garantie ongeldig maken.

3. Veeg alle oppervlakken af met een droge doek en gebruik een waterverdunner zoals WD40 op alle metalen verbindingen.

4. Controleer of alle wielen en het vouwmechanisme correct functioneren en of alle wielen vrij bewegen. Let vooral op de voorwielen, zorg ervoor dat ze vrij en zonder belemmering draaien en dat ze stevig aan het frame bevestigd zijn.

5. Maandelijkse controles - controleer of alle borgpennen goed vastzitten.

Controleer of er geen onderdelen loszitten. Controleer de afstelling van je remmen.

Controleer de wielen.

6. Monteer geen onderdelen of accessoires op uw Duo Comfort rollator die door een ander bedrijf zijn gemaakt. Doet u dit wel, dan vervalt uw garantie en kan dit uw veiligheid ernstig in gevaar brengen.

7. Wij raden u aan om uw Duo Comfort rollator elke dag visueel te controleren. Wij raden u echter aan om uw Duo Comfort rollator elke drie maanden of minder te laten nakijken als deze gebruikt wordt door of uitgegeven wordt aan verschillende gebruikers.

SCHOONMAKEN

Maak uw Duo Comfort rollator schoon met een niet-schurend schoonmaakmiddel of een mild schoonmaakmiddel met een zachte doek. Schurende reinigingsmiddelen zoals AJAX en/of schuursponsjes kunnen het product onherstelbaar beschadigen en mogen niet worden gebruikt. Zorg er altijd voor dat je het apparaat na het schoonmaken droogveegt.

ONDERHOUD

Controleer het product regelmatig op veiligheid of als je je zorgen maakt.

GARANTIE

Dit product heeft een garantie van 12 maanden vanaf de aankoopdatum

tegen fabricagefouten. Misbruik of schade wordt niet gedekt. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.