

HeltiQ

jouw eerste hulp

Zalfgaaskompres

HeltiQ Zalfgaaskompres verzorgt snijwonden, schaafwonden en 1e en 2e graads brandwonden. Door de speciale zalf droogt de wond niet uit en verkleeft het gaas niet aan de wond*. Dit product is een medisch hulpmiddel.

*Vervang het zalfgaaskompres regelmatig zodat het gaas niet uitdroogt en daardoor verkleeft met de wond

- Verkleeft niet aan de wond*
- Stimuleert het herstel
- Vermindert de kans op littekenvorming

Gebruiksaanwijzing

1. Open de folie en verwijder het bovenste papiertje.
2. Leg het zalfgaaskompres op de wond en verwijder het andere papiertje.

Let op!

Raadpleeg altijd eerst een arts bij een open brandwond groter dan 2 cm in verband met infectiegevaar.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als de wond geïnfecteerd raakt

Elk ernstig incident in verband met dit product moet worden gemeld aan de fabrikant, Koninklijke Utermöhlen en de nationale autoriteiten.

Ingrediënten

Ontvet katoen, vaseline

Hoe te gebruiken bij:

Snijwond

- 1 REINIGEN**
Spoel de snijwond schoon met HeltiQ Wond & Oog Spray. Dep droog met een steriel HeltiQ Gaaskompres. Of maak de huid rondom de snijwond schoon met een HeltiQ Wondreinigingsdoekje.
- 2 AFDEKKEN**
Knip het zalfgaas op het formaat van de snijwond. Dek de snijwond af met het zalfgaaskompres. Leg daar bovenop een HeltiQ Niet Verklevend Wondkompres.
- 3 FIXEREN**
Verbindt het met een HeltiQ Elastisch Fixatiewindsel. Zet vast met een HeltiQ Hechtpleister. Of gebruik een HeltiQ Zelfhechtend Fixatiewindsel. Gebruik bij een snijwond aan de vinger een HeltiQ Vingerbob.

Schaafwond

- 1 REINIGEN**
Spoel de schaafwond schoon met HeltiQ Wond & Oog Spray. Dep droog met een steriel HeltiQ Gaaskompres. Maak de huid rondom de schaafwond schoon met een HeltiQ Wondreinigingsdoekje.
- 2 AFDEKKEN**
Knip het zalfgaas op het formaat van de schaafwond. Dek de schaafwond af met het zalfgaaskompres. Leg daar bovenop een HeltiQ Niet Verklevend Wondkompres. Of dek het zalfgaaskompres af met een HeltiQ Wondsnelverband.
- 3 FIXEREN**
Verbindt het geheel met een HeltiQ Elastisch Fixatiewindsel. Zet vast met een HeltiQ Hechtpleister. Of gebruik een HeltiQ Zelfhechtend Fixatiewindsel.

Brandwond

- 1 KOELEN**
Koel een 1e of 2e graads brandwond met HeltiQ Brandwondengel of een HeltiQ Brandwondenkompres. Koel een 3e graads brandwond alleen met een HeltiQ Brandwondenkompres.
- 2 AFDEKKEN**
Raadpleeg altijd een huisarts bij grote en diepe 2e of 3e graads brandwonden. Hoeft de brandwond niet door een huisarts bekeken te worden, dek dan de 1e en 2e graads brandwond af met het zalfgaaskompres. Leg daar bovenop een HeltiQ Niet Verklevend Wondkompres.
- 3 FIXEREN**
Verbindt het geheel lichtjes met een HeltiQ Elastisch Fixatiewindsel. Zet vast met een HeltiQ Hechtpleister.

LOT 2230110

2026-05

2023-05



8 717484 791639

EN Paraffin gauze dressing

For the care of cuts, abrasions and 1st and 2nd degree burns

FR Compresse imprégnée

Pour le soin des coupures, écorchures et brûlures du 1er et 2ème degré

DE Salben- kompresse

Zur Pflege von Schnitten, Schürfwunden und Verbrennungen 1. und 2. Grades



Scan de code voor meer informatie over het gebruik van dit product.

Importeur:
Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA
Wolvega, Nederland
www.heltiq.nl

Shaoxing Fuqing Health
Products Co., Ltd.
No.599 Wuxie Road, High-Tech
Industrial Development Zone,
312000, Shaoxing, Zhejiang,
P.R. China

EC REP Shanghai
International Holding Corp.
GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80,
20537, Hamburg, Germany

REF 1111008 - 554074
V2.20230425



0123



PAP



STERILE R