

Het stripvrije Accu-Chek® Mobile systeem. Ontdek hoe eenvoudig meten kan zijn.



Was en droog uw handen voor iedere test.

Vier simpele stappen



1 Open het afdekkapje. De meter gaat aan.



2 Druk de prikken stevig tegen de zijkant van uw vingertop. Druk op de prikknop.



3 Breng de bloeddruppel aan in het midden van het testveld.



4 In ongeveer 5 seconden verschijnt het resultaat. Sluit het afdekkapje volledig. De meter gaat uit.




Vervangen van de testcassette – na 50 testen



1 Open het afdekkapje. Schuif dit helemaal naar links tot de meter aan gaat.



2 Schuif de knop aan de zijkant naar boven om het cassettecompartiment te openen.

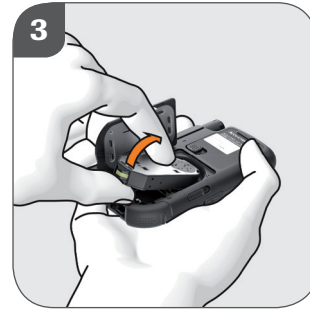

3 Verwijder de gebruikte cassette uit de meter.



4 Plaats de nieuwe cassette in de meter. Sluit het cassettecompartiment en schuif het afdekkapje terug.

Vervangen van de lancethouder – na gebruik van 6 lancetten:



1 Haal het dopje van de prikpen.



2 Verwijder de gebruikte lancethouder. De gebruikte lancethouder is voorzien van een rode streep en kan niet opnieuw gebruikt worden.



3 Vervang de lancethouder voor een nieuwe.



4 Plaats het dopje terug op de prikpen.



5 Draai de instelling voor de juiste prikdiepte. Begin met een gemiddelde prikdiepte, bijvoorbeeld 3.



Zorg dat uw prikpen klaar is voor gebruik. Beweeg het hendeltje heen ① en weer ② voor een nieuw lancet.

Lancet vervangen

