

Hoe gebruik je Hybrid Anti-druk Wol?

Niet gebruiken bij: Lanoline (wolvet) allergie, Neuropathie, Niet-intacte huid

Stap 1

Pluk voldoende wol uit de stazak en trek vervolgens de wol een beetje uit elkaar zodat hij extra fluffy aanvoelt. Een echt geschenk van moeder natuur!



Stap 2

Zorg dat je huid schoon & droog is. Plaats voordat je jouw sok aandoet de anti-druk wol royaal om jouw hiel, tussen je tenen of op een ander plekje dat verlichting kan gebruiken.

Stap 3

Trek je sok weer aan, deze houdt de wol op zijn plek. Klaar?! Wandel met wol om je hiel, onder je voorvoet of tussen je tenen, dan is voetongemak zo verdwenen!



Tip:

Hybrid anti-druk wol is geen geneesmiddel maar het verzacht en voorkomt voetongemak. Je kunt het (bijna) niet fout doen! Maak vooral op gevoel gebruik van de wol, en wees niet bang om de wol op verschillende manieren te testen. Je voeten zullen je dankbaar zijn!

mooisee
A woolsome brand.

Vragen? Neem contact met ons op via [bol.com](https://www.bol.com).