



0459

COMPEED® - Rien ne vous arrête !
 COMPEED® - Niets houdt je nog tegen!

5x
 4,2 x 6,8 cm

MOYEN FORMAT MEDIUM

PANSEMENTS AMPOULES | BLAREN PLEISTERS



Appliquez le pansement sur une peau propre et sèche.
 Évitez de toucher la partie adhésive du pansement.
 Laissez-le en place jusqu'à ce qu'il se décolle de lui-même.
 Peut rester en place plusieurs jours.

Diabétiques : consultez un médecin avant utilisation. Lire les instructions et précautions à l'intérieur.

Maak voor gebruik de huid schoon en droog. Raak de kleefzijde niet aan. Laat de pleister zitten totdat hij vanzelf begint los te laten. Mag meerdere dagen blijven zitten.

Diabetici: raadpleeg voor gebruik uw arts. Valledige gebruiksaanwijzing en waarschuwingen aan de binnenzijde.

Bei Diabetes vor der Benutzung mit dem Arzt Rücksprache halten. Ausführliche Anwendungshinweise & Warnungen in der Innenkarte.



0459 LOT:



Laboratoire HRA Pharma
 15 rue Béranger
 75003 Paris - France
 Made in EU

55709740

www.compeed.com

55709739

Rev. Date
 06/2018