

... (polyoxyéthylène-polyoxybutylène)), POLYQUAD™ (polyquaternium-1) 0,001% et ALDOX™ (myristamidopropyl diméthylamine) 0,0006% conserveermiddelen en gezuiverd water.



boorzuur

Niet voor gebruik met hitte (thermische) desinfectie. Verander niet van lensverzorgingsproducten zonder uw oogzorgspecialist te raadplegen. Wanneer de fles geopend is, gooi de overgebleven vloeistof na zes maanden weg. Gebruik dit product niet als u allergisch bent aan een van de bestanddelen.



**fr** Système d'entretien pour lentilles de contact OPTI-FREE™ PureMoist™ : OPTI-FREE™ PureMoist™ solution multi-fonctions de décontamination et étui de trempage Alcon. Nettoie, rénove, rince, décontamine et conserve les lentilles de contact souples (hydrophiles) et en silicone hydrogel.

**BONNES PRATIQUES D'ENTRETIEN DES LENTILLES**



Suivez toujours toutes les instructions de la notice fournie dans le carton.



Utilisez toujours une nouvelle quantité de solution pour nettoyer et décontaminer vos lentilles de contact.



Jetez toute solution restant dans votre étui de trempage après la décontamination.


**NE JAMAIS REUTILISER LA SOLUTION.**

**Contient :** Citrate de sodium, chlorure de sodium, acide borique, sorbitol, aminométhylpropanol, EDTA disodique, deux agents hydratants (TETRONIC™ 1304† et HydraGlyde™ Matrice Hydratante [EOBO-41™ (polyoxyéthylène-polyoxybutylène)], conservateurs POLYQUAD™ (polyquaternium-1) à 0,001 % et ALDOX™ (myristamidopropyl diméthylamine) à 0,0006 %, et eau purifiée.



Acide borique

Ne pas utiliser pour une décontamination à chaud (thermique). Ne pas changer la solution d'entretien de vos lentilles sans consulter votre spécialiste. Après ouverture du flacon, jetez toute solution restante après six mois.

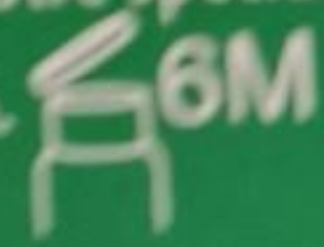

Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants.



Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, TX 76134-2099  
USA / États-Unis

EC REP

Alcon Laboratories Belgium  
Lichterveld 3  
2870 Puurs-Sint-Amands  
Belgium / Belgique / Belgien



CH-REP: Alcon Switzerland SA,  
Dammstr. 21, CH-6300 Zug

† TETRONIC™ is een handelsmerk van BASF.  
† TETRONIC™ est une marque déposée de BASF.

9018320-0821

CNK-code: 2941-144