

Druppelbril



Gebruiksaanwijzing Druppelbril

Dank u wel voor uw aankoop van de Druppelbril.

Let voor gebruik van de Druppelbril op de volgende zaken:

- Volg altijd de aanwijzingen van uw specialist
- Gebruik de Druppelbril alleen voor het druppelen van uw ogen met de daarvoor geschikte oogdruppels.
- De Druppelbril is niet te gebruiken als veiligheids-zichtsverbetering-, zonbeschermings- of correctiebril
- De Druppelbril is niet geschikt voor Minims en Ooggel

Kan ik alles zelf doen?

- U wast uw handen en houdt rekening met uw lenzen
- U klemt het flesje in de bril.
- U zet de bril op uw hoofd
- U doet uw hoofd goed naar achter
- U druppelt met één hand de benodigde hoeveelheid druppels in uw oog.
- U zet de bril weer af, en bergt het flesje met oogdruppels op.
- Zonder moeite heeft u uw ogen gedruppeld.

Gebruiksaanwijzing

- Was uw handen
- Plaats het doseerflesje of -flacon in een passende opening van de bril, zodat het stevig vastzit
- Zet de bril op
- Buig uw hoofd achterover, zodanig dat het doseerflesje verticaal boven uw oog zit
- Houd met een hand uw oog open
- Doseer met uw andere hand de druppels door in het flesje te knijpen
- Na gebruik uw bril afspoelen met water, alcohol of een desinfecterend middel en drogen met een schone doek.

LET OP: De bril is niet geschikt voor Minims pipetten. Door de lange hals kan de pipet in contact komen met uw oog.

Bedankt voor uw vertrouwen in ZHON Zorgwinkel !