

Mousti-Click

Verzacht jeuk en vermindert zwelling

op basis van piëzoelectriciteitsopwekking, zonder chemicaliën



Omschrijving : medische hulpmiddel op basis van piëzo-electriciteitsopwekking, zonder chemicaliën

Indicatie : verzacht jeuk – vermindert zwelling bij muggenbeten (baby's vanaf 6 maanden / kids / volwassenen)

Eigenschappen:

- Eiwitten uit speeksel van de mug worden als lichaamsvreemd aanzien in ons immuunsysteem waardoor ons lichaam hierop onmiddellijk reageert.
- Histamine komt vrij, bestrijdt de vreemde stof en er komt een zwelling en/of jeuk.
- Mousti-Click zal met kleine elektrische lading de lichaamsvreemde molecule meehelpen afbreken.

Gebruik:

snel, gemakkelijk en veilig

- Voor de beste resultaten is het aan te raden om het zo snel mogelijk na de muggenbeet te gebruiken.
- Als de nood om te krabben terugkeert, herhaalt u de actie indien nodig.
- De top van het apparaat precies op de beet plaatsen.
- Een licht tintelend gevoel zal bij elke klik voelbaar zijn (kleine statische lading die vrijkomt door piëzo-elektriciteit).
- Druk zo vaak als nodig op de knop :
 - volwassenen: 5 tot 10 klikken om jeuk te verminderen – 10 tot 15 klikken om zwelling te minderen
 - kinderen (vanaf 6 maand): halve dosis

niet gebruiken bij hartaandoeningen, epilepsie, implantatie, zwangere vrouwen, op zweren en open wonden

Technische kenmerken:

- lange levensduur : 25 000 klikken voor ongeveer 4 000 muggenbeten
- geen batterijen nodig
- ecologisch, zonder chemicaliën

Bijwerkingen: geen, klinisch getest

Reiniging: veeg het oppervlak van het apparaat af met een zachte, vochtige doek

Mousti-Click

Adoucit les démangeaisons et réduit les gonflements

à base de la production d'électricité de piézo, sans produits chimiques



Description : un appareil médical à base de piézoélectricité, sans produits chimiques

Indication : adoucit les démangeaisons - réduit les gonflements des piqûres moustiques (bébés >6mois / enfants / adultes)

Caractéristiques:

- Les protéines de la salive sont considérées comme étrangères à notre système immunitaire et notre corps réagit immédiatement.
- L'histamine est libérée, lutte contre les matières étrangères, il apparaît un gonflement et/ou des démangeaisons.
- Mousti-Click aidera à décomposer la molécule étrangère avec une petite charge d'électrique.

Usage: rapide, facile et sûr

- Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de l'utiliser dès que possible après la piqûre du moustique.
- Si l'envie de gratter revient, répétez l'action.
- Placez le point de l'appareil avec précision sur la piqûre.
- Une légère sensation de picotements se fera sentir à chaque clic (une charge statique minuscule qui se libère lorsque le bouton est pressé).
- Appuyez sur le bouton autant de fois que nécessaire :
 - adultes : appliquer de 5 à 10 clics pour réduire l'envie de gratter la zone de la morsure – de 10 à 15 clics pour réduire le gonflement
 - enfants (plus de 6 mois) : demi dose

ne pas utiliser en cas de maladie cardiaque, épilepsie, implant, femmes enceintes, sur les plaies et les muqueuses

Données techniques:

- dure de vie longue: 25 000 clics (jusqu'à 4 000 piqûres)
- aucune batterie requise
- écologique, sans produits chimiques

Effets secondaires: aucun, testé cliniquement

Nettoyage: essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux et humide