

Instructions d'assemblage :

1. Retirez toutes les pièces de l'emballage et découvrez les pièces illustrées dans le schéma 1.

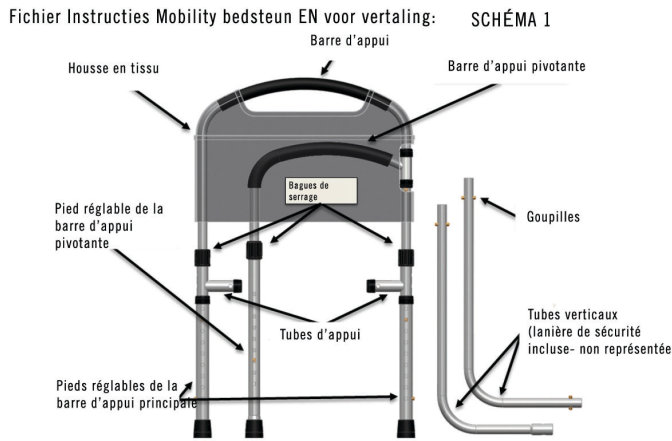


SCHÉMA 1

2. Déterminez de quel côté du lit vous souhaitez installer le produit, comme indiqué dans le schéma 2.

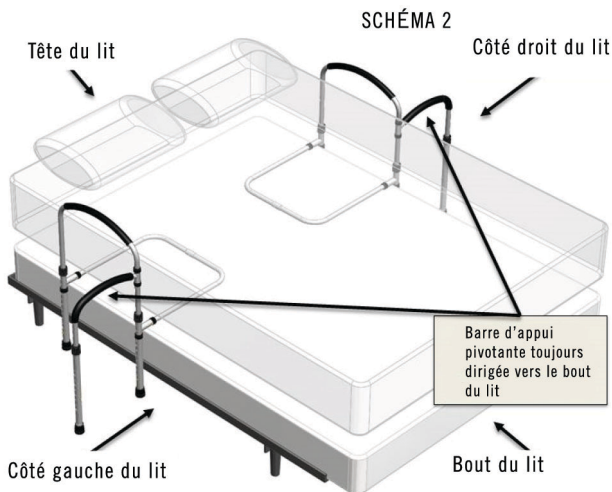


SCHÉMA 2

3. **IMPORTANT** : Positionnez et orientez correctement le produit en fonction du côté du lit où vous comptez l'utiliser, comme indiqué dans le schéma 3.

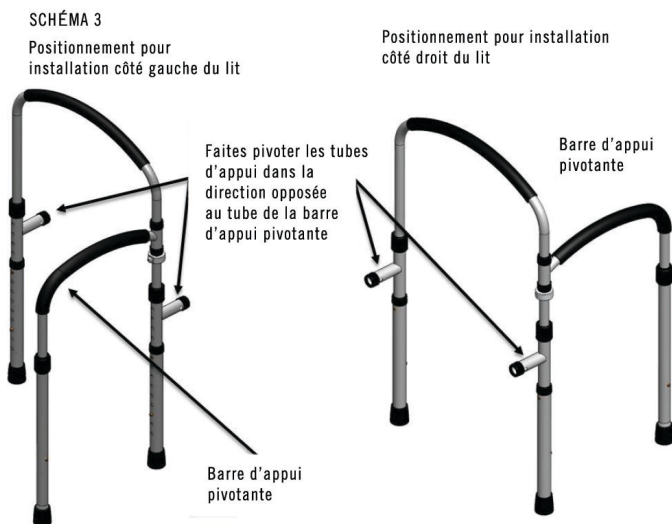


SCHÉMA 3

4. Assemblez les tubes verticaux, comme indiqué dans le schéma 4.

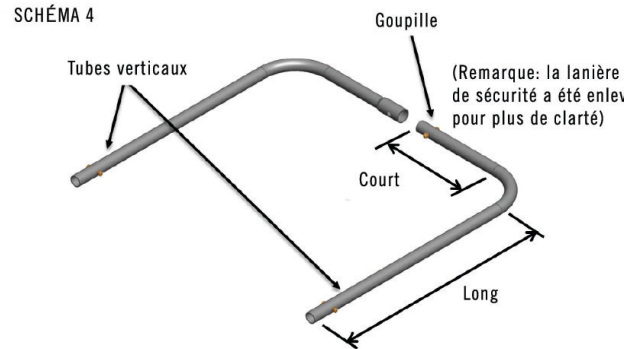


SCHÉMA 4

5. **REMARQUE** : L'étape suivante dépend de quel côté du lit vous souhaitez installer le produit. Fixez les tubes verticaux dans les tubes d'appui, comme indiqué dans le schéma 5. Assurez-vous que les goupilles s'engagent correctement dans les trous des tubes d'appui.

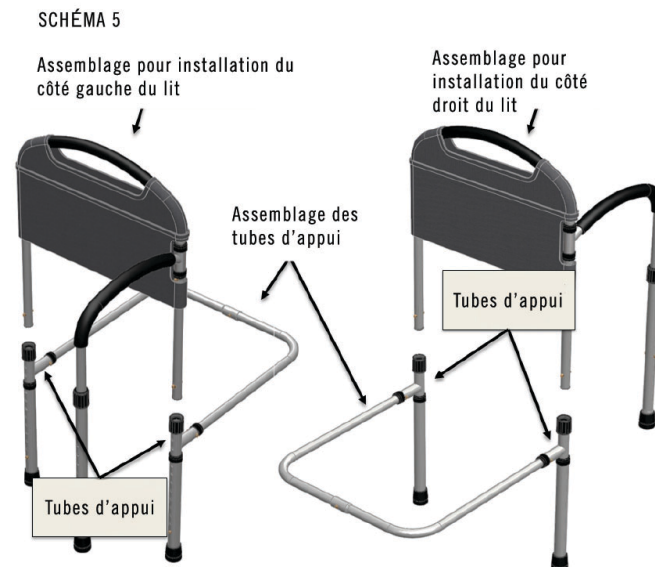


SCHÉMA 5

6. **Ajustement de la hauteur de la barre d'appui principale :**


Comme l'illustre le schéma 6, il est possible de surélever ou d'abaisser la barre d'appui. Il suffit de desserrer les bagues de serrage par rotation dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Appuyez sur les deux goupilles afin d'élever ou d'abaisser la barre à la hauteur désirée. Une fois la barre d'appui principale positionnée à la hauteur désirée, resserrez les bagues de serrage en les faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

7. **Ajustement de la hauteur des pieds de la barre d'appui principale :**

Comme indiqué dans le schéma 6, il est possible d'ajuster la hauteur des pieds de la barre d'appui principale afin de s'assurer qu'ils soient bien en contact avec le sol. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur les goupilles, qui permettent d'élever ou d'abaisser les pieds jusqu'à la hauteur désirée.

SCHÉMA 6

SCHÉMA 6

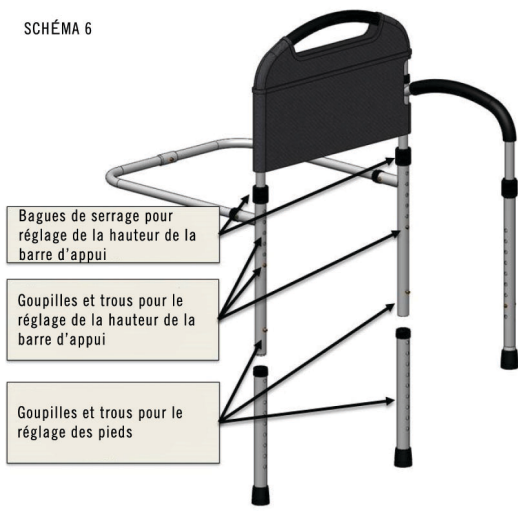

5850 Mobility Bed Rail V 1.0

8. **Avertissement relatif au piégeage :** Attachez la LANIÈRE DE SÉCURITÉ au cadre de lit, comme indiqué dans le schéma 7. Détachez la lanière de sécurité, enroulez-la autour du cadre de lit puis rattachez-la. Serrez la lanière afin de fixer les barres verticales parfaitement contre le bord du matelas. N'installez PAS le produit sans attacher la LANIÈRE DE SÉCURITÉ au cadre de lit, comme indiqué dans le schéma 7. Si vous avez des questions, veuillez contacter Stander au +1 800 506 9901 ou au +1 435 755 0453.

SCHÉMA 7

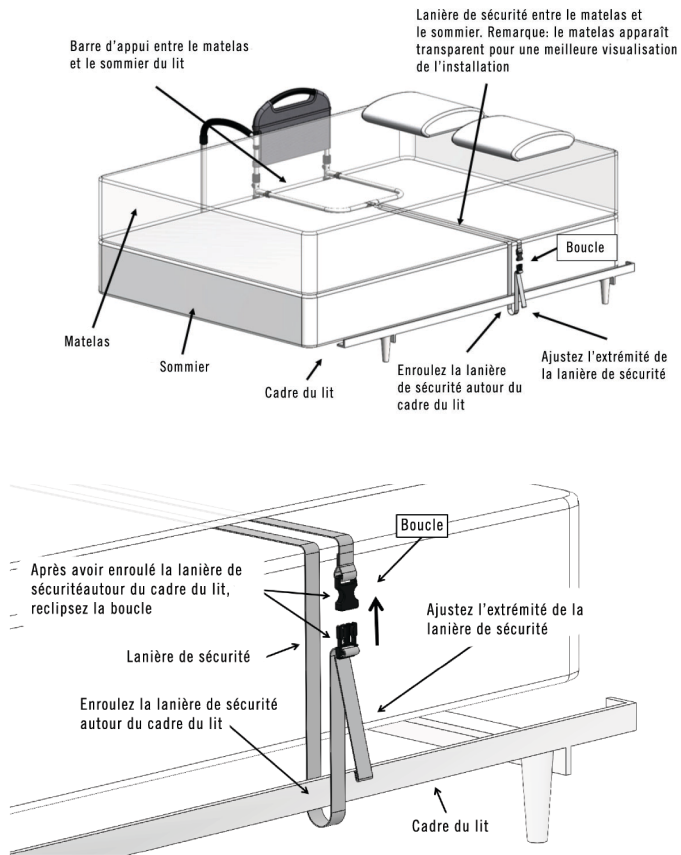


SCHÉMA 7

9. **Avertissement relatif au piégeage :** Installez la housse en tissu sur la barre d'appui, comme indiqué dans le schéma 8. N'installez PAS le produit sans la housse en tissu. Ne modifiez PAS la housse en tissu de quelque manière que ce soit. La housse en tissu est conçue pour éviter que l'utilisateur ne se trouve coincé dans la barre de lit (nous vous invitons à consulter les **Consignes de prévention des risques de piégeage** fournies avec les présentes instructions).

REMARQUE : Placez le produit à 32 cm de la tête du lit afin d'éviter les risques de piégeage (nous vous invitons à consulter les **Consignes de prévention des risques de piégeage** fournies avec les présentes instructions). Par ailleurs, une installation de la barre d'appui à une hauteur de 10 cm minimum évitera que l'utilisateur ne glisse par-dessus la barre de lit.

SCHÉMA 8

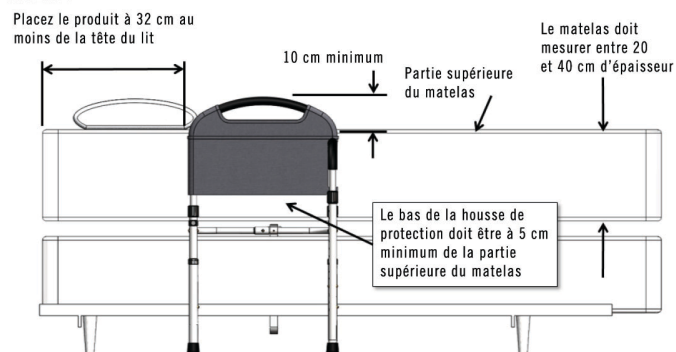


SCHÉMA 8

10. Il est essentiel que la barre de lit soit bien fixée contre le bord du matelas. La lanière de sécurité doit venir s'enrouler autour du cadre de lit du côté opposé du lit, et doit être bouclée et ajustée comme indiqué dans le schéma 9.

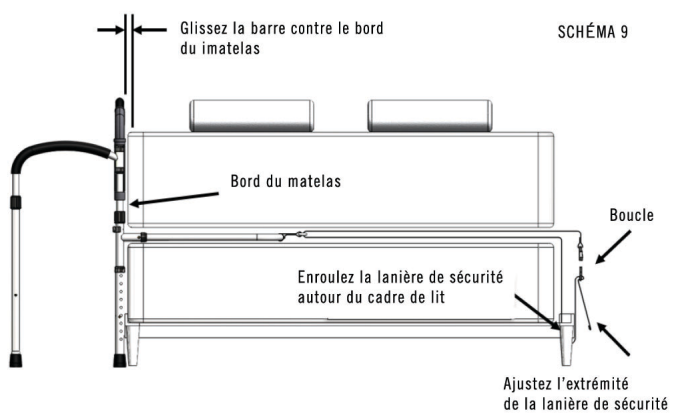


SCHÉMA 9