

Gebrauchsanweisung Satisfyer Men – Cooling Gleitmittel

Die Satisfyer Men Gleitmittel

Die Satisfyer Men Gleitmittel sind Medizinprodukte zur Anwendung auf der Haut. Sie haben eine öl- und fettfreie Rezeptur und überzeugen mit ausgewählten Rohstoffen, kontrollierten Fertigungsprozessen sowie einer umfangreichen Prüfung. Die Gleitmittel sind positiv auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit getestet und haben eine nachweisliche Kondomverträglichkeit.

Alle Gleitmittel der Satisfyer Men Reihe erfüllen die strengen Anforderungen der Europäischen „Richtlinie 93 / 42 EWG über Medizinprodukte“ und des deutschen „Medizinproduktegesetzes“.

Die Satisfyer Men Gleitmittel sind auf Wasserbasis. Das bedeutet, sie sind einfach und rückstandslos mit Wasser abwaschbar und erzeugen kein klebriges Gefühl auf der Haut. Sie sind ideal auf die Benutzung mit allen Satisfyer Men Produkten abgestimmt, können aber auch mit anderen Toys oder beim Geschlechtsverkehr verwendet werden.

So wirken die Gleitmittel

Die Gleitmittel machen die Anwendung mit Deinem Satisfyer Men einfach und reibungslos. Sie wirken wie ein Schmierstoff, der es Dir ermöglicht, schnell in die weiche Hülle einzudringen und die Verwendung mit Deinem Toy zu genießen. Das Gleitmittel sorgt für ein realistisches Feeling und intensive Gleifähigkeit. Dabei ermöglicht seine farb- und geschmacklose Rezeptur einen natürlichen Genuss.



Anwendung der Satisfyer Men Gleitmittel

Das praktische Fläschchen ermöglicht Dir eine leichte Dosierung. Gib eine erdnussgroße Menge Gleitmittel auf Deinen Penis und ein wenig Gleitmittel auf Dein Toy. Verteile das Gleitmittel gleichmäßig auf Deinem erigierten Penis und gleite sanft in den Masturbator hinein.

Beim Geschlechtsverkehr ebenfalls genügend Gleitmittel auf dem Penis oder auf dem am erigierten Penis abgerollten Kondom sowie am Körperteil des Partners auftragen und mit den Fingern verteilen. Empfehlenswert ist, sich vor und nach der Benutzung gründlich die Hände zu waschen.

Bei der Verwendung mit Kondom unbedingt die Hinweise der Gebrauchsanweisung des Kondoms beachten.



Entfernung der Satisfyer Men Gleitmittel

Die Gleitmittel aus der Satisfyer Men Serie können rückstandslos mit Wasser abgewaschen werden, ganz gleich, ob von der Haut, den Schleimhäuten oder von Deinem Toy. Aus hygienischen Gründen solltest Du Dein Toy vor und nach jedem Gebrauch reinigen. Dafür ist das Satisfyer Men Disinfectant Spray perfekt geeignet.

Sonstige Hinweise zur Verwendung beim Geschlechtsverkehr

Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor Infektionen

Die Satisfyer Men Gleitmittel sind keine empfängnisverhütenden Mittel, enthalten keine spermiziden Wirkstoffe und bieten auch keinen Infektionsschutz.

Bei Kinderwunsch

Gynäkologen empfehlen, Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen oder zur Sicherheit ganz wegzulassen, da sie die Empfängnis erschweren können.

Sonstige Hinweise bei Unverträglichkeiten

Bei der Suche nach Unverträglichkeiten, z.B. allergieauslösenden Stoffen, sollte man sich vor der Anwendung in der Kennzeichnung des Produktes unter „Ingredients (INCI):“ informieren. Treten Hautirritationen auf, bitte das Produkt wie beschrieben entfernen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.



Inhaltsstoffe

Wasser, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Allantoin, Benzoessäure, Menthol, Aroma

Hersteller



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germany



CE 0197