

1. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

De waarschuwingen geven belangrijke veiligheidsinstructies aan. Wanneer deze instructies niet in acht worden genomen, kan dat persoonlijk letsel of schade aan het product veroorzaken. De volgende symbolen en signalwoorden geven de ernst van de waarschuwingen aan:

**WAARSCHUWING**

Kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

**WAARSCHUWING**

Kan leiden tot lichte verwondingen.

LET OP

Kan tot materiële schade leiden (niet gerelateerd aan persoonlijk letsel).

**Informatie**

Nuttige of belangrijke informatie die geen verband houdt met de veiligheid.

**WAARSCHUWING**

Om vuur, elektrische schokken of ernstige brandwonden te voorkomen:

- Trek onmiddellijk de stekker van een elektrisch apparaat uit het stopcontact na het opdoeken.
- Reinig de borststof nooit tijdens het opdoeken.
- Plaats tijdens het opdoeken de borststof niet op een plaats waar deze kan vallen of in het water kan worden getrokken.
- Niet gebruiken tijdens het baden, douchen, autorijden of zwemmen.
- Rook een elektrisch apparaat dat in het water is gevallen niet aan en haal onmiddellijk de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend een externe voeding met de volgende specificaties: DC 5V 1A. Er gaat schokstroom en hoge spanning worden gebruikt, overeenkomstig de marking op het apparaat.
- Stel het apparaat op de occ niet bloot aan extreme temperaturen.
- Wees u bewust van het risico dat metalen voorwerpen of vloeistoffen kortsluiting kunnen veroorzaken in de USB-C-omgeving of de occ van de borststof.

Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op ernstig letsel te beperken:

- Gebruik de borststof alleen voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Dit product is bedoeld voor gebruik door één gebruiker. Elektrische borststoffen die van een gebruiker zijn onttrokken, mogen nooit worden gehandeld of gedeeld. Bij gebruik door meer dan één persoon kunnen er gezondheidsrisico's ontstaan en vervult de garantie.
- Kolven kan de bevestiging opwekken. Begin pas met kolven na de bevestiging. Als u zwaarder wordt in de periode dat u borstvoeding geeft of afkalt, raadpleeg dan een professionele zorgverlener voordat u ermee doorgaat.
- Als u een actief geïmplanteerde apparaat hebt dat beïnvloed kan worden door magnetische velden (bijv. pacemaker of implanteerbare cardiorweiter-debrillator), raadpleeg dan uw arts voor een beveiligd arts.
- Er is een waarschuwingstabel vereist als de borststof of accessoires in de buurt van kinderen worden gebruikt.
- Bij gebruik van elektrische apparaten moet u zich altijd aan de basisveiligheidsregels houden, zoals ook in de aanwijzing is opgenomen.
- Deze borststof is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintjufelijke of verstandelijke vermogens, of door personen met

onvoldoende ervaring en kennis. Dergelijke personen mogen deze borststof alleen gebruiken als zij onder toezicht staan van, of voldoende instructie hebben gekregen van, iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Reinig alle onderdelen die in aanraking kunnen met de borst en met moederwerk vóór het eerste gebruik en na ieder gebruik. Zie hoofdstuk 8 voor reinigingsinstructies.
- Als u besmet bent met hepatitis B, hepatitis C of het hiv-virus (huimoon immunodeficiëntievirus) wordt het risico dat het virus via moederwerk op de baby wordt overgedragen niet beperkt of geïmmuneerd door de af te kolven.
- Gebruik een elektrisch apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, het niet goed werkt, gevecht of beschadigd is of in water is gevallen. In geval van beschadiging, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de Medella Customer Service.
- Laat de borststof nooit onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact.
- Gebruik de borststof niet tijdens het baden van een zeer slapend kind.
- Gebruik de borststof niet tijdens het slapen of als u zeer slapend bent.
- Niet gebruiken op plaatsen waar aerosolproducten (spray) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt nabij explosieve of brandbare materialen, in MRI-omgevingen, hyperbare kamers, of in de buurt van open vuur of straalolies.
- Gebruikers mogen het product niet zelf repareren. Als u dat toch doet, vervalt de garantie. Stuur het product voor reparaties naar de fabrikant of een aangewezen franchisehandelaar.
- Schakel de borststof altijd uit of pauzeer deze voordat u het kalfgedeelte van uw borst verwijdt, om het vacuüm te laten ontspannen.
- De temperatuur van het contactoppervlak kan maximaal 43,9°C bereiken. Temperaturen boven dit niveau kunnen brandwonden aan de huid veroorzaken. Schakel het apparaat af als u voelt dat het oververhott raakt. In geval van brandwonden te voorkomen, mag het apparaat maximaal 30 minuten achter elkaar worden gebruikt. Tussen twee gebruiksbereiden dient een pauze van minimaal 5 minuten te worden genomen.
- De Motion Inbra "borststof" is een elektrische borststof voor persoonlijk gebruik met 2-Phase Expressie technologie™. De gebruiksdruk van de Motion Inbra "borststof" bedraagt 250 uir. De verwachte gebruiksduur van de wasbare onderdelen (melkcontacten, borstschild, inzetstuk en membranen) is drie maanden.

WAARSCHUWING

Om vuur of brandwonden te voorkomen:

- Gebruik bij de borstkolf uitsluitend door Medela aanbevolen onderdelen, waaronder de USB-voedingskabel.

Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op letsel te beperken:

- Gebruik de borstkolf nooit
 - als deze niet goed werkt,
 - als hij gevullen of beschadigd is of als er schimmel op de onderdelen zit,
 - als hij in water of andere vloeistoffen is gevullen of eraan is blootgesteld.
- Vermijd het gebruik van de borstkolf tijdens plotselinge drukveranderingen, zoals tijdens het opstapen en landen van vliegtuigen. In omgevingen op grote hoogte, waaronder in cabines met vliegtuigen onder druk, kunnen de prestaties van de kolf worden beïnvloed.

LET OP

- De borstkolf en accessoires zijn niet hittebestendig. Houd ze uit de buurt van verwarmde oppervlakken en open vuur.

i Informatie

Houd er rekening mee dat de prestaties van de Motion InBra™ borstkolf beïnvloed kunnen worden door de externe omgeving, gezien de onvoorspelbaarheid en instabiliteit van de reisinrichting. Vermijd direct zonlicht op de motorunit van de borstkolf.

Let op: Product kan afwijken van afbeelding.

2. Beoogd doel

De Motion InBra™ is een elektrische, draagbare borstkolf voor persoonlijk gebruik, ontworpen voor vrouwen die borstvoeding geven om moedermelk af te kolven en op te vangen. De Motion InBra™ is een elektrische, draagbare borstkolf voor persoonlijk gebruik en is bedoeld voor gebruik door één persoon. Deze borstkolf is bedoeld voor thuisgebruik.

3. Productomschrijving

De Motion InBra™ is uitgerust met 2-Phase Expression™-technologie, met een stimulatie- en een afkolmodus. [De stimulatiefase start met een snel, kort zuigpatroon om de melkstroom op gang te brengen. Tijdens de afkolfase volgt een langzamere en diepere zuigpatroon om de melk uit de borst te kolven. Om te voorkomen dat melk in het vacuümsysteem terechtkomt, is de kolfset voorzien van een siliconenmembraan dat de melk fysiek van het vacuümsysteem scheidt.]

De inhoud van het Motion InBra™ kolfstelsel bestaat uit:

The diagram shows the components of the Motion InBra™ kolfstelsel. At the top, a bracket labeled 'Afkolfsel' groups the Borstschild 24 mm, Membraan, and Container 150 ml. Below these are the Stofhoes, Inzetstuk 15mm / 18mm / 21mm, Motorunit, and USB-A-naar USB-C-kabel. Each component is shown with a corresponding image and label.

Raadpleeg **hoofdstuk 7** voor bestelinformatie van accessoires.

4. Aan de slag

Vóór het eerste gebruik is het belangrijk dat u het volgende doet om optimale prestaties van de draagbare borstkolf en veiligheid voor u en uw baby te garanderen:

- Laad de borstkolf op - **hoofdstuk 5.**
- Demonteer de draagbare borstkolf - **hoofdstuk 6.**
- De juiste maat borstschild en inzetstuk kiezen - **hoofdstuk 7.**

5. Uw motorunit opladen

WAARSCHUWING

- De borstkolf kan tijdens het opladen niet worden gebruikt!
- De opkabelkabel is uitsluitend bedoeld om de voedingsadapter met de Motion InBra™ eenheid te verbinden voor het opladen. Sluit de kabel niet aan op andere apparatuur, anders kan dit ongelukken met elektrische schokken veroorzaken.
- Laad de borstkolf nooit op met een beschadigd USB-netstroom.

WAARSCHUWING

- Gebruik uitsluitend een externe voeding met de volgende specificaties: DC 5V 1A. Er mag uitsluitend een lage spanning worden gebruikt, overeenkomstig de markering op het apparaat.

LET OP

- Laad de borstkolf niet op met de melk in de container.
- Vervang de accu niet zelf als de gebruiksdruk na volledig opladen korter is dan voorheen. Neem contact op met de klantenservice van Medela. Het zelf demonteren en vervangen van de accu kan schade aan de motorunit veroorzaken.
- De accu ontlad langzaam wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt. Laad het apparaat elke drie maanden op om schade aan de accu te voorkomen. Raadpleeg **hoofdstuk 18** voor technische specificaties.
- Laad het apparaat alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 40°C (41°F tot 104°F) om oververhitting van de accu te voorkomen.

i Informatie

- Opladen is ook mogelijk wanneer de borstkolf is gedemonteerd.

- Blijf niet langer dan vijf minuten achter elkaar achter elkaar met melk te kolven. Probeer op een ander moment van de dag melk af te kolven.

- Als u pijn ondervindt tijdens het afkolven, verbreek dan het vacuüm tussen de borst en het borstschild met uw vinger en verwijder de borstkolf van uw borst.

- Stop met het gebruik van de borstkolf als het ongemak aanhoudt of wanneer er nagemoeg geen melk afgekolfd wordt. Neem contact op met uw borstvoedingsspecialist of professionele verzorger.

- Als de bekabeling of de bekabeling van de voedingsadapter losgeraakt of beschadigd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de adapter en neem contact op met de fabrikant. Als u rook of brandvlucht vanuit de borstkolf of voedingsadapter opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Als u tijdens het afkolven merkt dat de draagbare borstkolf te warm wordt, stop dan meteen met afkolven en verwijder de kolf.

- Reinig de motorunit door deze af te vegen - **hoofdstuk 8.**
- Was en kook de onderdelen (behalve de motorunit) - **hoofdstuk 8.**
- Monteer de draagbare borstkolf - **hoofdstuk 9.**

6. De draagbare borstkolf demonteren

- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u rook of brand opmerkt uit de kolf of de stroomadapter.
- De borstkolf kan niet worden ingeschakeld of bediend wanneer deze is aangesloten op de lader.

7. Het apparaat opladen

- Niet demonteren, erop kloppen, knijpen of in het vuur gooien. Sommige onderdelen van lithium-accu's zijn brandbaar en schadelijk. Ze kunnen letsel, brand, scheuren of een explosie veroorzaken.
- Stop met het gebruik indien er ernstige zwelling optreedt.
- Vervang de accu niet zelf, om oververhitting van de accu, brand of persoonlijk letsel te voorkomen. Verwijder, open, snij of prik de accu of het oplaadkabel niet met metaal.
- Laad de accu niet langdurig op. Voordat u de accu weggooit, moet u deze uit het apparaat verwijderen.

Apparaat in niet-opgeladen status:

-  Continu brandend lampje geeft aan dat de accu voldoende lading heeft.
-  Een continu brandend lampje duidt op een gemiddeld batterijniveau.
-  Continu brandend lampje duidt op een laag batterijniveau.
-  Knipperend lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is.

Apparaat in oploadmodus:

-  Alle batterij-indicators knipperen om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
-  Brandende lampjes geven aan dat de batterij volledig is opgeladen.

Looptijd:

Zodra u het apparaat inschakelt, ziet u eerst het vacuümniveau. Na ongeveer 5 seconden wordt de looptijd weergegeven. 00 - 30 min. De kolf schakelt automatisch uit na 30 minuten gebruik.

Alkolfase:

De borstkolf gaat start met een rustiger en dieper zuigritme om de melk af te kolven.

Stimulatiefase:

Bij het starten schakelt de borstkolf automatisch naar een snelle zuigfase om de melkstroom te stimuleren.

Weergave van vacuümniveau (led):

De borstkolf beschikt over 9 instelbare vacuüm niveaus.

Knop aan/uit/pauze (led):

Lang ingedrukt houden om aan/uit te zetten. Kort indrukken om te pauzeren. Druk op een willekeurige knop om verder te gaan met de alkolfessie

Knop Toetschieten

Overschakelen tussen stimulatie- en alkolfase

Oplaadpoort

Knop vacuüm verhogen

Knop vacuüm verlagen

5.2 Batterij opladen

Laad het product volledig op voordat u het voor het eerst gebruikt. De Motion InBra™ draagbare borstkolf is uitgerust met een interne, oplaadbare lithium-accu. Bij het product wordt een oplaadkabel meegeleverd (USB-A naar USB-C). Let erop dat u een geschikte adapter gebruikt voor de USB-C-kabel. De ingangsspanning van de voedingsadapter is AC 100-240V 50/60 Hz en de uitgangsspanning is DC 5V 1A.

Wanneer de eerste accu-indicator knippert, betekent dit dat de accu bijna leeg is. U heeft nog ongeveer 30 minuten gebruikstijd over. Laad uw borstkolf op tijd op.

Wanneer de Motion InBra™ draagbare borstkolf volledig is

opgeladen, kunt u deze ongeveer 10 sessies gebruiken (circa 150 minuten), gebaseerd op 15 minuten per sessie per borst.


Laad de batterij op zoals hieronder beschreven:

1. Steek het USB-einde van de oplaadkabel in de USB-aansluiting van de voedingsadapter;
2. Steek de stekker van de voedingsadapter in het stopcontact;
3. Steek het Type-C uiteinde van de oplaadkabel in de oplaadpoort.

Het duurt ongeveer 150 minuten om het apparaat volledig op te laden. Als het apparaat klaar is, haalt u de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en koppelt u de kabel van de oplader los van de voedingsadapter.


6. Demontage van uw borstschild

1.

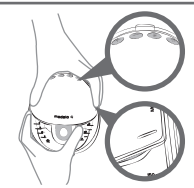

Verwijder de motorunit door deze aan beide zijden vast te houden en omhoog te tillen om hem los te maken van de alkolfset.

2.

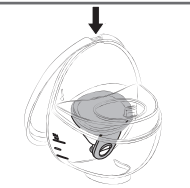

Maak het borstschild los van de container.

3.



Verwijder het membraan van het borstschild.

7. De juiste maat borstschild kiezen

WAARSCHUWING

Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op letsel te beperken:
 • Het is belangrijk om uw optimale maat borstschild te bepalen voor maximaal comfort en efficiënt afkolven. Een onjuiste maat borstschild kan de tepel/borst beschadigen en de melkproductie verminderen.

De Motion InBra™ draagbare elektrische borstkolf wordt geleverd met een 24 mm borstschild en inzetstukken van 15 mm, 18 mm en 27 mm. Extra borstschilden zijn verkrijgbaar in de maten 18 mm, 21 mm en 27 mm.


1. Meet met behulp van een liniaal of meetlint de diameter van uw tepel aan de basis in millimeters (mm).

2. Afhankelijk van de gemeten maat kiest u een borstschild dat iets groter is dan uw tepel.


3. Test de maat van uw borstschild om er zeker van te zijn dat het pompen comfortabel aanvoelt.

Meten mm


Tepelbasis

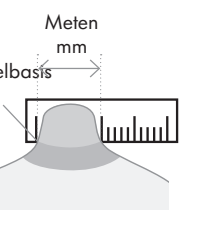


Borstschild is te klein.

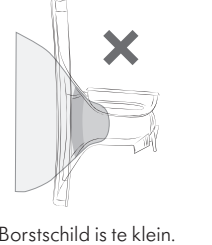

Goede pasvorm.

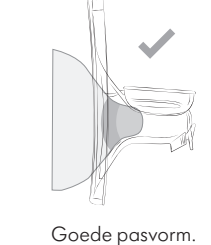

Borstschild is te groot.

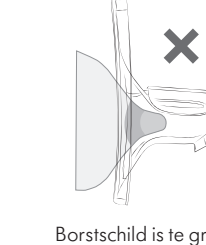

Als u niet zeker weet welke maat borstschild u nodig heeft, ga dan naar www.medela.com/fittingguide of raadpleeg een lactatiekundige/borstvoedingspecialist. Zij kunnen u helpen de juiste maat te vinden.

	11 mm of kleiner	12 mm, 13 mm of 14 mm	15 mm, 16 mm of 17 mm	18 mm, 19 mm of 20 mm	21 mm of groter
Inbegrepen	Inzetstuk 15 mm 	Inzetstuk 18 mm 	Inzetstuk 21 mm 	Borstschild 24 mm 	
Aan te schaffen accessoires		Borstschild 18 mm 	Borstschild 21 mm 	Borstschild 24 mm 	Borstschild 27 mm

Accessoires verkrijgbaar voor aankoop

Neem contact op met de klantenservice van Medela als u het gewenste accessoire niet kunt vinden. Ga voor contactgegevens naar www.medela.com en selecteer uw land. Neem voor het vervangen van onderdelen die u kwijt bent of die defect zijn contact op met de klantenservice van Medela. Andere producten van Medela vindt u op www.medela.com.

Artikelnummer	Product
Raadpleeg de plaatselijke website/ winkels voor informatie over de beschikbaarheid in uw regio. Inzetstukken zijn niet verkrijgbaar voor aankoop.	Motion InBra™ borstschilden 18 mm*
	Motion InBra™ borstschilden 21 mm*
	Motion InBra™ borstschilden 24 mm*
	Motion InBra™ borstschilden 27 mm*
	Motion InBra™ afkolfset
	Motion InBra™ membranen

* Als het resultaat van het afkolven onbevredigend is of als het afkolven pijnlijk is, raadpleeg dan uw lactatiekundige of borstvoedingsdeskundige. Wellicht kan een andere maat borstschild het comfort en de effectiviteit van het afkolven helpen vergroten.

8. Reinigen

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik geen antibacteriële of schurende reinigingsproducten voor het reinigen van de onderdelen van de borstschild, omdat deze beschadiging kunnen veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

- Dompel de motorunit, opblaaskabel of adapter nooit in water of in de vaatwasser, want dit veroorzaakt blijvende schade aan deze onderdelen.

Om de onderdelen van de borstschild schoon en hygiënisch te houden:

- Haal alle onderdelen die in aanraking komen met moedermelk direct na het gebruik uit elkaar en was ze af. Zo kunt u melkresten verwijderen en de groei van bacteriën tegengaan.
- Gebruik voor het reinigen en desinfecteren alleen leidingwater van drinkkwaliteit

LET OP

Pas op dat u tijdens het reinigen geen onderdelen van de borstschild beschadigt:

- Dompel de motorunit niet onder in water en giet of spray geen vloeistof rechtstreeks op de motorunit.
- Om aanslag van mineralen die zich na verloop van tijd afzetten, te voorkomen, wordt het aanbevolen om voor het koken van onderdelen gedestilleerd water te gebruiken.
- Als u na het koken witte resten op de onderdelen ziet, heeft het door u gebruikte water mogelijk een hoog mineraalgehalte.

i Informatie

Als u een vaatwasser gebruikt, kunnen onderdelen verkleuren. Dit heeft geen invloed op de werking van de onderdelen.

8.1 Reinigingsoverzicht

Motorunit	
	De motorunit is niet waterdicht. Niet onderdompelen in water. Neem af voor het eerste gebruik en indien nodig door de onderstaande stappen te volgen: - Koppel de borstkolf los van het stopcontact en sluit het klepje van de opblaaspoot. Controleer vóór reiniging of de borstschild is uitgeschakeld. - Neem af met een schone handdoek bevochtigd met warm zeepwater. - Neem af met een schone handdoek bevochtigd met koud water. - Droog af met een schone, droge handdoek.

Container, membraan, inzetstuk en borstschild

Demonteer en was alle onderdelen altijd **vóór het eerste gebruik en na elk gebruik**. Desinfecteer de gewassen onderdelen **vóór het eerste gebruik en eenmaal per dag na gebruik**.

Zie hoofdstuk 8.2 voor uitgebreide reinigingsinstructies.

Wassen is niet hetzelfde als desinfecteren. Deze activiteiten moeten afzonderlijk worden afgezonderd ter bescherming van uzelf, uw baby en de prestaties van uw borstkolf.

Was (vóór het eerste gebruik en na elk gebruik) – om de onderdelen te reinigen door fysiek melkresten en andere mogelijke verontreinigingen te verwijderen.

- Spoel de losse onderdelen, behalve de motorunit,** met koel water (circa 20 °C).
- Was de onderdelen grondig in ruim warm zeepwater** (circa 30°C). Gebruik een mild afwasmiddel.
- Spoel de onderdelen gedurende 10 tot 15 seconden met koud water** (circa 20°C).

OF

- In de vaatwasser wassen.** Plaats op het bovenste rek of in het bestekgedeelte in een positie die voorkomt dat de onderdelen water verzamelen.
- Spoel het zachte siliconen gele membraan** na het afwassen af onder stromend water.

Desinfecteer (vóór het eerste gebruik en eenmaal per dag na het gebruik) – om het aantal ziektekiemen dat aanwezig kan zijn op de oppervlakken van de gewassen onderdelen effectief te verlagen.

Kook de gewassen onderdelen ten minste 5 minuten. Zorg ervoor dat de onderdelen volledig zijn ondergedompeld in water en dat ze niet in direct contact staan met de bodem van de pot.

OF

Desinfecteer in de magnetron met Quick Clean™ magnetronzakken* volgens de voorschriften op de zakken. *Raadpleeg de plaatselijke website/winkels voor informatie over de beschikbaarheid in uw land.

Drogen – laat de gewassen en gedesinfecteerde onderdelen volledig drogen voordat u ze gebruikt of opslaat.

Laat de onderdelen op een schone, droge theedoek of keukenpapier aan de lucht drogen. Het is belangrijk dat al het achtergebleven vocht volledig opdroogt.

9. De borstkolf in elkaar zetten

WAARSCHUWING

- Wees voorzichtig: nadat u de onderdelen van de borstkolf heeft gekookt om ze te desinfecteren, kunnen ze erg heet zijn. Om brandwonden te voorkomen, mag u de borstkolf pas in elkaar zetten als de gedesinfecteerde onderdelen afgekoeld en droog zijn.
- Raak de binnenkant van de container niet aan.

WAARSCHUWING

Om de onderdelen van de borstkolf schoon en hygiënisch te houden:

- Was uw handen grondig met water en zeep voordat u de Motion InBra™ borstkolf of de borsten aanraakt.
- Droog uw handen af met een schone handdoek of met een papieren handdoek voor eenmalig gebruik.

Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op letsel te beperken:

- Inspecteer de afzonderlijke onderdelen vóór elk gebruik visueel op barsten, schade, scheuren, slijtage en reinheid. Gebruik in geval van schade de Motion InBra™ borstkolf niet totdat het/de defecte onderde(e)l(en) is/zijn vervangen.
- Zet de borstkolf alleen in elkaar met schone en droge onderdelen. Raadpleeg **hoofdstuk 8** voor het reinigen.
- Duur van de afkalfsessie: Dit product wordt aangedreven door een oplaadbare lithiumbatterij die, wanneer volledig opgeladen, ongeveer 10 sessies (circa 150 minuten) kan ondersteunen, gebaseerd op 15 minuten kolven per sessie. Een typische afkalfsessie duurt ongeveer 10-15 minuten per borst, maar kolf alleen zo lang als het voor u comfortabel en effectief is.

LET OP

De correcte plaatsing van het borstschild, het membraan, de melkcontainer en andere onderdelen is essentieel voor het creëren van een goed vacuüm tijdens het gebruik van de borstkolf.

1.

Was uw handen grondig met water en zeep.

2.

Bevestig eerst de vacuümklep van het gele membraan aan de voorkant van het borstschild. Druk daarna zachtjes op de bovenkant rondom de rand totdat het membraan goed afsluit op het borstschild. Bevestig het eendeelklemmenventiel aan de basis van het borstschild.

3.

Steek de schenkuit van het opvangreservoir in het borstschild en druk ze samen totdat u een klikgeluid hoort.

4.

Bevestig de motorunit aan de afkalfset.

De borstkolf is nu klaar voor gebruik.

10. Moedermelk afkolven

⚠️ WAARSCHUWING

- Schakel de borstkolf altijd uit voordat u de kolf van uw borst haalt, zodat het vacuüm wordt opgeheven.
- Blijf niet langer dan 5 minuten achter elkaar kolven als het niet lukt melk te krijgen. Probeer op een ander moment van de dag melk of te kolven.
- Stop met het gebruik van de borstkolf als het ongemak aanhoudt of wanneer er nogeneog geen melk afgekolfd wordt. Neem contact op met uw borstvoedingspecialist of professionele zorgverlener.

⚠️ WAARSCHUWING

- Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op letsel te beperken:**
- Melk afkolven hoort niet oncomfortabel te zijn. Zeer krachtig vacuüm, verkeerde positionering van de tepel of borstschild kan trauma aan de tepel/borst veroorzaken en de melkproductie verminderen. Pas de maat van het borstschild (zie hoofdstuk 7) en het vacuümniveau aan indien nodig.
 - Houd tijdens het kolven het melkpeil in de gaten om overloop te voorkomen. Zorg er vóór het kolven voor dat de kolf stevig en zonder openingen tegen uw borst is geplaatst.
 - Als u pijn ondervindt tijdens het afkolven, verbreek dan het vacuüm tussen de borst en het borstschild met uw vinger en verwijder de borstkolf van uw borst.

i Informatie

- **De stimulatiefase** is een snelle afkolmodus om de melkstroom te stimuleren.
- **De afkolfase** is een tragere afkolmodus voor het zacht en efficiënt verwijderen van melk.
- **Het maximaal comfortabel vacuüm (MCV)** is het hoogste vacuümniveau waarbij het afkolven nog comfortabel voelt. Dit is voor elke moeder anders en zal leiden tot het meest efficiënt afkolven van melk.
- In de afkolfase verhoogt u het vacuüm met de knop + totdat het afkolven enigszins onaangenaam aanvoelt (niet pijnlijk). Verlaag vervolgens het vacuüm met één druk op de knop –. Dit is uw MCV-niveau.
- Wanneer de Aan/UIT/Pauze-knop voor de eerste keer wordt ingedrukt, start de borstkolf automatisch de stimulatiefase op niveau 1, die 1 minuut duurt. Vervolgens gaat het apparaat over naar de afkolfase op niveau 2 en blijft de borstkolf 29 minuten werken, waarna het automatisch uitschakelt. Als er tijdens deze tijd handelingen worden uitgevoerd, worden de bijbehorende instellingen toegepast. Telkens wanneer de borstkolf de stimulatiefase start, schakelt deze na 1 minuut automatisch over naar de afkolfase.


10.1 De borstkolf bedienen

1.



De Magic InBra™ borstkolf kan worden gedragen met uw normale voedingsbh. Zorg ervoor dat de bh die u draagt de borstkolf stevig op zijn plaats houdt en vermijd overmatige druk op uw borst. Probeer het bh-bandje losser te maken of een rekbaardere bh te gebruiken als u ongemak ervaart.

2.

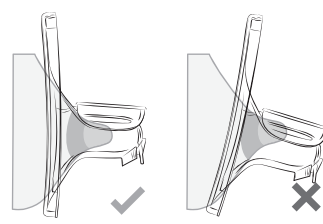

Plaats de pomp op uw borst. Zorg ervoor dat uw tepel gecentreerd is in de borstschildtunnel.

3.




Houd de kolf stevig tegen uw borst en houd de Aan/UIT/Pauze-knop ingedrukt. De eerste keer dat u de borstkolf gebruikt, start deze in de stimulatiefase. Het standaard vacuümniveau is niveau 1 [weergegeven op het vacuümniveaudisplay].

4.



Houd de borstkolf op zijn plaats door de flap van de voedingsbh over de borstkolf gebruikt, start deze in de stimulatiefase. Er zijn 9 niveaus beschikbaar in de afkolfase. Het led-display schakelt na 20 seconden inactiviteit uit. Druk op een knop om het weer aan te zetten.

5.

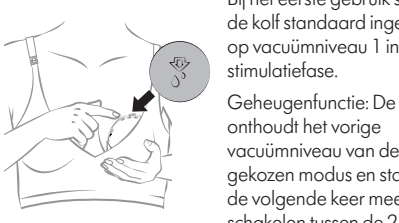

Selecteer de fase: Stimulatie of afkolmodus. Bij het eerste gebruik staat de kolf standaard ingesteld op vacuümniveau 1 in de stimulatiefase. Geheugenfunctie: De kolf onthoudt het vorige vacuümniveau van de gekozen modus en start daar de volgende keer mee. Om te schakelen tussen de 2 fasen, drukt u op de toeschietknop en laat u deze weer los.

6.



Stel het vacuüm in met de knop + en de knop – tot uw maximaal comfortabel vacuüms-niveau. Er zijn 9 niveaus beschikbaar in de **stimulatiefase**. Er zijn 9 niveaus beschikbaar in de **afkolfase**. Het led-display schakelt na 20 seconden inactiviteit uit. Druk op een knop om het weer aan te zetten.

Tip: Hogere vacuümdruk betekent niet altijd meer melk. Te veel druk op uw tepel kan de melkproductie verminderen. Zorg er altijd voor dat u op een comfortabel niveau afkolft. Als u geen melkstroom voelt, controleer dan of de borstkolf correct is gemonteerd.

10.2 De tepel opnieuw positioneren of van kant wisselen

De borstkolf kan zowel in de stimulatie- als de afkolfase worden gepauzeerd. U kunt dan een andere houding aannemen, de borstkolf opnieuw positioneren of even iets anders doen. Als u wilt pauzeren, drukt u op de Aan-/UIT-/Pauze-knop terwijl de borstkolf in werking is. De afkolactiviteit stopt en de looptijdweergave knippert. Als u het afkolven wilt hervatten, drukt u opnieuw op de knop Aan/UIT/Pauze.

i Informatie

De kolf is niet bedoeld om liggend of terwijl u slaapt te gebruiken. U kunt echter wel een beetje naar voren of naar achteren leunen tijdens het afkolven. Wij raden aan de afkolfase te stoppen zodra het volume in de opvangcontainer ongeveer 150 ml bereikt, om overloop te voorkomen. Giet na het afkolven de vers verkregen melk op tijd over in andere melkopvangflessen met dekfel of in melkbewaarzakjes.

11. Omgang met moedermelk


⚠️ WAARSCHUWING

- De kolfsset is uitsluitend ontworpen om melk op te vangen. Als u de baby moet voeden of de afgekolfde moedermelk moet bewaren, gebruik dan een flesje of bakje.

i Informatie

Gebruik de container niet voor opslag of transport van melk, want deze is niet ontworpen voor dit doel.

1.

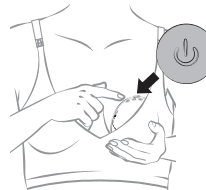

Zet de borstkolf uit: Houd de Aan/UIT/Pauze-knop 2 seconden ingedrukt om de kolf uit te schakelen.

2.



Verwijder de borstkolf voorzichtig uit uw bh: gebruik uw vinger om de afsluiting tussen het borstschild en uw borstweefsel los te maken. Leun na het kolven iets naar voren om de borstkolf van uw borst te verwijderen en houd het borstschild met de opening naar boven om te voorkomen dat melk morst.

3.



Verwijder de motoreenheid voordat u de melk uit de afkolfsset giet. **Giet de moedermelk via de schenkuit in een fles of container voor bewaring. Gebruik de afkolfsset niet om melk in te bewaren. Bewaar de afkolfsset niet in de koelkast of vriezer.** Neem de opvangcups na elk gebruik volledig uit elkaar voor reiniging en desinfecteer ze eenmaal per dag volgens de instructies in hoofdstuk 8.

Ga voor informatie over het bewaren en ontdooien van uw moedermelk naar www.medela.com

12. Onderhoud en verzorging

Kort bewaren

Plaats de borstkolf niet in direct zonlicht. Bewaar de borstkolf en accessoires op een veilige, schone en droge plek, buiten het bereik van kinderen.

Langdurige opslag

Laad de borstkolf op vóór langdurige opslag en vervolgens elke drie maanden om schade aan de accu te voorkomen en de levensduur te verlengen. Bewaar het uit direct zonlicht om verkleuring te voorkomen. Reinig de container, het borstschild, het membraan, het inzetstuk en de motor voordat u ze opbergt (zie hoofdstuk 8).

13. Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Kolf werkt niet	- Als de toeschietreflex nog niet is opgetreden, overweeg dan om de borstkolf langer op de borst te laten zitten om een mogelijke vertraagde toeschietreflex af te wachten. Let op: De aanvangstijd van de toeschietreflex is voor iedereen anders en wordt door veel factoren beïnvloed. - Controleer de positie van de tepel, pauzeer de kolf en haal deze van de borst. Reinig de borstkolf zoals beschreven in hoofdstuk 10.2. - Mogelijk gebruikt u niet de juiste maat borstschild of inzetstuk (zie hoofdstuk 7. Kies de juiste maat borstschild en inzetstuk).
Er komt geen melk	Pauzeer de borstkolf en haal deze van de borst. Plaats uw tepel in het midden van de tunnel van het borstschild en zet de kolf tegen uw borst (zie hoofdstuk 7. Kies de juiste maat borstschild en inzetstuk.)
Opnieuw positioneren	Pauzeer de borstkolf en haal deze van de borst. Plaats uw tepel in het midden van de tunnel van het borstschild en zet de kolf tegen uw borst (zie hoofdstuk 7. Kies de juiste maat borstschild en inzetstuk.)
Het afkolven voelt oncomfortabel	- Als u (te) veel ongemak ervaart, probeer dan het volgende: - Span uw bh aan zodat de borstkolf stevig tegen uw borst blijft zitten - Verlaag de vacuümkritiek - Positioneer de borstkolf opnieuw - Mischien kolt u iets te lang - Mogelijk is de maat van het borstschild niet correct - Stop met kolven en raadpleeg een arts of lactatiekundige (zie hoofdstuk 7. Kies de juiste maat borstschild en inzetstuk)
Afgenomen (lage) zuigkracht	- De borstkolf heeft 9 vacuümniveaus. Druk op de plusknop om het vacuüm te verhogen. - Controleer de staat van de wasbare onderdelen. Ze moeten na drie maanden gebruik worden vervangen. - Als dit niet werkt, probeer dan het volgende: 1. Controleer of de verbindingen tussen alle afwasbare onderdelen goed vastzitten. 2. Inspecteer alle wasbare onderdelen visueel en vervang ze als ze beschadigd zijn. 3. Controleer of het apparaat aanstaat. 4. Druk de borstkolf stevig tegen de borst aan.
Stop met kolven	De borstkolf stopt automatisch met kolven na 30 minuten. Druk kort op de knop Aan/UIT/Pauze om de borstkolf te pauzeren. Druk nogmaals om het kolven te hervatten.
De borstkolf blijft doorgaan	- Druk op de Aan/UIT/Pauze-knop. - Als het probleem aanhoudt, verbreek dan de afsluiting door een vinger tussen uw borst en het borstschild te steken. Houd de Aan/UIT/Pauze-knop vervolgens ingedrukt om de kolf uit te schakelen.
Borstkolf of oplader is niet geworden (ondergedompeld in water).	- Droog de kolf onmiddellijk af. Plaats de borstkolf rechtop met de oplaadpoort naar beneden en de zuigbediening naar boven, en laat het een nacht aan de lucht drogen. Gebruik de borstkolf of oplader 24 uur lang niet. - Neem contact op met de klantenservice.
Kolf laadt niet op.	Zorg ervoor dat de USB Type-C-kabel met standaard oplader (niet inbegrepen) volledig is aangesloten op de oplaadpoort van de borstkolf.
Footcode "E1"	De Type-C-ingang heeft een ingangsspanning gedetecteerd die hoger is dan 6,5 V en lager dan 24 V. Vervang door een geschikte adapter met een nominale uitgangsspanning van DC 5V voor opladen.

Neem contact op met de klantenservice van Medela als u het probleem met de borstkolf niet hebt kunnen oplossen of als u nog vragen heeft. Ga voor contactgegevens naar www.medela.com. Kies onder 'Land' uw land.

14. Garantie

De borstkolf bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Als u dit apparaat opent of ermee knoeit, vervalt de garantie. Ga voor meer informatie over de internationale garantie naar www.medela.com/twaranty.

15. Afvalverwijdering

De borstkolf wegwerpen

Haal aan het einde van de levensduur alle onderdelen van uw borstkolf uit elkaar. **Borstschild en container:** zijn gemaakt van plastic en metaal en moeten worden gerecycled. **Motorunit en voedingsadapter, inclusief USB-A- en USB-C-kabel, elektrische apparatuur** kunnen gevaarlijke stoffen bevatten en mogen niet samen met ongesorteerd gemeentelijk afval worden afgevoerd. De ingebouwde accu mag niet worden verwijderd om deze weg te werpen. Als de accu lekt, moet de borstkolf worden afgevoerd. Elektrische en elektronische producten (EEE) worden aangegeven met het volgende symbool:



In de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland moet de fabrikant of zijn leverancier afgedankte EEE-apparatuur terugnemen; andere landen kunnen soortgelijke inzamelings- en recyclingssystemen hebben. Dit apparaat bevat accu's die niet kunnen worden vervangen en niet mogen worden verwijderd voor afvoer.

LET OP

Voer het afgedankte apparaat af volgens de lokale voorschriften. Vraag in de winkel naar inzamelpunten voor afgedankte apparaten of neem hiervoor contact op met uw gemeente. Het atzonderlijk inleveren en recyclen van afgedankte apparaten helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en zorgt ervoor dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Voer oude accu's en accupacks af volgens de nationale milieuvoorschriften.

16. Betekenis van de symbolen

In de volgende tabellen worden de symbolen op de onderdelen en de verpakking van het product uitgelegd.

	Geeft de fabrikant aan.		Geeft een bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap/Europese Unie aan.
	Geeft de importeur aan.		Geeft het catalogusnummer aan.
	Geeft het serienummer aan.		Geeft het batch-/partijnummer aan.
	Geeft de productiedatum aan.		Algemeen veiligheidswaarschuwingssymbool, verwijst naar informatie betreffende de veiligheid.
	Uit de buurt van regen houden. In een droge omgeving bewaren.		Plaats het product niet in het zonlicht.
	De verpakking bevat producten die in contact mogen komen met levensmiddelen conform verordening (EG) nr. 1831/2004.		Geeft aan dat de inhoud van de transportverpakking kwetsbaar is en dat de verpakking moet worden gehanteerd met zorg.
	Geeft aan dat de verpakking gerecycled kan worden.		Geeft aan van welk materiaal een artikel is gemaakt.
	Voer elektrische/electronische apparaten niet samen met ongesorteerd gemeentelijk afval af (voer het apparaat af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving).		Dit geeft aan dat de gebruiksaanwijzing vóór gebruik geraadpleegd dient te worden.
	Definieert een relatief vochtigheidsbereik.		Definieert een temperatuurbereik.
	Definieert een luchtdruk.		Geeft de mate van bescherming tegen binnendingen van vreemde voorwerpen en vocht aan.
	Duidt gelijkstroom aan.		

Landspecifiek

	Geeft aan dat het product voldoet aan de EU-vereisten voor huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten.		Geeft aan dat een item technisch gezien kan worden gerecycled volgens de Franse AGEC-wet.
	Geeft aan dat het apparaat in het Verenigd Koninkrijk op conformiteit is beoordeeld.		De Regulatory Compliance-markering geeft conformiteit aan met Australische EMC- en radiotransmissievereisten.

Literatuur

- EN 60335-1:Safety of Household Appliance - Household Appliance Requirements.
- WEEE Directive - Waste from Electrical & Electronic Equipment - Directive 2012/19/EU
- Regulation (EC) No 765/2008 setting out requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93
- Restriction of Hazardous Substance (ROHS) – Directive 2011/65/EU
- EN IEC 55014-1:Electromagnetic Compatibility (Requirements for Household Appliance) – Emissions
- EN IEC 55014-2:Electromagnetic Compatibility - (Requirements for Household Appliances) – Immunity
- AS/NZS 60335.1 :Safety of household and similar electrical appliances - Part 1 - General requirements
- AS/NZS CISPR 11 : EMC Australia
- GB4706.1 :Household and similar electrical appliances- Safety- Part 1: General requirements
- GB4806.1 : National Food Safety Standards- General Safety Requirements for food contact materials and products
- GB4806.7: National Food Safety Standards Food Contact Plastic Materials & Products
- GB4806.11: National Food Safety Standards Food Contact Silicone Rubber Materials & Products
- GB9685: National Food Safety Standard for Uses of Additives in Food Contact Materials
- GB/T 39560: Determination of certain substances in electronic and electrical products.

17. Internationale voorschriften

17.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

De Motion InBra™ borstkolf voldoet aan alle vereisten van de relevante standaarden (EN IEC 55014-1 en EN IEC 55014-2) en regelgeving met betrekking tot elektromagnetische emissie en storingimmunitet.

⚠️ WAARSCHUWING

- Draagbare draadloze communicatieapparatuur zoals draadloze huishoudwerkapparatuur, mobiele telefoons, draadloze telefoons en hun basistations, walkietalkies, RFID, andere elektrische apparatuur en randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes kunnen de elektrische borstkolf beïnvloeden en moeten op een afstand van ten minste 30 cm van de borstkolf en de kabels worden gehouden. Anders zou dit kunnen leiden tot aantasting van de prestaties van de apparatuur.
- Het gebruik van USB-kabels, anders dan die door de fabrikant van dit apparaat worden meegeleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immunitet van deze vacuümpomp en kan een onjuiste werking tot gevolg hebben.
- Het gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld met andere apparaten moet worden vermeden, omdat dit tot een onjuiste werking kan leiden. Als dit toch nodig is, moeten deze apparatuur en de andere apparaten goed worden geïsoleerd om te bevestigen dat ze normaal functioneren.


⚠️ WAARSCHUWING

- Het gebruik van kortgolvlige diathermie, microgolfdiathermie, therapeutische ultrasone diathermie (hierna gezamenlijk 'diathermie' genoemd) en elektrocauterisatieapparaten nabij dit product kan storingen veroorzaken of de prestaties verminderen. Gebruik de draagbare borstkolf van Medela daarom niet in de nabijheid van deze apparatuur.

18. Technische specificaties

Overzicht van belangrijke technische specificaties

Voeding	DC 3.7 V / 1500mAh oplaadbare lithiumbatterij
Stroomvereisten	Ingangsstroom: DC 5V 1A Stroom: SW
Afmetingen kolf	135*115*76mm
Gebruiksduur van het product	250 uur
Geluidsniveau	≤45dB
Gewicht (met alle accessoires)	250g
Binnendringing beschermingsklasse	IP22
Vacuümprestaties:	Stimulatiefase: -80 tot -160 (+/-20) mmHg Afkolfase: -80 tot -280 (+/-20) mmHg
Cyclussnelheid	Stimulatiefase: 100-120 (+/-5) cpm Afkolfase: 35-75 (+/-5) cpm
Oplaadrijd van de batterij	Ongeveer 150 minuten
Gebruiksduur de batterij	Ongeveer 150 minuten
Type bescherming tegen elektrische schokken	Intern aangedreven apparaatuur

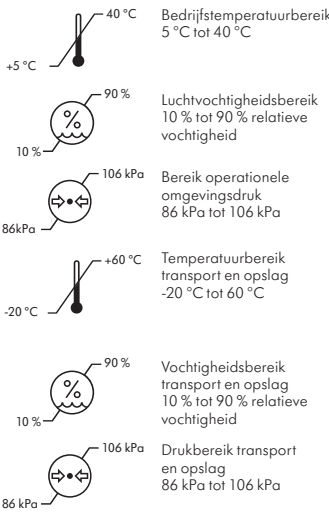

Materialen die in contact komen met de huid of de melk

- Borstschild: Polypropyleen
- Container: PP/TPE (Polypropyleen/Thermoplastisch elastomeer)
- Geel membraan: Silicone
- Motorunit: ABS (acrylonitril-butadiëenstyreen)
- Gele knoppen: Silicone
- Inzetstuk: Silicone

Alle onderdelen die met moedermelk in aanraking komen, bevatten geen BPA (Bisfenol A).

Aanbevolen specificaties voedingsadapter:

USB-A-voeding (niet meegeleverd)
5V / 1A DC
Voldoet aan de norm IEC 60335-1 en voldoet aan de regionale voorschriften voor stroombronnen.
USB-A- naar USB-C-kabel (meegeleverd), lengte: 1000 mm

19. Reizen of internationaal gebruik

De Motion InBra™ borstkolf kan internationaal worden gebruikt, mits deze wordt gebruikt en opgeslagen volgens de specificaties in deze gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat de voedingsadapter een ingangsspanning heeft van AC 100-240V 50/60 Hz en een uitgangsspanning van DC 5V 1A. Gebruik indien nodig een spanningsomzetter om het juiste voltage van het doelland aan te passen.



Medela Consumer AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com

EU-verantwoordelijke persoon/importeur:

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2
85386 Eching, Germany
www.medela.com/support



MCAG Ref. IFU Motion InBra NL - 07CF/V1.0