

Tick 2 - Zeckentferner

WICHTIG: Zecken sollten so schnell wie möglich entfernt werden, sobald man sie entdeckt. Dies verhindert das Infektionsrisiko. Bewahren Sie diese Anleitung immer mit dem Zeckentferner auf.

Beschreibung: Dieser Zeckentferner ist aus Plastik und hat keine beweglichen Teile. Er ist langlebig, hygienisch und leicht zu reinigen. Bei einer ordnungsgemäßen Anwendung kann die Zecke ohne Rückstände entfernt werden.

Anwendung

1. Reinigen Sie den Zeckentferner vor der Anwendung
2. Biegen Sie die Spitze des Zeckentfernens, wie es auf dem Titelbild abgebildet ist.
3. Halten Sie den Zeckentferner in einem Winkel von 30° bis 45° zu der Haut.
4. Legen Sie den Zeckentferner mit der großen Öffnung über die Zecke.
5. Schieben Sie den Zeckentferner sanft über die Haut, bis die Zecke vom schmalen Ende erfasst wird.
6. Ziehen Sie gleichmäßig weiter. Die Zecke wird am Kopf von dem keilförmigen Schlitz eingeklemmt und von der Haut entfernt.
7. Reinigen Sie den Zeckentferner und die Hautstelle um den Zeckenbiss nach der Entfernung. Wenn Sie vermuten, dass der Biss Sie infiziert hat, kontaktieren Sie bitte einen Arzt

Die Entfernung der Zecken geschieht schnell und ohne vorherige Berührung. Dadurch hat die Zecke keine Gelegenheit, Stoffe in die Bißstelle abzugeben. Beobachten Sie in den kommenden Tagen aufmerksam die betroffene Hautstelle nach Infektionssymptomen und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt bzw. Veterinär auf.

Mikroorganismen die von Zecken übertragen werden:

Borrelia-spezies, Anaplasma phagocytophilum, Francisella-spezies, Rickettsia-spezies, Coxiella burnetii, Bartonella-spezies, Brucella-spezies, Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Babesia-spezies und FSME (virus).

Hersteller:
Nitab AB
Sanneröd Lerdalen 2
SE-456 91 KUNGSHAMN
Sweden
www.nitab.se
info@nitab.se



Vertrieb in
Deutschland:
GRUBE KG
Hützeler Damm 38
29646 Bispingen
www.grube.de

