

☎ 0031-85-902 02 66



HANDLEIDING SLIP PERFECT

STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG AANTREKKEN

1



Vouw de smalle kant van de Slip Perfect ter grootte van uw voet naar u toe

2



Steek de slip op de hiernaast getoonde manier in de opening van uw kous waarna u uw voet hierin steekt

3



Zorg dat uw voet op deze manier in de kous zit

4



Trek uw kous over de voet en daarna verder over uw been

5



Pak het groene gedeelte beet en trek de Slip Perfect onder de kous vandaan

TIP

Gebruik speciale handschoenen en een anti-slip mat bij het aantrekken en uittrekken



Handschoenen
natuurrubber

art nr.
S 4010
M 4011
L 4012



Anti-slip mat
art nr. 3040

ZELFSTANDIG UITTREKKEN



Steek uw voet in de slip en draai de Slip Perfect twee slagen om uw been heen



Vouw uw kous over de Slip Perfect heen, zorg ervoor dat u de slip niet aanraakt

Let op!

Bij het uittrekken van de kous, trek alleen aan de kous zodat hij makkelijk uitglijdt over de slip heen

KUNT U NIET MEER BIJ UW VOETEN?

Wij bieden ook onderstaande producten aan voor het aan-en uittrekken van steunkousen



Dressbuddy aan/uit
art nr. 2001



Ort.O.Mate
art nr. 3070

BESTELLEN?

sales@eritekbv.nl
of 0031-85-902 02 66

ALGEMENE INFORMATIE

WASSEN

Wassen op handwasprogramma, max 30°

CONTACT

Website
www.eritek.nl

MAIL
sales@eritekbv.nl

TELEFONISCH
Op werkdagen kunt u ons van 9:00 - 17:00 uur bereiken
op tel: 0031-85-902 02 66

“IK BEN WEER ZELFSTANDIG”

Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

