

# Handleiding

Digitale dementieklok met XL beeldscherm



# Hoe te gebruiken

---


Stap 1: Haal de klok en de lichtnetadapter uit de doos

Stap 2: Sluit de lichtnetadapter aan op de achterzijde van de dementieklok.

Stap 3: Sluit de lichtnetadapter aan op het stopcontact.

Stap 4: Binnen enkele seconden zal het apparaat opstarten en de tijd, datum en dagdeel weergeven.

Stap 5: Zet de klok op een mooi plekje in uw huis, en geniet van uw aankoop.

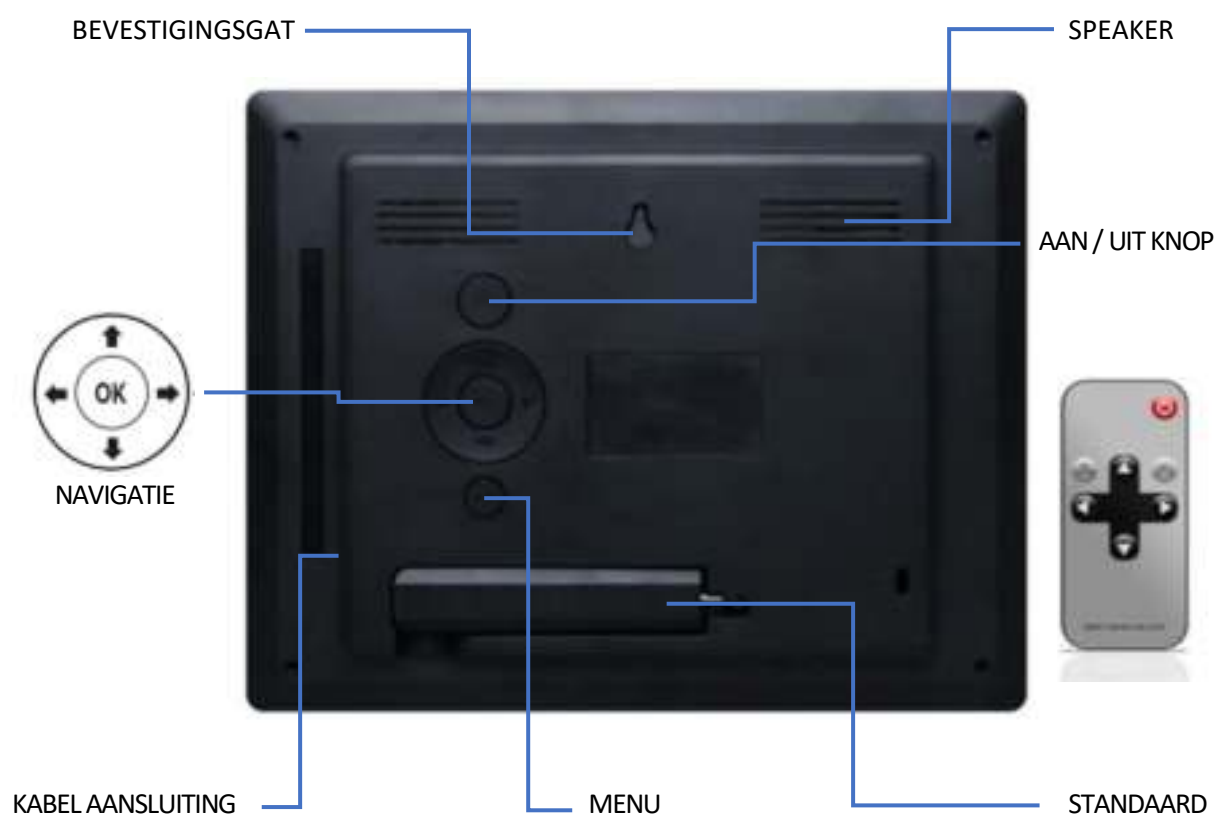

# De dementieklok instellen

---



## Tijdstelling

Druk op de menuknop om naar de instellingen te gaan, en selecteer tijdstellingen. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om het juiste nummer in te stellen. Wanneer de juiste tijd heeft ingesteld drukt u op OK. Druk op de menu knop om terug naar de hoofdmenu te gaan

## Datum instellen

Ga naar de regel datum instellen, druk op OK om de dag, datum of jaar te onderstrepen. Druk omhoog of omlaag om aan te passen. Druk vervolgens nogmaals op OK om op te slaan en druk op MENU om af te sluiten.

## Tijd-modus

Navigeer naar de regel tijd-modus, druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke modus ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen 12 uursklok en 24 uursklok. Druk op MENU om af te sluiten.

## Datamodus <dag-maand-jaar> - <maand-dag-jaar> - <jaar-maand-dag>

Er kan gekozen worden tussen Amerikaanse weergave (maand-dag-jaar) of Europese weergave (dag-maand-jaar). Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

### Taal

Druk op MENU om instellingen te openen, en navigeer naar de lijn TAAL. Selecteer de juiste taal door naar links op de rechts te drukken, er kan gekozen worden tussen 8 verschillende talen: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Pools, Nederlands en Cymraeg.

### Automatisch dimmen

Druk op de MENU om te navigeren naar de instellingen. Druk op de pijltoets naar beneden om de lijn tekst AUTOMATISCH DIMMEN te selecteren. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke modus ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen: midden, laag, uit.

Midden: vanaf 07:00 uur in de ochtend is de helderheid van het scherm 50cd/m<sup>2</sup>, om 19:00 uur in de avond schakelt het scherm over op een helderheid van 10 cd/m<sup>2</sup>.

Laag: vanaf 07:00 uur in de ochtend is de helderheid van het scherm 50cd/m<sup>2</sup>, om 19:00 uur in de avond schakelt het scherm over op een helderheid van 5 cd/m<sup>2</sup>.

Uit: de gehele dag staat de helderheid van het scherm op 50cd/m<sup>2</sup>.

### Volume

Druk op de MENU om te navigeren naar de instellingen. Druk op de pijltoets naar rechts of links om het volume aan te passen (L1-L5).

### Alarm instellingen

Navigeer naar de alarm set, druk op OK. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welk veld bewerkt moet worden. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om de juiste tijd in te stellen. Als u tevreden bent met de gemaakte instellingen drukt u nogmaals op OK om de instellingen op te slaan. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om te navigeren naar andere instellingen

### Alarm frequentie

Druk op de menuknop om te navigeren naar het alarm frequentie. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke frequentie ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen de volgende frequenties: uit, eenmaal, elke dag of maandag tot en met vrijdag. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om te navigeren naar andere instellingen.

### Specificaties:

*Afmetingen:* 216 x 171 x 20 mm

*Schermgrootte:* 160 x 120 mm (8 inch)

*Achtergrondlicht:* LED

*Beeldverhouding:* 4:3

*Resolutie:* 1024 x 768

*Lichtnetadapter:* 100-240V

*Uitgang lichtnetadapter:* 5V