

PAVIS S.p.A.

Sede Legale:

Via G. Rossini, 11/B - 21020 Buguggiate (VA)

Tel. (+39) 0332 45 54 63

Fax (+39) 0332 45 97 48

www.pavis.it - info@pavis.it

pavispec@certimprese.it

R.I. / C.F. / P.IVA 01286640121

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo le norme ISO 9001, ISO 13485

Management system standards certified according to ISO 9001, ISO 13485

ⓘ PAVIS S.p.A. - Dichiaro che il prodotto:

FASCIA PER ERNIA OMBELICALE E ADDOMINALE

basic UDI-DI 80287180000040MK

è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 riguardante i DISPOSITIVI MEDICI di classe 1

ⓘ PAVIS S.p.A. - Hereby declares that the:

ABDOMINAL AND UMBILICAL HERNIA BINDER

basic UDI-DI 80287180000040MK

comply with the EU Medical Device Regulation 2017/745 (class 1 MD)


1 - INDICAZIONI D'USO

- Contenzione dell'ernia ombelicoadddominale

2 - CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

Il modello scelto deve rispondere alle necessità individuate dallo specialista / tecnico ortopedico a seconda del quadro clinico. L'utilizzo della fascia dovrebbe limitarsi al periodo necessario, evitando di indossarlo per lungo tempo soprattutto se alla massima tensione, per non indebolire i muscoli addominali. Non indossare il dispositivo creando pressioni su parti del corpo che presentano lesioni gonfiori e tumefazioni. Preferibile indossarlo sopra una maglietta intima di cotone. Trattandosi di un prodotto NON INVASIVO, composto prevalentemente da materiali non allergici, non sono mai stati riscontrati effetti collaterali di alcun genere.

3 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- Prima di procedere, agganciare le parti in velcro



Questo dispositivo non è biodegradabile e anche se costituito di materiale di origine naturale, AL TERMINE DELLA SUA VITA UTILE NON PUÒ ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. SMALTIRE INSIEME AI NORMALI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

CE