

INTRODUCTIE

U start een swab afname - vaginaal.

Kies een rustig moment en neem de tijd om de afname te doen. Deze test voert u uit door middel van een vaginale afname. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe u de afname uitvoert.

Let op: SOA's hebben een incubatietijd (de tijd tussen de besmetting en de eerste klinische symptomen).

Als u eerder test dan de incubatietijd bestaat het risico dat de SOA niet wordt aangetroffen; u test dan vals-negatief. Wij raden u aan om de volledige incubatietijd af te wachten als u geen klachten ervaart.

1

WAS UW HANDEN


Was uw handen met warm water en zeep. Droog uw handen met een schone handdoek.



OPEN HET BUISJE

Ga aan tafel zitten. Open het buisje door aan de dop te draaien. Raak de (glimmende) bovenkant van de dop niet aan. Leg de dop naast het buisje. Plaats het buisje in de ronde opening van de doos (buishouder), zodat deze niet omvalt.


Let op: mors de inhoud van het buisje niet. Als er vloeistof is gemorst dient u een nieuwe afnameset te bestellen.

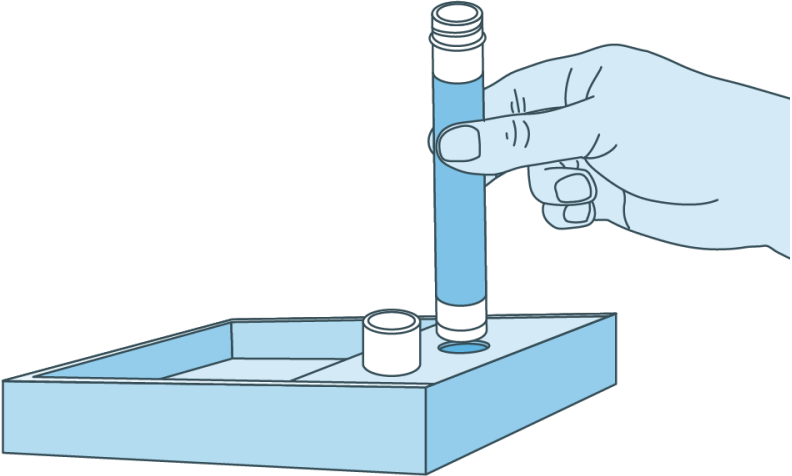

OPEN DE VERPAKKING VAN HET WATTENSTAAFJE

Open gedeeltelijk de verpakking van het wattenstaafje.

Let op: raak de zachte punt van het wattenstaafje niet aan en leg deze ook niet neer.

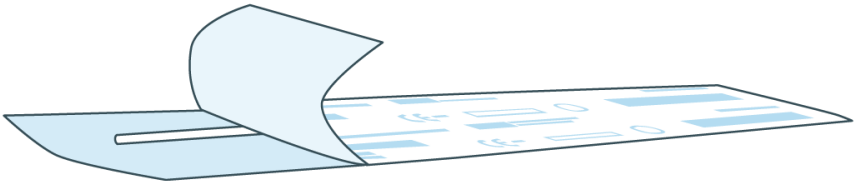


DOE DE AFNAME

Breng het wattenstaafje voorzichtig in de vagina tot ongeveer 5 cm diep.

Let op: Doe dit niet verder dan de afbreeklijn van het wattenstaafje.


Draai het wattenstaafje voorzichtig 10 tot 30 seconden lang heen en weer. Zorg ervoor dat het wattenstaafje de vaginawand raakt zodat het vocht opneemt. Trek het wattenstaafje voorzichtig terug en plaats deze in het buisje.

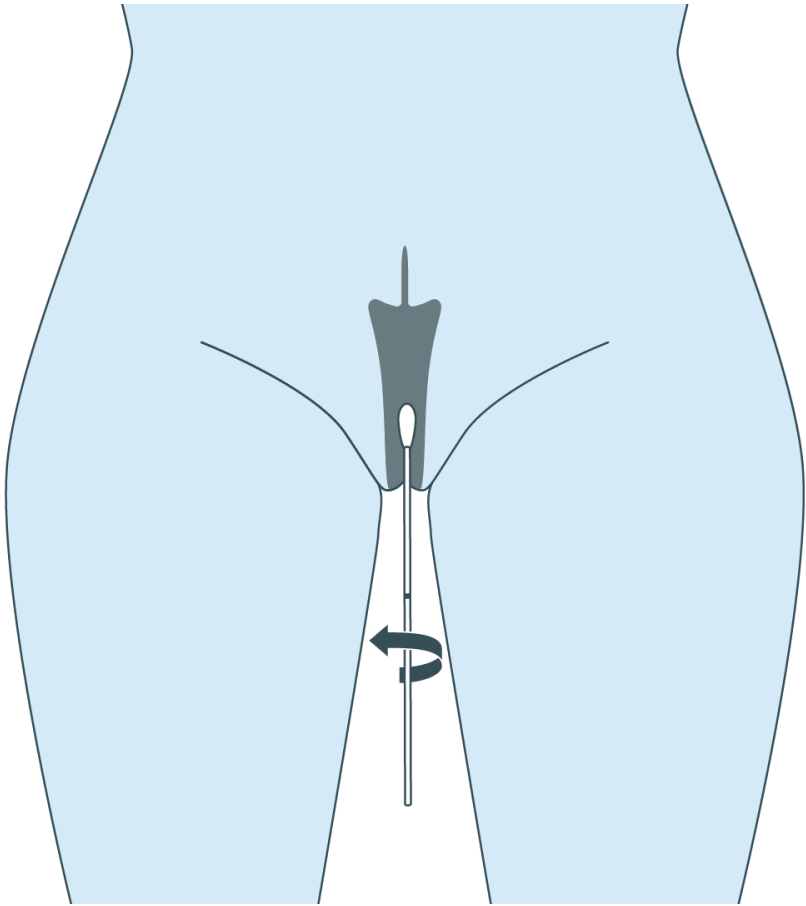

5


BREEK HET WATTENSTAAFJE AF

Breek de helft van het wattenstaafje voorzichtig af in het buisje (op de afbreeklijn). Gooi het gedeelte zonder watje, de bovenste helft van het wattenstaafje, weg.

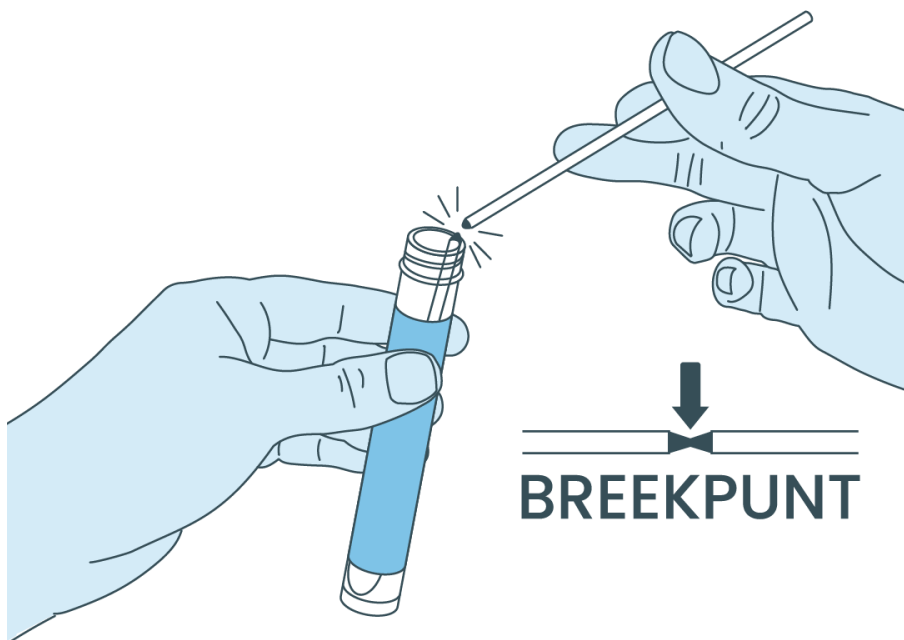

SLUIT HET BUISJE


Draai het dopje op het buisje en sluit deze. Controleer of het buisje goed is gesloten.

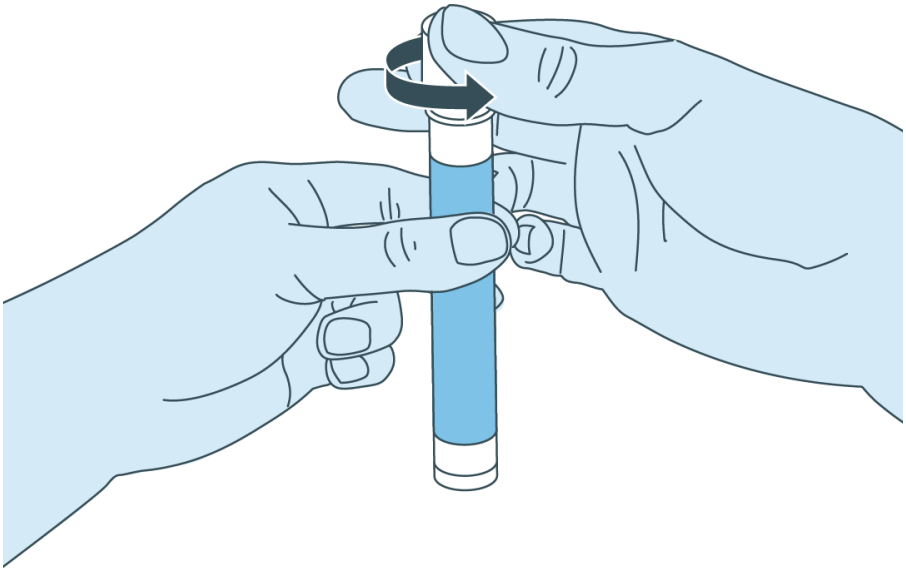

7


PLAATS HET BUISJE IN DE SAFETYBAG

Plaats het buisje tussen de harde plastic delen van het lekvrije zakje (SafetyBag). Verwijder de plakstrip en sluit de SafetyBag.

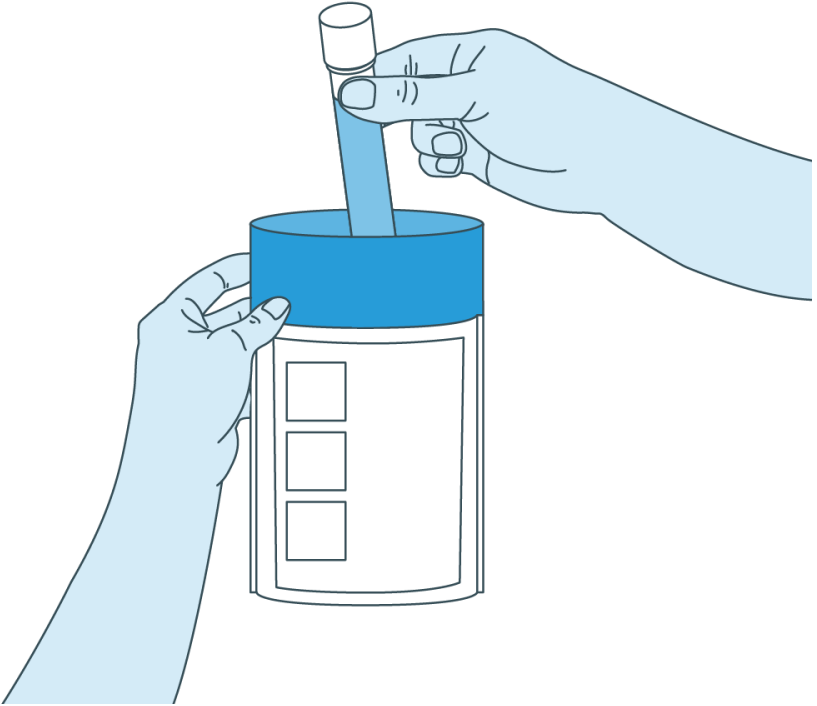

DOE DE SAFETYBAG IN DE RETOURENVELOP

Doe de SafetyBag in de retourenvelop. Verwijder de plakstrip van de retourenvelop en sluit deze.

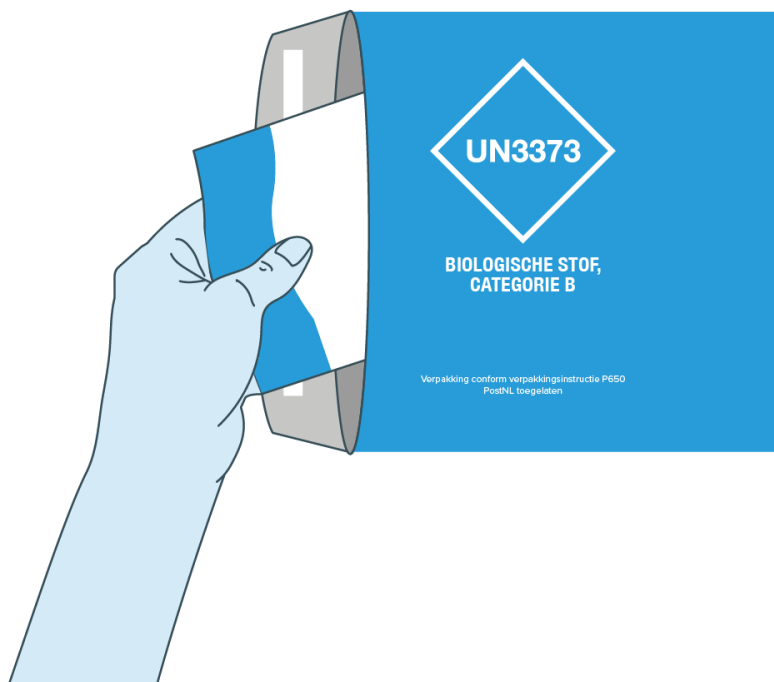

VERZEND DE ENVELOP

Verzend de envelop zo snel mogelijk via de reguliere PostNL brievenbus.

[Klik hier](#) om de dichtstbijzijnde PostNL brievenbus te vinden.

