

# INTRODUCTIE

U start een urine afname.

Kies een rustig moment en neem de tijd om de afname te doen. Deze test voert u uit door middel van een urine afname. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe u de afname uitvoert.

Als u eerder test dan de incubatietijd bestaat het risico dat de SOA niet wordt aangetroffen; u test dan vals-negatief. Wij raden u aan om de volledige incubatietijd af te wachten als u geen klachten ervaart.

---

1

## WAS UW HANDEN

Was uw handen met warm water en zeep. Droog uw handen met een schone handdoek.




---

2

**VOUW HET URINEBAKJE OPEN**


Neem het nog dichtgevouwen urinebakje en vouw deze open door op de witte cirkels te drukken. Zorg ervoor dat de onderkant goed in elkaar schuift. Neem daarnaast het pipetje.

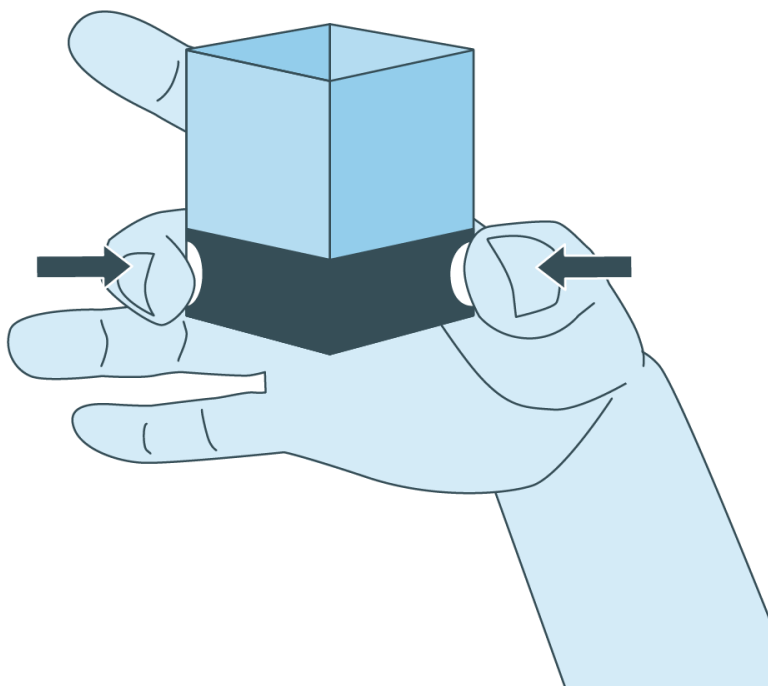

## OPEN HET BUISJE

Ga aan tafel zitten. Open het buisje door aan de dop te draaien. Raak de (glimmende) bovenkant van de dop niet aan. Leg de dop naast het buisje. Plaats het buisje in de ronde opening van de doos (buishouder), zodat deze niet omvalt.

**Let op:** mors de inhoud van het buisje niet. Als er vloeistof is gemorst dient u een nieuwe afnameset te bestellen.

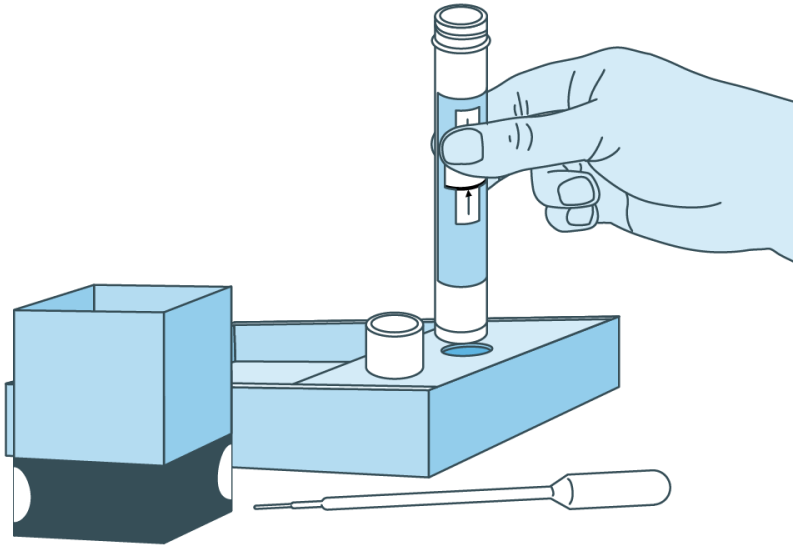


4

**DOE DE AFNAME**

Ga naar het toilet en urineer in het urinebakje tot deze in ieder geval voor de helft vol zit met uw urine.


**Let op:** vrouwen mogen de schaamlippen niet reinigen voordat ze het monster afnemen.

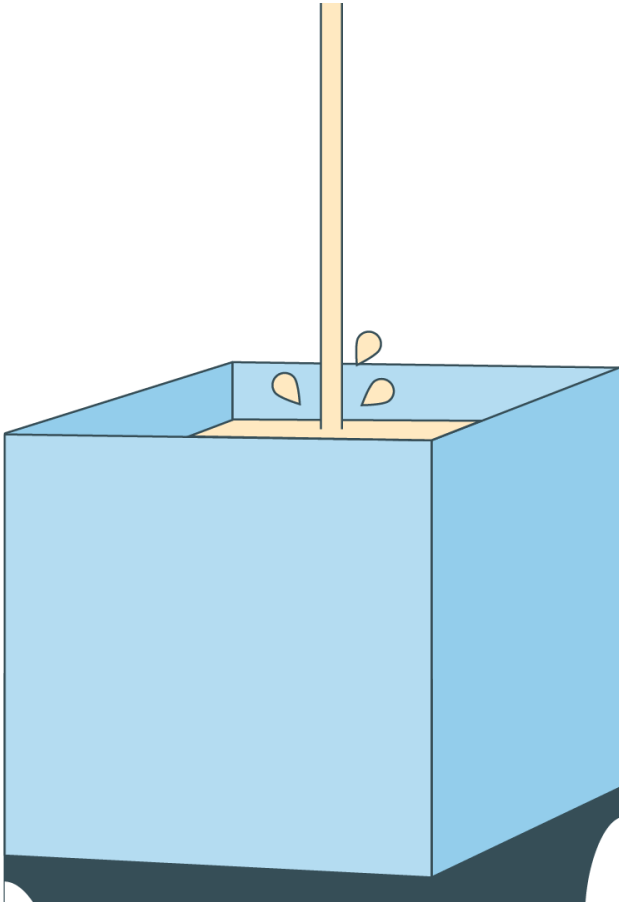

## VUL HET URINEBUISJE

Vul het transportbuisje met urine uit het urinebakje totdat het buisje minimaal voor de helft vol is met urine; tussen de twee zwarte vulstreepjes. U kunt dit doen door gebruik te maken van de bijgeleverde wegwerppipet, of eventueel door het direct over te gieten.

**Let op:** zorg ervoor dat de urine niet te ver boven het bovenste vulstreepje uitkomt (bij te veel urine kunnen wij de analyse niet uitvoeren).

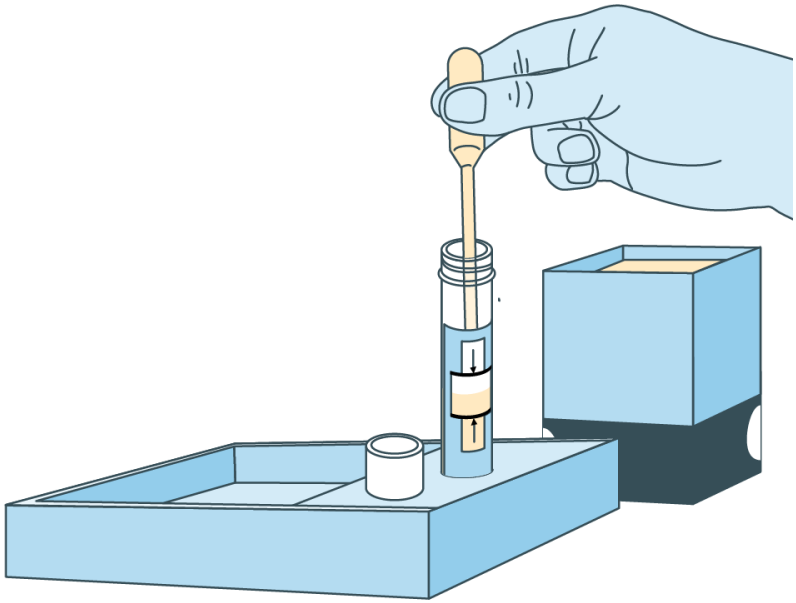


---

6

**SLUIT HET BUISJE**




Doe het dopje op het buisje en sluit deze. Controleer of het buisje goed is gesloten.

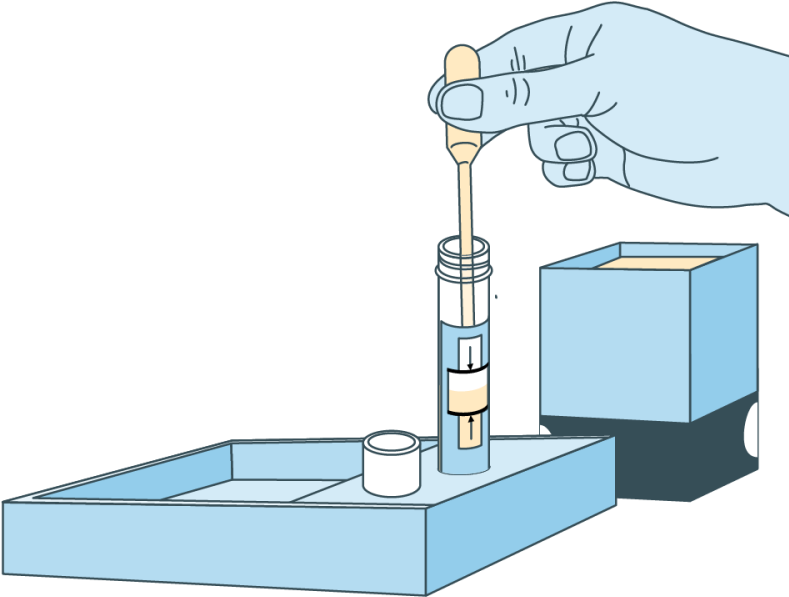

# PLAATS HET BUISJE IN DE SAFETYBAG

Plaats het buisje tussen de harde plastic delen van het lekvrije zakje (SafetyBag). Verwijder de plakstrip en sluit de SafetyBag.

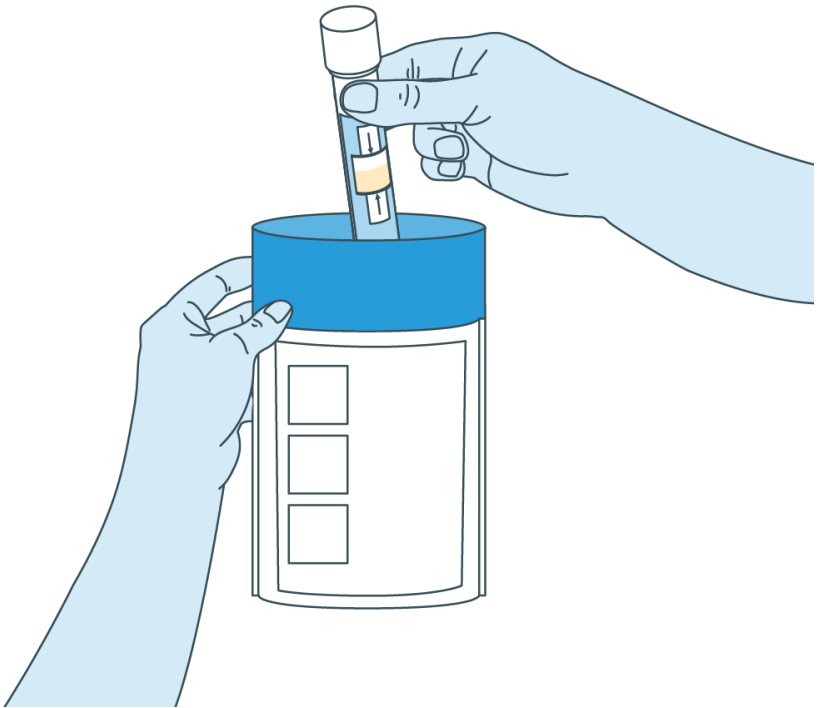

---

8

## **DOE DE SAFETYBAG IN DE RETOURENVELOP**

Doe de SafetyBag in de retourenvelop. Verwijder de plakstrip van de retourenvelop en sluit deze.



---

9

**VERZEND DE ENVELOP**

Verzend de envelop zo snel mogelijk via de reguliere PostNL brievenbus.

[Klik hier](#) om de dichtstbijzijnde PostNL brievenbus te vinden.

