

Gebruiksaanwijzing

Rechter Oor



Rechter Oor Reinigen

- Verwijder de handgreep (al voorzien met een opzetstuk) uit de opbergdoos.
- Steek de punt voorzichtig en zachtjes in het rechteroor. Forceer de tip niet te ver in het oorkanaal.
- Draai in de richting van de pijl op de handgreep om oorsmeer op te vangen. Draai niet in de andere richting.
- Om letsel te voorkomen, niet gebruiken tijdens het bewegen.

Linker Oor



Linker Oor Reinigen

- Steek de punt voorzichtig en zachtjes in het linkeroor. Forceer de tip niet te ver in het oorkanaal.
- Draai in de richting van de pijl op de handgreep (omgekeerde richting van het rechteroor) om oorsmeer op te vangen. Draai niet in de andere richting.
- Om letsel te voorkomen, niet gebruiken tijdens het bewegen.
- Bewaar de handgreep in de opbergdoos wanneer deze niet in gebruik is.

⚠️ WAARSCHUWING

- Dit product mag niet worden gebruikt bij kinderen onder de 12 jaar.
- Dit product mag niet worden gebruikt bij personen met oorbuisjes.
- Niet gebruiken als u pijn, ongemak, gehoorverlies, druk of bloeding ervaart.

⚠️ WAARSCHUWING

- Mag **NIET** worden gebruikt in de volgende situaties zonder toezicht van een arts:
 - Personen die lijden aan het syndroom van Ménière of enige vorm van duizeligheid, vertigo, gehoorverlies of andere oorproblemen hebben.
 - Personen met oorinfecties.
 - Personen met buisjes in hun oren.
 - Personen die een mastoïdoperatie hebben ondergaan.
 - Personen met een geperforeerd of voordien geperforeerd trommelvlies.

⚠️ VOORZICHTIG

- Als u van plan bent de spiraaltips opnieuw te gebruiken, vergeet dan niet om ze met warm zeepsop te wassen voordat u ze opnieuw in de handgreep of de opbergdoos plaatst.

⚠️ VOORZICHTIG

- **POR, PRIK OF FORCEER NIET IN UW OOR. DIT PRODUCT IS NIET VOOR BEDOELD VOOR DIEPE PENETRATIE IN HET OORKANAAL. OORWAS WORDT GEPRODUCEERD IN DE BUURT VAN DE INGANG VAN DE GEHOORKANAAL, BEKEND ALS DE "BUITEN GEHOORGANG"**
- **EEN PROP OORWAS MOET WORDEN VERWIJDERD DOOR EEN PROFESSIONELE GEZONDHEIDSMEDEWERKER.**
- **DRAAI ALLEEN IN DE RICHTING DIE WORDT AANGEGEVEN OP DE HANDGREEP OF ANDERS KAN ERNSTIG LETSEL HET GEVOLG ZIJN.**



Lees alle instructies grondig voor gebruik!

Let voor het gebruik op de pijlen op de handgreep. Deze pijlen geven de richting aan waarin de handgreep gedraaid moet worden. De handgreep mag niet in de tegenovergestelde richting worden gedraaid of heen en weer worden getwist.

Als de handgreep verkeerd wordt gebruikt, kan dit een ernstig letsel veroorzaken.

