

PHYSIOMER[®]

Baby Spray

WANNEER PHYSIOMER[®] Baby GEBRUIKEN?

Ter hygiëne en preventie van neusinfecties:
spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 1 tot 2 keer per dag.

Als behandeling bij neusklachten in geval van verkoudheid of ontsteking* van de neus-keelholte:

spray 1 tot 2 seconden per neusholte, 4 tot 6 keer per dag.

*Wanneer dit door een arts is vastgesteld.

GEBRUIKSWIJZE

Voor gebruik: controleer of de verstuiver goed werkt.

1. Leg de baby neer op een licht hellende (30°) ondergrond en leg zijn/haar hoofdje opzij (nooit naar achteren om te voorkomen dat het verkeerd in de keel terecht komt).
2. Breng de verstuiver voorzichtig in het bovenste neusgat.
3. Druk stevig gedurende 1 à 2 seconden.
4. Laat enkele seconden inwerken.
5. Herhaal dit in het andere neusgat.
6. Zet de baby rechtop en veeg de neus af of gebruik een neusaspirator.
7. Was de verstuiver na elk gebruik met warm water en droog het daarna goed af.



Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking vermeld staat.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.



CE 0459
Medisch hulpmiddel