

GEBRUIKSAANWIJZING ZWANGERSCHAPSTESTSTRIP (25mIU/ml)

Zelftest en alleen voor in-vitro-diagnostisch gebruik


De zwangerschapstest van Telano is eenvoudig thuis uit te voeren. De test detecteert het humaan choriongonadotrofine (hCG) in je urine. Je lichaam begint met het produceren van het hCG-hormoon zodra je zwanger bent. Bij een vroege zwangerschap neemt het zwangerschapshormoon in de eerste dagen snel toe. Het hormoon verdubbelt zich elke 2 à 3 dagen en bereikt zijn piek tussen de 7 à 12 weken zwangerschap (100.000 mIU/ml tot 288.000mIU/ml). De Telano-zwangerschapstest is erg gevoelig waardoor u al 4 dagen voor de verwachte menstruatie voor het eerst kan testen. De Telano zwangerschapstest geeft een positief resultaat bij een hCG-gehalte vanaf 25mIU/ml. Wanneer u test op de dag van de uitgebleven menstruatie, dan kunt u op elk gewenst moment van de dag de test uitvoeren. Test u eerder, dan raden wij aan om ochtendurine te gebruiken omdat de concentratie hCG dan hoger is. Vermijd het te veel drinken, voordat u start met testen.

De resultaten van deze test zijn zeer betrouwbaar (>99%) en gemakkelijk af te lezen van het controlevenster. Lees voor gebruik aandachtig deze handleiding door.

Testprocedure

1. Haal de strip uit de verpakking.
2. Vang wat urine op in een schoon bakje of bekertje
3. Dompel de strip in de urine met het pijluiteinde in de richting van de urine.
Let op! De strip mag niet verder dan de MAX-streep ondergedompeld worden.
4. Houd de strip tenminste voor 15 seconden in de urine zodat de strip voldoende urine bevat.
5. Leg de test op een vlakke niet-absorberende ondergrond met het testvenster naar boven.
6. U ziet nu dat er in het testvenster 1 of 2 lijnen tevoorschijn komen. Lees tussen de 1 en 5 minuten het testresultaat af.


Let op: wacht niet langer met beoordelen van de testresultaten dan 5 minuten. Deze uitslag kan namelijk ongeldig zijn.

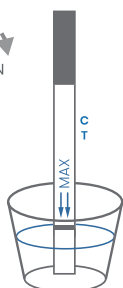

1 DOMPEL DE TEST IN DE URINE

2 LEG DE TEST OP EEN VLAKE ONDERGROND

Dompel de strip niet verder dan de MAX-streep

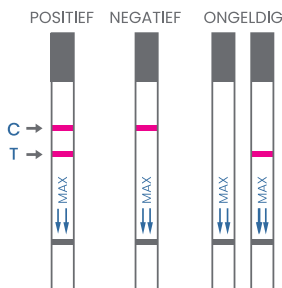

3

LEES HET RESULTAAT BINNEN 5 MINUTEN

Resultaat

Negatief (niet zwanger): Als alleen de controlelijn (C) verschijnt, kunt u ervan uitgaan dat u niet zwanger bent. Er verschijnt geen lijn in het (T) testvenster.

Positief (zwanger): Er verschijnt één controlelijn (C) en één testlijn (T).

Let op: De kleurintensiteit van de (C) en (T) lijn kan variëren. Ook een licht gekleurde (T) lijn is positief. De kleurintensiteit van de (T) lijn kan variëren omdat de concentratie van het hCG-hormoon in verschillende stadia van de zwangerschap anders is.

Ongeldig: Er verschijnt geen controlelijn (C). Herhaal de test met een nieuwe test. Het kan zijn dat er niet genoeg urine is geabsorbeerd. Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met Telano.

Verpakkingsinhoud

1. Telano-zwangerschapsteststrip
2. Droogmiddel
3. Bijsluiters

Benodigdheden

1. Klok of timer
2. Schoon bakje

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze bijsluiters goed door voordat u begint met testen.
2. Alleen voor in-vitro diagnostisch gebruik
3. Alleen voor extern gebruik, niet doorslikken
4. Gebruik deze test niet na de houdbaarheidsdatum.
5. Open het foliezakje pas wanneer u klaar bent om te testen. Gebruik de test niet wanneer u ziet dat het foliezakje is beschadigd of al open is.
6. Deze test is niet geschikt voor hergebruik. Na gebruik kan de test bij het afval.
7. Raak de absorberende strip van de test niet aan. Houd de test vast bij de duimgreep.
8. Houd deze test buiten het bereik van kinderen.

Bewaren

De Telano-zwangerschapstest moet worden bewaard in het ongeopende foliezakje bij een kamertemperatuur tussen de 4 en 30°C en uit de buurt van hitte of vocht. Vries de test niet in.

Beperkingen

1. Vermijd veel drinken voordat u de test uitvoert.
2. Met deze zwangerschapstest kunt u 4 dagen voor de verwachte menstruatie voor het eerst beginnen met testen. Echter bij een zeer vroege zwangerschap is het Hcg-hormoon in een zeer lage concentratie aanwezig in de urine. Hierdoor kan het resultaat negatief zijn. Wanneer u vermoedt toch zwanger te zijn, herhaal dan de test na 2-3 dagen.
3. Heeft u negatief resultaat, maar vermoedt u toch zwanger te zijn, neem dan contact op met een arts.
4. Vruchtbaarheidsmedicijnen met hCG kunnen misleidende resultaten geven.
5. Na een bevalling, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of miskraam kan het ongeveer 8 weken duren voordat het HCG-hormoon volledig uit je lichaam is verdwenen. Hierdoor kunt u positief testen, terwijl u niet zwanger bent. Raadpleeg in dit geval een arts voor het interpreteren van het testresultaat.
6. Alcohol kan een verstrende werking hebben op het resultaat van de test. Vermijd daarom het drinken van alcohol voordat u de test uitvoert.
7. Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap geeft net als een gewone zwangerschap een positief resultaat.
8. Een vroege miskraam of missed abortion kan leiden tot een licht positief resultaat en later een negatief resultaat.
9. De zwangerschapstest kan een negatief resultaat geven bij een zeer hoge concentratie Hcg (>500.000 mIU/ml). Dit heet het 'prozone effect'. De gemiddelde waarden hCG tijdens een zwangerschap zijn 5 mIU/ml tot 288.000 mIU/ml van week 3 t/m 12. Daarna nemen de Hcg waarden weer af tot ongeveer 117.000 mIU/ml in week 40. Het prozone effect is daarom erg zeldzaam. Wanneer u toch het prozone effect vermoedt, kunt u de test normaal uitvoeren. U dient de urine op te vangen in een beker en die te verdunnen met evenveel water als er urine in de beker zit. Er zou nu weer een lijn tevoorschijn moeten komen wanneer het het prozone effect betreft.

Prestatiekenmerken

25 mIU/ml = extra vroege zwangerschapstest

Betekenis symbolen



Houdbaar tot



LOT nummer



Deze verpakking bevat een test



Alleen voor in-vitro gebruik



Niet opnieuw gebruiken



Bewaren tussen 2°C en 30°C



Buiten bereik van kinderen bewaren



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

FDA CE 0197



Fabriek: W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd.
No. 2 Zhongxin Street, Louzizhuang, Jinzhan Xiang,
Chaoyang District, Beijing, 10018 P.R. China



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hanover, Germany



Telano