


Zelftest. Voor eenmalig gebruik.  
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.  
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.  
Bewaren op een droge plek bij 2-30°C.  
Niet in de vriezer bewaren. Voor uitwendig gebruik.  
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum.

**oud:**


gebruiksaanwijzing  
zwangerschapsteststick in een aluminiumfolie zakje  
en een zakje met silicagelkorrels (om vocht op te nemen)

**wordt de test uitgevoerd:**

Verwijder het beschermkapje van de absorberende tip.  
Houd de tip tenminste 15 seconden in uw urinestraal.  
Leg de teststick plat neer en na 3 minuten kunt u  
het resultaat aflezen.  
De test moet op elk tijdstip van de dag worden gebruikt,  
beginnend vanaf de eerste dag na de verwachte menstruatie.  
Lees de gebruiksaanwijzing in het doosje voor  
meer details en uitleg en instructies.

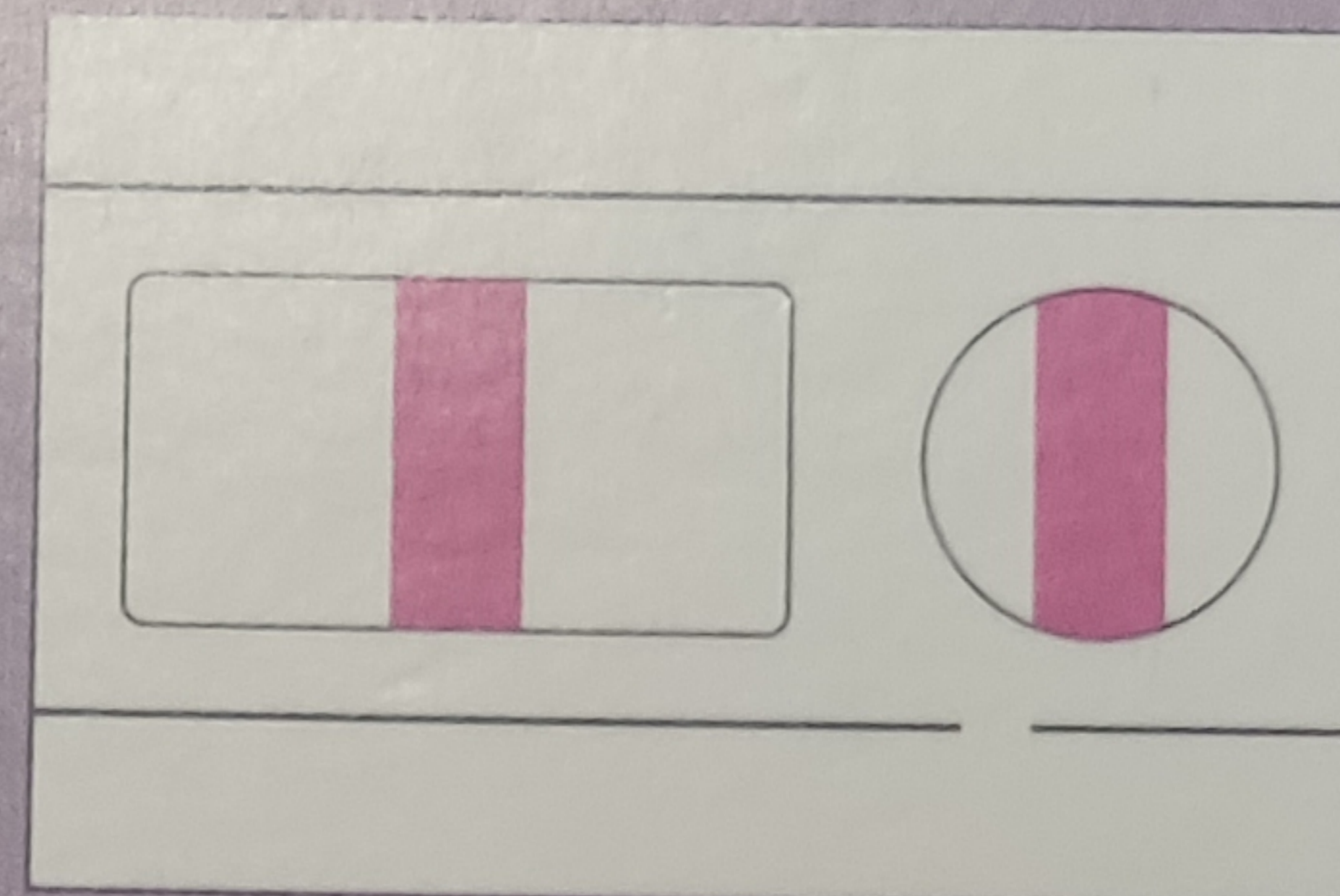

**Zwanger**

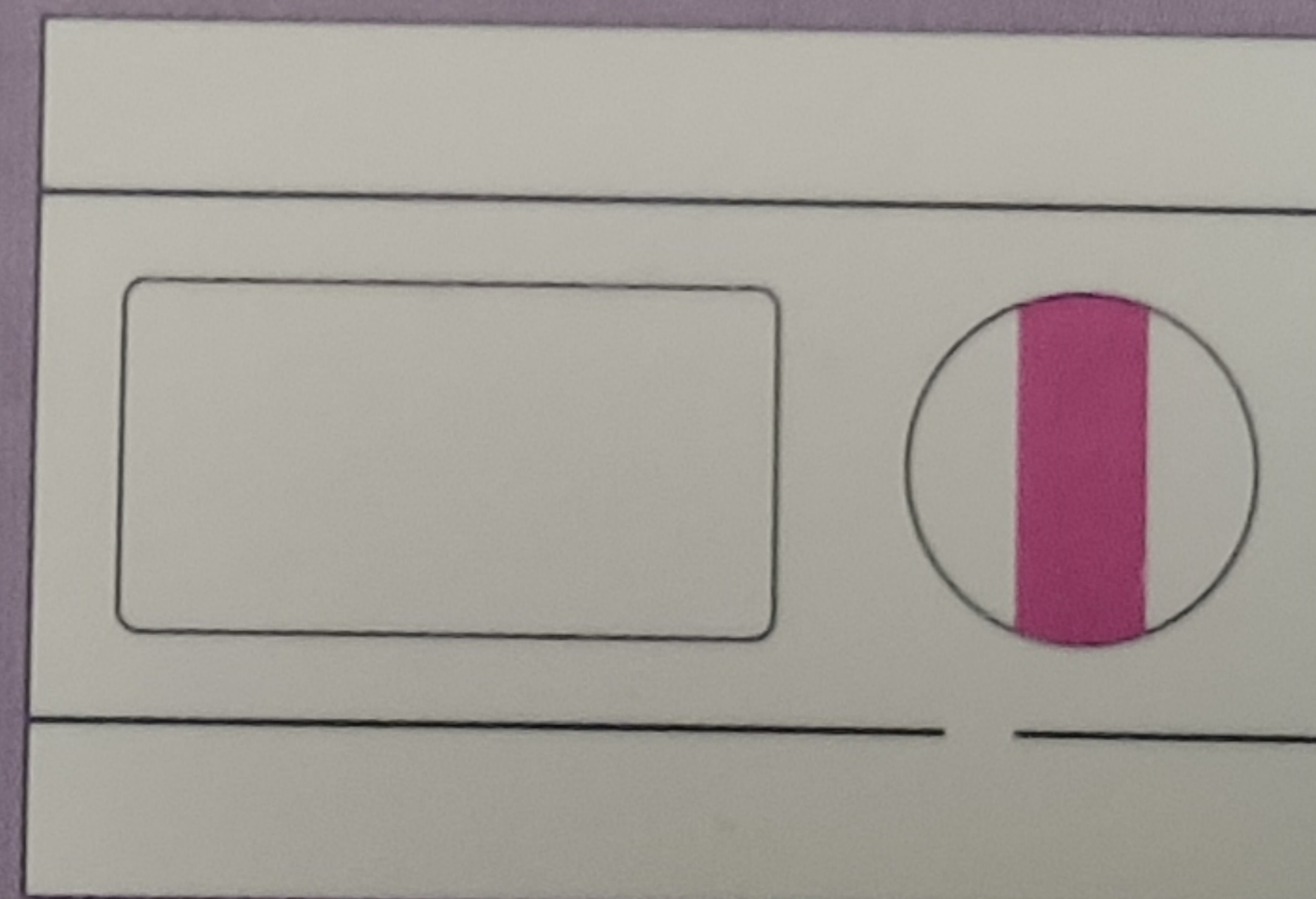


**Niet Zwanger**



ZI-nr.: 15.266.052  
Art.nr.: 52.400.972

CE 0483

 Savyon Diagnostics Ltd.,  
3 Habosem Street, Ashdod 7761003, Israël.  
[www.savyondiagnosics.com](http://www.savyondiagnosics.com)

EC REP Obelis S.A.  
Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussel, België

Distributeur in Nederland: Teva B.V.,  
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem