





**30 MINUTEN** voorafgaande aan de afname niet eten, drinken, roken of kauwgom kauwen.

stap 1

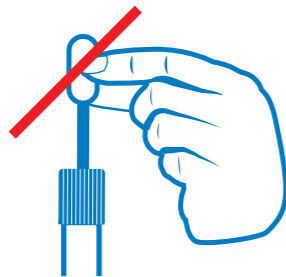


Open de verpakking. Neem de gehele swab uit de verpakking, zonder het uiteinde met de watten aan te raken.

stap 2

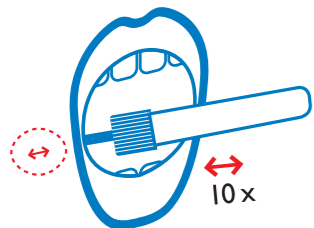


Wrijf achterin de mond 10 maal met het wattenstaafje over het onderste tandvlees. Laat de swab hierbij de tanden zo min mogelijk aanraken.

stap 3

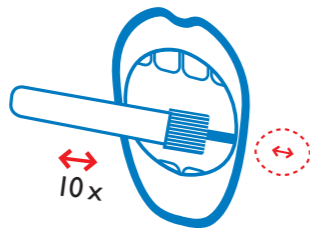


Herhaal de handeling nogmaals 10 maal aan de andere kant van de mond langs het onderste tandvlees.

stap 4

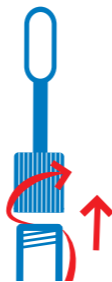


Houd het buisje rechtop zodat u de vloeistof niet morst. Schroef de dop van het testbuisje zonder het wattenstaafje aan te raken.

stap 5

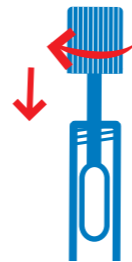

Draai de dop om en steek het wattenstaafje in het buisje. Sluit de dop goed!


stap 6

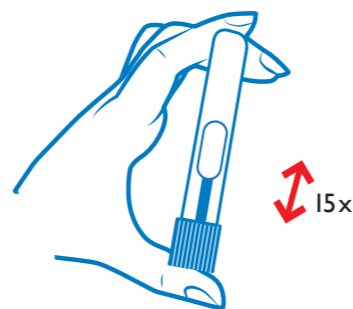

Draai het afgesloten buisje om en schud het 15 maal stevig.

stap 7

VERZENDING:

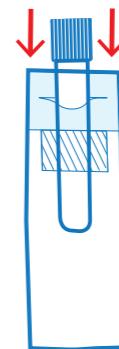

Doe het buisje in het kleine zakje.


stap 8



Sluit het zakje goed af zodat bij eventuele beschadiging van het buisje er geen vloeistof kan ontsnappen.

stap 9

stap 10

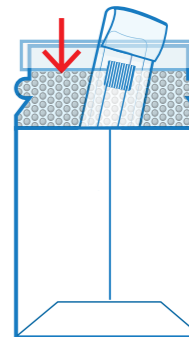

*Op zonnige dagen met hoge temperaturen de envelop liever afgeven bij een postkantoor òf net voor de postbode in een brievenbus doen.*

Stop het geheel in de verzendenvolp en sluit deze goed af. Controleer of er een retouradres op de envelop staat en stuur de envelop terug naar ons.

# HANDLEIDING DNA AFNAME

DNA TESTKIT