



HANDLEIDING



Handleiding Seniove U-vormige Douchestoel

Geachte Klanten,

Hartelijk dank voor het kiezen van onze Seniove U-vormige douchestoel, speciaal ontworpen voor intieme reiniging. Lees voordat u de stoel gebruikt de handleiding zorgvuldig door en volg alle instructies om de stoel correct te gebruiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Installatie Instructies:


Stap 1

Verwijder alle verpakkingen en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Zorg ervoor dat u de stoel op een vlakke en stabiele ondergrond installeert.



Stap 2

Plaats de zitting ondersteboven op een vlakke ondergrond, zodat de schroefgaten zichtbaar zijn. Plaats het hoofdframe met de gegroefde kant naar beneden in het midden van de zitting, en plaats dan een ander hoofdframe dwars over het onderste frame. Bevestig deze met de meegeleverde korte schroeven en ringen.

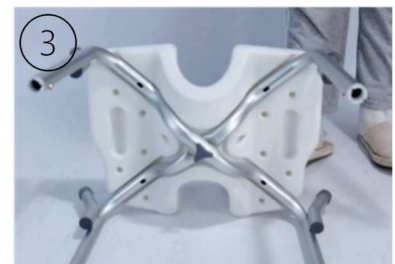

Stap 3

Plaats het L-vormige frame over het beenframe, zorg ervoor dat de schroefgaten uitgelijnd zijn, en schroef in elk L-frame twee lange schroeven inclusief ring vast en draai ze stevig aan.



Stap 4

Plaats de vier beenbuizen en stel ze zo af dat de stoel volledig in balans is. Schroef de vier grote antislip zuignappen in de buizen voor extra stabiliteit.



Stap 5

Bevestig de rugleuning op de L-vormige frames, zorg dat de schroefgaten uitgelijnd zijn en draai de vier korte schroeven inclusief ringen vast. Controleer regelmatig of alle schroeven nog stevig vastzitten.



Stap 6

Bevestig de twee gevoerde armleuning aan de framepoten. De armleuningen moeten naar buiten wijzen van de stoel af. Luister naar een hoorbare klik als teken dat de armleuningen veilig zijn bevestigd.



Veiligheidsinstructies:

Zorg ervoor dat de douchestoel volledig waterpas en stabiel is voor gebruik.

Eén kant kan ertoe leiden dat de douchestoel kantelt en valt, **VEILIGHEID VOOROP!**

Onderhoud:

Reinig de douchestoel regelmatig met water; de stoel is waterbestendig.

Inspecteer regelmatig alle onderdelen, inclusief schroeven, armleuningen, grote zuignappen en de buizen. Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.