


Dementieklok handleiding

Kenmerken:

- ✓ Niet-verkorte dag, periode van de dag, tijd en datum
- ✓ 5 verschillende alarmen en 3 verschillende medicatiemogelijkheden
- ✓ Automatisch dimmen of handmatig instellen van de felheid van het scherm
- ✓ 3 verschillende displays: normaal display (zwart) + rood-wit-blaauw display + analoge klok display (Als je wilt veranderen van display moet je op de afstandsbediening de OK/ENTER knop ingedrukt houden voor een aantal seconden)
- ✓ 9 verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Spaans, Portugees, Fins, Pools
- ✓ Fabrieksinstellingen reset

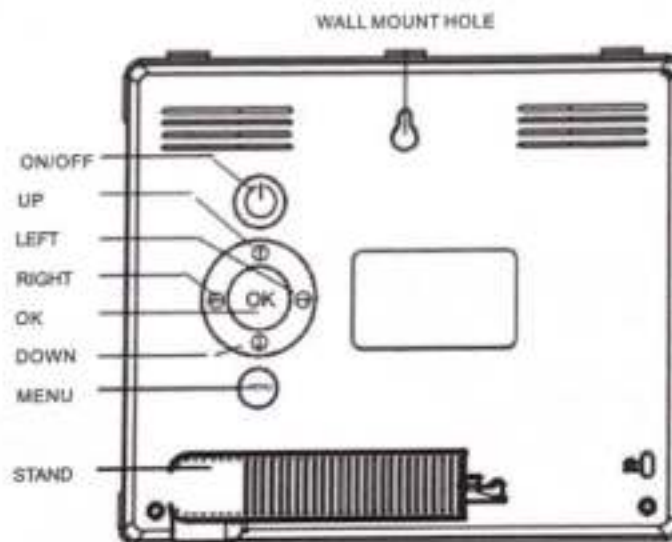

Instellingen:

Druk op de knop MENU om het menu weer te geven:

Opmerking: wijzigingen aan de regel kunnen alleen worden aangebracht als de cijfers zijn gemarkeerd en in een geel lettertype. Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toets om de cijfers aan te passen. Druk op de knoppen LINKS of RECHTS om de cijfers te kiezen die u wilt aanpassen. Druk op OK om op te slaan en op MENU om af te sluiten.

Taal	<	Nederlands	>
Tijd	<	16:00	>
Dag	<	08-06-2020	>
Tijd (12 of 24-uur)	<	24-uur	>
Datum Mode	<	Day-Month-Year	>
Automatische helderheid	<	Aan	>
Volume	<	28	>
Alarm			>
Medicatie			>
Fabrieksinstellingen	<	V5.1	>

Lijn 1- Taal:

Druk op "MENU" om de instellingen te openen, druk op UP of DOWN op de regel die u wilt wijzigen, druk op OK om naar de gewenste talen te wijzigen, druk op MENU om af te sluiten

Lijn 2- Tijd instellen:

Ga naar de regel van Tijd instellen, druk op "OK" om het uur van de minuut te onderstrepen, druk op OMHOOG van OMLAAG om aan te passen, druk vervolgens op "OK" om op te slaan en druk op MENU om af te sluiten.

Lijn 3 – Datum instellen:

Ga naar de regel van Datum instellen, druk op "OK" om de dag, datum of jaar te onderstrepen, druk op OMHOOG of OMLAAG om aan te passen, druk vervolgens op "OK" om op te slaan en druk op MENU om af te sluiten.

Lijn 4 – Tijd-mode:

Ga naar de regel van de tijdmodus, druk op OK om over te schakelen naar 12 uur van 24 uur naar keuze, druk op MENU om af te sluiten.

Line5 – Datum mode:<Dag-Maand-Jaar>of<Maand-Dag-Jaar> of<Jaar-Maand-Dag>

Ga naar de regel van Datummodus, druk op OK om over te schakelen naar de gewenste datummodus, Druk op MENU om af te sluiten.

Line6 – Automatisch dimmen

Ga naar de regel van automatisch dimmen, druk op OK om over te schakelen naar een van de vier modi (automatisch, uit, midden, laag) die u verkiest, druk op MENU om af te sluiten.

Automatisch: Normale helderheid begint van 7:00 uur tot 19:59 uur, scherm gedimd tot lage helderheid van 20:00 uur tot 06:59 uur,

Uit: altijd aan normale helderheid

Line7 – Volume instelling:

Ga naar de regel van Volume Set, druk op OK om te schakelen naar het volumeniveau van 0 tot 30 van uw voorkeur, druk op MENU om af te sluiten.

Line8 – Alarm instelling:

Ga naar de regel van Alarm Set, druk op OK voor de vijf groepen alarmklokinstellingen, druk op UP of DOWN om de instellingen voor tijd, datum of modus te kiezen. Druk op MENU om af te sluiten.

Tijd: dezelfde bewerking als bij het instellen van de tijd

Datum: druk op OK om over te schakelen naar een van de vier frequenties van uw voorkeur, van maandag tot vrijdag / zaterdag tot zondag / maandag tot zondag / uit

Modus: druk op OK om te wisselen tussen één keer en herhaal

Line 9 – Medicatieherinnering

Ga naar de regel van Medicatieherinnering, druk op OK voor de 3 groepen van medicatie-herinneringsinstellingen, druk op OMHOOG of OMLAAG om de instellingen Tijd, Status of Modus te kiezen. Druk op MENU om af te sluiten.

Tijd: dezelfde bewerking als bij het instellen van de tijd

Status: druk op OK om te schakelen tussen aan en uit

Modus: druk op OK om te wisselen tussen één keer en herhaal

Lijn 10 – Fabrieksinstellingen

Ga naar de regel van Fabrieks-reset, druk op OK om te resetten naar fabrieksinstellingen of niet, druk op MENU om af te sluiten.

Periodes van de dag:

6:00-11:59 Ochtend

12:00-17:59 Middag

18:00-23:59 Avond

24:00-5:59 Nacht

Wat zit er in de doos:

1x dementieklok

1x 5V2A power adapter

1x Handleiding