



Hygiënische bodemwisser



VM971D

Gebruiks- en onderhoudsinstructies

INVOERING

Dank u voor uw beslissing om de Hygiënische Bodemwisser van Aidapt te kopen. Aidapt Persoonlijke Toilethulpmiddelen worden vervaardigd uit de beste materialen en componenten die beschikbaar zijn. Bij correct gebruik zijn ze ontworpen voor jarenlang betrouwbaar en probleemloos gebruik.

VOOR GEBRUIK

- Verwijder voorzichtig alle verpakkingen. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, omdat dit het oppervlak van het product kan beschadigen.
- Controleer het product op zichtbare schade. Als u schade opmerkt of een defect vermoedt, gebruik uw product dan niet, aangezien dit uw veiligheid in gevaar kan brengen, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

GEBRÛIKSAANWIJZING Houd toiletpapier of een vochtig doekje naast het ingesprongen gedeelte aan het uiteinde van de Hygienic Bottom Wiper en druk op de knop aan het uiteinde van het ergonomisch ontworpen handvat om het tissue of vochtige doekje vast te pakken.

- Laat na gebruik de knop los om de grip op het toiletpapier of vochtige doekje los te maken en deponeer het in de toilet- of toiletemmer. Let op. Controleer en volg de door de fabrikant aanbevolen methode voor het weggooien van vochtige doekjes.

SCHOONMAAK

Reinig uw Persoonlijk Toilethulpmiddel met een geschikt desinfectiemiddel. Schurende schoonmaakmiddelen en/of schuursponsjes kunnen het product onherstelbaar beschadigen en mogen niet worden gebruikt. Zorg er altijd voor dat u de apparatuur na het reinigen droogveegt.

HERUITGAVE

Als u dit product opnieuw uitgeeft of op het punt staat dit product opnieuw uit te geven, controleer dan zorgvuldig alle onderdelen op hun veiligheid.

Bij twijfel dient u het product niet uit te geven of te gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier voor serviceondersteuning.

VERZORGING & ONDERHOUD

Voer regelmatig een veiligheidscontrole van het product uit als u zich zorgen maakt.

BELANGRIJKE GEGEVENS

De informatie in dit instructieboekje mag niet worden opgevat als onderdeel van of als bepalend enige contractuele of andere verbintenis van Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd of haar agenten of dochterondernemingen en er wordt geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de informatie.

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; als gebruiker moet u de aansprakelijkheid aanvaarden voor de veiligheid bij het gebruik van het product.

Aarzel niet om contact op te nemen met de persoon die dit product aan u heeft uitgegeven of met de fabrikant (hieronder beschreven) als u vragen heeft over de montage/het gebruik van uw product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX Telefoon: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk E-mail: accounts@aidapt.co.uk • aanpassingen@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk



Hulp bij konthygiëne



VM971D
Handmatig

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop van het persoonlijke toilethulpmiddel Aidapt. Aidapt persoonlijke toilethulpmiddelen zijn gemaakt van de beste materialen en componenten die beschikbaar zijn. Bij correct gebruik zijn ze ontworpen om u jarenlang plezier te bezorgen.

VOOR GEBRUIK

- Verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, omdat dit het oppervlak van het product kan beschadigen.
- Controleer het product op zichtbare schade. Als u schade opmerkt of een defect vermoedt, gebruik uw product dan niet omdat dit uw veiligheid in gevaar kan brengen en neem contact op met uw leverancier.

GEBRUIK

- Houd het toiletpapier of het natte doekje vast bij het ingesprongen gedeelte aan het uiteinde van het billendoekje en druk op de knop aan het uiteinde van de ergonomische handgreep om het toiletpapier of het natte doekje vast te houden.
- Laat na gebruik de knop los om de grip op het toiletpapier of vochtige doekje los te maken en plaats deze direct in het toilet of een toiletemmer.
Let op: volg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot het weggooien van vochtige doekjes.

SCHOONMAAK

Reinig uw persoonlijk toilethulpmiddel met een geschikt desinfectiemiddel. Schurende schoonmaakproducten en/of schuursponsjes kunnen het product onherstelbaar beschadigen en mogen niet worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de apparatuur altijd grondig afveegt.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Controleer het product regelmatig of als u zich zorgen maakt.

BELANGRIJKE INFORMATIE De

informatie in dit instructieboekje mag niet worden geïnterpreteerd als onderdeel van of als vaststelling van enige contractuele of andere verbintenis door Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd of haar agenten of dochterondernemingen en er wordt geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de informatie. is gegeven.

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; als gebruiker moet u uw deel van de verantwoordelijkheid voor uw veiligheid aanvaarden wanneer u het product gebruikt.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw dealer of de fabrikant (hieronder beschreven) als u vragen heeft over de montage of het gebruik van uw product.

Altai Frankrijk (Altai Europa Ltd)

ZA du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, Frankrijk Tel:
01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Billenveger



VM971D

Gebruiks- en onderhoudsinstructies

INLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van dit persoonlijke toilethulpmiddel van Aidapt. Dit product is gemaakt van de beste materialen die beschikbaar zijn. Het is ontworpen om bij correct gebruik vele jaren betrouwbare en probleemloze werking te bieden.

VOOR GEBRUIK

- Verwijder voorzichtig de verpakking. Gebruik geen messen of andere scherpe instrumenten, aangezien deze het oppervlak van het product kunnen beschadigen.
- Controleer uw product vóór gebruik op zichtbare schade. Als u schade opmerkt of een defect vermoedt, gebruik het product dan in geen geval, maar neem contact op met uw dealer.

GEBRUIK

- Houd toiletpapier of een vochtige doek naast de inkeping aan het uiteinde van de "billen". Sweeper" en druk op de knop op het handvat om het doekje te pakken.
- Druk na gebruik nogmaals op de knop om het doekje of toiletpapier weg te gooien.
Let op: Gooi de vochtige doekjes alleen weg met het huishoudelijk afval (en niet in het toilet).

REINIGING

Reinig uw persoonlijk toilethulpmiddel met een geschikt desinfectiemiddel. Schuurmiddelen of schuursponsjes kunnen ernstige en onherstelbare schade aan uw product veroorzaken en mogen daarom niet worden gebruikt. Veeg het product na het reinigen altijd droog.

OPNIEUW

BESTELLEN Als u dit product opnieuw toewijst of bezig bent het opnieuw toe te wijzen, inspecteer dan alle onderdelen grondig op veiligheid.

Als u twijfelt, gebruik het apparaat dan niet en wijs het niet opnieuw toe, maar neem onmiddellijk contact op met uw dealer.

VERZORGING EN

ONDERHOUD Voer regelmatig een veiligheidscontrole van het product uit als u zich zorgen maakt.

BELANGRIJKE INFORMATIE De

informatie in deze handleiding vormt niet de basis van of maakt geen deel uit van enige contractuele of andere verplichting van Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd.

of een van haar agenten of haar dochterondernemingen en er wordt geen garantie of bindende verklaring gegeven met betrekking tot de informatie in kwestie.

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor de veiligheid bij het gebruik van het product.

Aarzel niet om contact op te nemen met de persoon die dit product aan u heeft uitgegeven of met de fabrikant (hieronder (beschreven) als u vragen heeft over de montage/het gebruik van uw product.

Altai Duitsland (Altai Europa Ltd.)

Klachten & retouren naar: WH Service,

Merowingerstraße 83, 47533 Kleve Tel: 02821/971620 | Fax:

02821/12815



Hygiënische Billen Veger



VM971D

Gebruiks- en onderhouds-instructies

INVOERING

Hartelijk dank voor de aanschaf dit Aidapt product. De producten is vervaardigd van duurzame materialen. Bij normaal gebruik zult u er jarenlang plezier van hebben.

VOOR GEBRUIK

Controleer het product voor gebruik op beschadigingen. Neem contact op met uw leverancier als u onregelmatigheden vermoedt.

HOE TE GEBRUIKEN

- Houd toiletpapier of vochtige doek naast de inkeping aan het uiteinde van de Hygiënische Billen Veger en druk op de knop bij de handgreep om het doekje vast te grijpen . • Na gebruik, de knop weer indrukken om het toiletpapier of vochtige doek in het toilet of pot te deponeren. NB. Wij verzoeken u gebruikte doekjes weg te gooien volgens de door de fabrikant aanbevolen methode.

SCHOONMAKEN Het

is belangrijk dat u de producten met een zachte doek en een mild niet schurend schoonmaakmiddel reinigt. Schuurmiddelen of schuursponsjes zullen de producten onherstelbaar beschadigen. Droogde producten na het reinigen.

HERGEBRUIK

Als u dit product doorgeeft aan een ander, controleer dan alle onderdelen op hun veiligheid.

Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier.

ONDERHOUD

Controleer regelmatig of het product nog veilig of compleet is. Neem bij twijfel contact op met de leverancier of de fabrikant van het product.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Aan de informatie in deze handleiding kunnen rechten of verplichtingen worden ontleend.

Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales)Limited, haar agenten of haar dochterondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze handleiding.

Gebruik uw gezonde verstand en neem geen onnodige risico's bij gebruik van Aidapt producten.

Mocht u twijfelen aan de veiligheid van het product, neem dan contact op met de leverancier of de fabrikant van het product.

**Altai Nederland (Altai Europe Ltd) 't Zwarteland 10b,
3925CK Scherpenzeel, NL Tel: 033-2779216 | Fax:**

033-2779211 | E-mail: sales@aidapt.nl