

Producthandleiding



Oorsmeer Verwijderaar
met Camera

App-downloadmethode



Gebruik u mobiele camera om de QR-code te scannen om vervolgens de app te installeren

IOS app Store

Apple gebruikers

Selecteer de app store na het scannen van de code. Open de app store om de app te installeren. Je kunt ook direct zoeken naar **Cooler** in de App Store.

Android gebruikers

Nadat u de code heeft gescand selecteert u de **Android Google** optie om naar de volgende pagina te gaan. Klik op: downloaden of installeren via de browseropties.

Google play store

Verbindingsproces

1. Controleer bij ontvangst van het product eerst de batterij voldoende is. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om hem in te schakelen en het blauwe licht zal oplichten.




3. Open de app en klik op de startknop om het product te gaan gebruiken.



2. Open de telefooninstellingen WIFI-functie. Maak verbinding met de **Cooler-XXXX** hotspot.



4. Als u deze melding tegenkomt, schakel dan niet over naar Wifi en klik op "use" om verder te gaan.

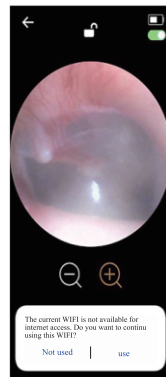

Product toelichtingen

Product Naam :	Nassauproducts oorsmeer verwijderaar met camera
gewicht :	18 gram
Batterijcapaciteit :	130mAh
Resolutie :	Ultra HD camera
Verbinding Wifi :	Cooler XXXX
Passende afstand :	0.9 tot 2.1 Centimeter
Werkfrequentie :	2.4GHz
Gebruikstemperatuur :	-5°C tot 45°C

Opmerking ⚠

- Als het beeld wazig en/of onduidelijk is, adviseren wij om met een wattenstaafje over de lens heen te gaan.
- Gebruik bij het schoonmaken van de lens een schoonmaakdoek.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar oud.
- Kinderen mogen het product niet alleen gebruiken om letsel te voorkomen.
- De temperatuur van het product zal licht stijgen bij gebruik. Wees gerustgesteld, dit hoort.
- Dit product wordt alleen gebruikt als artikel voor persoonlijke verzorging en kan niet als medische uitrusting worden gebruikt.
- Plaats het product op een koele en droge plek, uit de buurt van ontstekingsbronnen en bijtende stoffen.

Opladinstructies

- Schakel het product uit voordat u het oplaadt.
- Tijdens het opladen wordt het indicatielampje rood weergegeven.

Problemen oplossen

1. Het scherm zit vast

- De afstand voor gegevensoverdracht is te ver, u kunt het product het beste niet te ver van de telefoon gebruiken.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, kan dit ook stotteren veroorzaken. Laad het alstublieft tijdig op.

2. Wifi-sigitaal kan niet worden verzonden / word onderbroken

- Hoe lager het batterijniveau, hoe zwakker het wifi-sigitaal. Laad de batterij vóór gebruik volledig op.
- Er zijn te veel wifi-signalen in de buurt, dit kan invloed hebben op de verbinding met het product.
- Zorg ervoor dat de Smartwatch is verbonden met de wifi van het product.

3. Geen beeldweergave

- Controleer of de telefoon is verbonden met de wifi naam van het product.
- Nadat u de verbinding heeft bevestigd en er nog geen weergave is, sluit u de app af en opent u de app opnieuw.