

Een comfortabel passende opvulling voor je kunstgebit



Instructies:

1. De prothese grondig wassen en drogen, en zorg ervoor dat u alle eerder aangebrachte fixeer- en lijmstoffen en vulling verwijdert.
2. Warm de Sof-Grip-spuit door, gedurende 2 minuten in een beker, zeer heet water te plaatsen.
3. Knijp voorzichtig een gelijkmatige stroom hars uit de spuit op het passende oppervlak van de prothese.
4. Verspreid de Sof-Grip-hars met natte vingers over het gebit.
5. Plaats het kunstgebit in de mond en beweeg de kaken tandenknarsend 5 keer heen en weer en klapper vervolgens de tanden voorzichtig gedurende nog eens 2 minuten.
6. Verwijder het kunstgebit uit de mond en veeg de overtollige hars af met natte vingers.
7. Spoel tenslotte de mond voordat u het kunstgebit in de mond plaatst.

Verder advies:

1. Draag het kunstgebit continu gedurende minstens 8 uur.
2. Eet de eerste 3 uur niet.
3. Sof-Grip kan tot 28 dagen worden verwijderd en indien nodig kunt u een nieuwe hoeveelheid toepassen.
4. Raadpleeg uw tandarts bij blijvende gebitsproblemen.

Sof-Grip is een materiaal van acrylhars dat is ontworpen voor het maken van een comfortabele passende vulling voor het gebit. Het is klaar voor gebruik en vereist geen vermenging.

Opslag:

Na gebruik de dop terugplaatsen en op een koele, droge plaats bewaren.

Toepassingen:

1. Dempt de pijn bij nieuwe prothesen.
2. Comfortabel passend maken van het kunstgebit.
3. Losse prothesen stabiliseren.
4. Het weer passend maken van het kunstgebit na kaakrimp.
5. Lokaal vullen van holten in kunstgebitten.