

Hoe gebruikt u de kiss-of-life beademingsmasker?

1. Open de verpakking van het kiss-of-life beademingsmasker
2. Vouw het beademingsmasker uit
3. Kijk waar het gezicht gemarkeerd staat. Dit kan een print van een gezicht zijn of een beschrijving in woorden. Zo weet je hoe je het beademingsmasker over het gezicht moet plaatsen van de persoon die je gaat reanimeren.
4. Als het kiss-of-life beademingsmasker elastieken bevat, kun je die om de oren van het slachtoffer plaatsen - zo blijft het beademingsmasker tijdens de reanimatie goed zitten.
5. Ter hoogte van de mond vind je een plastic ventiel of een membraan dat je beschermt tegen direct contact met de mond van het slachtoffer.
6. Je kunt nu veilig starten met het reanimeren van het slachtoffer.



Leg één hand op het voorhoofd en 2 vingers van uw andere hand onder de punt van de kin. Kantel het hoofd iets achterover.



Plaats het masker op de mond van de patient, Hou de neus gesloten.



Plaats het masker op de mond van de patient. Hou de neus gesloten.



Wissel de beademing af met hartcompressies in een ritme van twee beademingen en 30 compressies.